



# ESTEEM<sup>MD</sup>

AVEC BARRIÈRES CUTANÉES MALLÉABLES




1

## Application de la barrière cutanée malléable




Retirer la barrière cutanée malléable du sac.

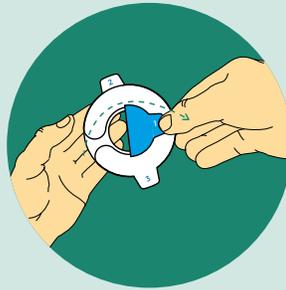


Retirer le papier protecteur 1. Il s'agit du côté à façonner.




Rouler et façonner l'anneau à la taille de la stomie. **Ne pas étirer, tirer ou couper l'anneau.** Appuyer sur les bords pour les maintenir en position lorsque la taille souhaitée est atteinte.

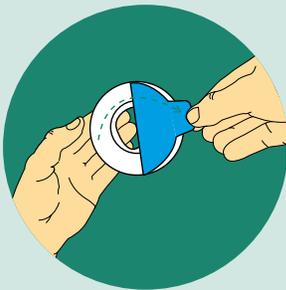

Retirer le papier protecteur 2. Ce côté sera collé sur la peau.

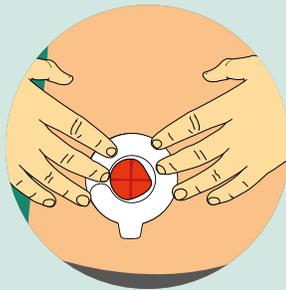

Placer la barrière cutanée autour de la stomie. Rouler l'adhésif vers la stomie afin qu'il l'épouse parfaitement.

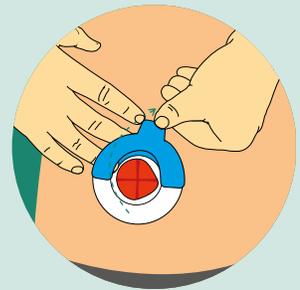


Retirer le papier protecteur 3.

2

## Application du sac sur la barrière cutanée malléable



Retirer le papier protecteur du sac.

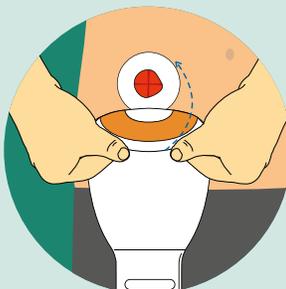


Placer le sac sur la barrière cutanée. Lisser la barrière cutanée et la maintenir en place pendant 30 secondes.

3


## Fermeture de sac



Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent.

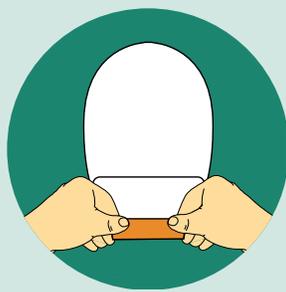


Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.

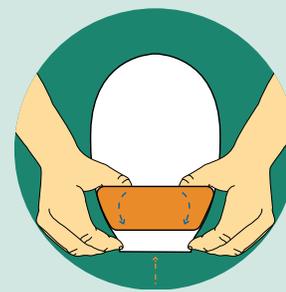

Retourner la pochette Lock-it-Pocket<sup>MC</sup> sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4

## Vidange et nettoyage du sac

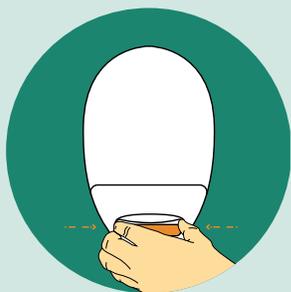

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.



**Conseils pour nettoyer le sac :**  
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.



Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

## Retrait du sac



Lorsque le sac doit être changé, il est possible de le retirer avec la barrière cutanée.