

Tout ce que vous aimez des pansements mousse et *bien plus encore*



Actuellement,

un seul pansement offre le confort et la simplicité d'un pansement MOUSSE combinés aux bénéfices d'une interface AQUACEL^{MD}

AQUACEL^{MD}
Foam 



Pansements **AQUACEL^{MD}**
ESSAYÉS. ÉPROUVÉS. EFFICACES.^{MC}



Guide d'application

Guide d'application[‡]

Application standard :

Nettoyez la plaie avec un nettoyant de plaie recommandé.

Le pansement **AQUACEL^{MD} foam** peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.

Choisissez une taille et une forme de pansement dont le coussin absorbant central (zone à l'intérieur de la fenêtre adhésive) dépasse la plaie d'au moins 1 cm. Le pansement peut être taillé si nécessaire. Si le pansement adhésif est taillé, du ruban adhésif supplémentaire pourrait être nécessaire pour le tenir en place. Du ruban adhésif supplémentaire, ou toute autre forme de fixation, sera requis pour tenir le pansement non adhésif **AQUACEL^{MD} foam** en place.

Retirez le pansement de l'emballage stérile. Évitez de toucher la zone qui entre en contact avec la plaie et la surface adhésive si applicable. Retirez la pellicule si vous utilisez le pansement adhésif.

Tenez le pansement au-dessus de la plaie et alignez la partie centrale du pansement avec le centre de la plaie. Positionnez le coussin directement au-dessus de la plaie. Dans le cas du pansement adhésif, lissez la bordure adhésive.

Si le pansement n'a pas de bordure adhésive ou si le pansement adhésif a été taillé, un ruban adhésif ou un bandage approprié devrait être utilisé pour tenir le pansement en place.



Retrait :

Le pansement devrait être changé lorsque saturé et/ou lors d'une recommandation clinique (c.-à-d. fuite, saignement, augmentation de la douleur, possibilité d'infection). Le pansement **AQUACEL^{MD} foam** peut demeurer en place jusqu'à un maximum de sept jours.

Pour retirer le pansement, appuyez délicatement sur la peau et soulevez doucement un coin du pansement. Continuez jusqu'à ce que tous les bords soient décollés. Soulevez le pansement doucement et jetez-le selon les protocoles cliniques en place.



[‡]Veuillez consulter la notice du pansement **AQUACEL^{MD}** foam pour des instructions d'utilisation complètes.



Pansements **AQUACEL[™]**

ESSAYÉS. ÉPROUVÉS. EFFICACES.^{MC}

Processus d'application pour des zones spécifiques à panser :

Pour des zones du corps spécifiques à panser comme le talon ou le sacrum, les pansements adhésifs de formes spéciales peuvent être utilisés.

Procédez selon le guide d'application standard et incorporez les instructions spécifiques décrites ci-dessous selon la partie à panser.

Pour panser un sacrum :



1. Retirez la pellicule.
2. Tenez les bords du pansement. Pliez le pansement en deux (en repliant le dos du pansement sur lui-même). Positionnez le pli dans le sillon interfessier.
3. Gardez le coussin central en contact avec la plaie et lissez les bords du pansement

Pour panser un talon :



1. Retirez la pellicule.
2. Alignez le haut du pansement avec l'arrière du talon et fixez-le.
3. Pliez le pansement pour couvrir le bas du talon et lissez-le pour compléter l'application.

Pour panser le talon d'un petit pied :



1. Choisissez un pansement adhésif carré de la bonne taille. Ne retirez pas la pellicule. Coupez deux incisions diagonales d'environ 5 cm.
2. Retirez la pellicule. Alignez le haut du pansement avec l'arrière du talon et fixez-le.
3. Pliez le pansement pour couvrir le bas du talon et lissez-le pour compléter l'application. Un ruban adhésif ou un bandage approprié devrait être utilisé pour tenir le pansement en place.

Pour panser d'autres parties - coude, doigt/orteil



Peut être taillé pour obtenir un pansement de la taille et de la forme nécessaire.

Un bandage de rétention approprié ou toute autre forme de fixation devrait être considéré pour tenir le pansement en place.

Gamme de produits

Adhésif :




420680



420619



420621

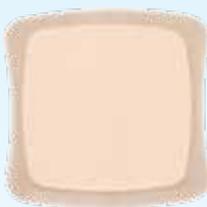

420623



420624

Code de produit	Dimension externe	Dimension interne	Nombre par boîte
420680	10 cm x 10 cm	7 cm x 7 cm	10
420619	12,5 cm x 12,5 cm	8,5 cm x 8,5 cm	10
420621	17,5 cm x 17,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm	10
420623	21 cm x 21 cm	17 cm x 17 cm	5
420624	25 cm x 30 cm	19 cm x 24 cm	5
420625	19,8 cm x 14 cm	14 cm x 8,7 cm	5
420626	20 cm x 16,9 cm	11,4 cm x 13,5 cm	5



Talon
420625



Sacrum
420626

Non adhésif :



5 cm x 5 cm
420631
10 par boîte



10 cm x 10 cm
420633
10 par boîte



15 cm x 15 cm
420635
5 par boîte



15 cm x 20 cm
420637
5 par boîte



20 cm x 20 cm
420636
5 par boîte



Pansements **AQUACEL**TM
ESSAYÉS. ÉPROUVÉS. EFFICACES.^{MC}

MC^{MD} indiquent des marques déposées de ConvaTec inc.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre Centre de relation avec la clientèle (infirmières autorisées présentes) au 1 800 465-6302, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au www.convatec.ca.

