






## Barrières cutanées malléables **NATURA<sup>MD</sup>** avec collerette Accordéon

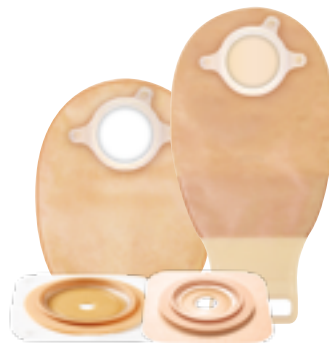


### 1 Application de la barrière cutanée malléable

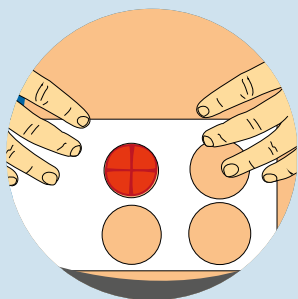


Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée de la taille appropriée. Ne pas retirer tout de suite le papier protecteur transparent au dos de la barrière cutanée.

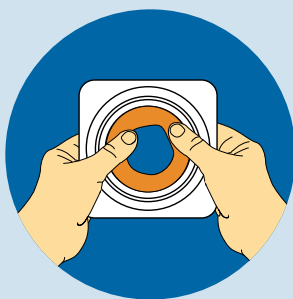

Pour obtenir un ajustement sur mesure, rouler et façonner l'anneau à la taille de la stomie  
**Ne pas étirer, tirer ou couper l'anneau.**

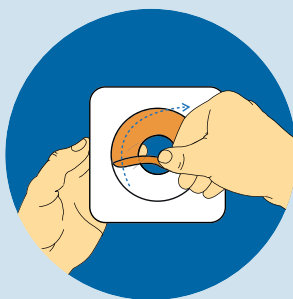


Retirer le papier protecteur transparent et centrer la stomie dans l'ouverture. Appliquer sur une peau propre et asséchée.

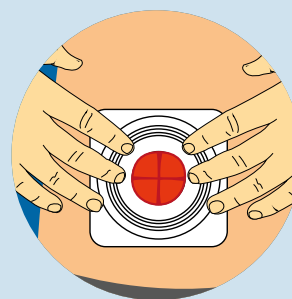


Retirer le papier protecteur blanc. Appuyer sur la barrière cutanée pour la placer autour de la stomie et au besoin, ajuster l'adhésif autour de celle-ci afin qu'il l'épouse parfaitement. Lisser la barrière cutanée et la maintenir en place pendant 30 secondes.


### 2 Application et port du sac

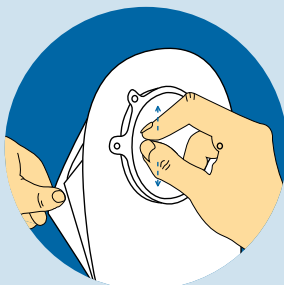

Séparer les deux parois du sac pour laisser entrer un peu d'air.

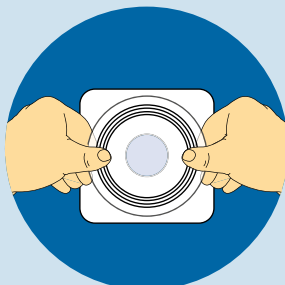


**RELEVER** la collerette Accordéon et la maintenir en position avec les pouces au-dessus et les doigts en dessous. Aligner la collerette du sac sur la collerette de la barrière cutanée.

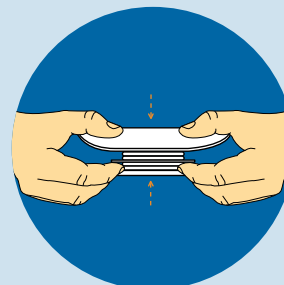


En partant de la section inférieure, exercer une pression tout autour des collerettes jusqu'à ce qu'elles soient complètement encastrées l'une dans l'autre. Ensuite, placer la collerette en position **APLATIE** afin qu'elle soit plus discrète.

3


### Fermeture du sac

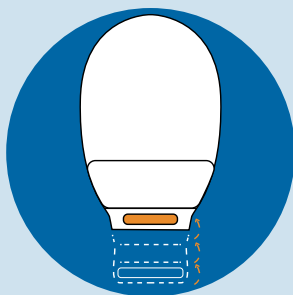

Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent.

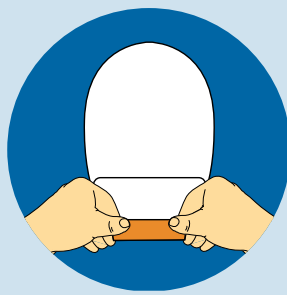


Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.

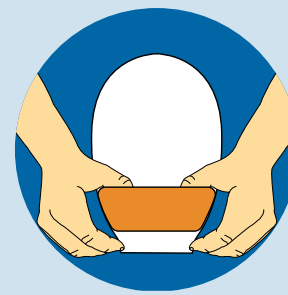


Retourner la pochette Lock-it-Pocket<sup>MC</sup> sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4


### Vidange et nettoyage du sac

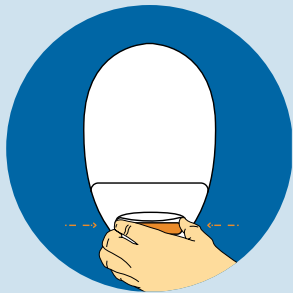

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.

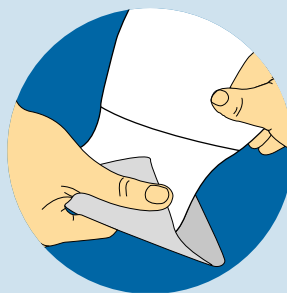

**Conseils pour nettoyer le sac :**  
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.

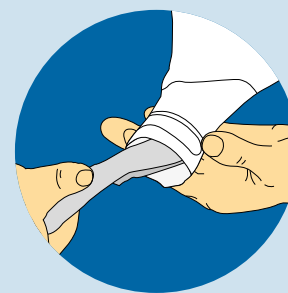


Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

### Retrait du sac



Pour décoller le sac de la collerette, maintenir celle-ci en place d'une main, et de l'autre, détacher délicatement le sac.

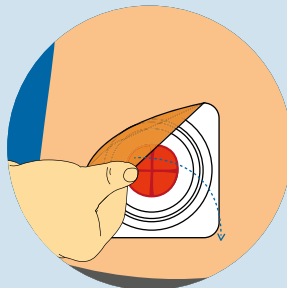

Pour retirer la barrière cutanée, la décoller délicatement en prenant appui sur la peau adjacente avec l'autre main.