



So wechseln Sie Ihren **AQUACEL® Foam** Wundverband zu Hause

Warum muss ich meinen Wundverband wechseln?

Ein Wundverband ist dafür ausgelegt, einen Bereich abzudecken und zu schützen, um die Wunde sauber zu halten. Der Wundverband fungiert als Barriere, um die Menge an Bakterien zu verringern, die in die Wunde gelangen und die zu einer Infektion führen können.

Wann muss ich meinen Wundverband wechseln?

Sie sollten Ihren Wundverband nach den Vorgaben Ihres Arztes und Ihrer medizinischen Fachkraft wechseln oder wenn ihr Wundverband beginnt durchzunässen.

Diese Hinweise zeigen Ihnen, wie Sie den **AQUACEL® Foam** Wundverband richtig anwenden.



Es ist wichtig, dass die Wunde immer mit einem Wundverband bedeckt ist, um das Risiko einer Infektion zu verringern.



Was ist ein **AQUACEL® Foam** Wundverband ?

AQUACEL® Foam ist ein Schaumstoffverband mit Hydrofiber®. An der Wundkontaktfläche bildet der Wundverband ein weiches Gel, sobald er mit Wundflüssigkeit in Kontakt kommt. Diese Gelbildung ist erwünscht und trägt dazu bei, die überschüssige Wundflüssigkeit aufzunehmen und Ihre Wunde sauber und feucht zu halten, was den Heilungsprozess unterstützt.

Vor dem Verbandwechsel

1. Handhygiene



Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.
Danach gründlich mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2. Legen Sie die benötigte Ausrüstung bereit.



Saubere Einmalhandschuhe, 3 Paar



Spiegel zum Betrachten
der Wunde (bei Bedarf)




Pflasterlöser
(bei Bedarf)



Einweg-Müllbeutel für
benutzte Wundverbände



Wundspüllösung und
sterile Kompressen

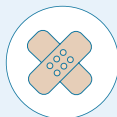

Wundverband



Feuchtigkeitshautpflege
(nach Bedarf)



Klebeband und
saubere Schere

3. Vorherigen Wundverband entfernen und entsorgen





Entfernen Sie den Wundverband mit sauberen Handschuhen
und entsorgen Sie ihn in einem Plastikbeutel.
Danach Handschuhe entsorgen.

Verbandanlage




1 Hände waschen / Handschuhe

Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Handtuch ab. Legen Sie dann saubere Handschuhe an.

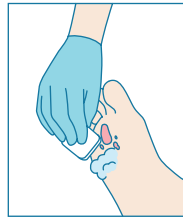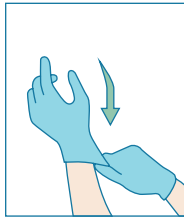



2 Wunde reinigen

Reinigen Sie Ihre Wunde von innen nach außen mit einer sterilen Kompresse und einer Wundspüllösung, die Ihnen von Ihrem Arzt oder medizinischer Fachkraft empfohlen wurde.

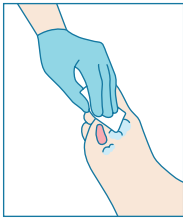

3 Haut abtrocknen

Achten Sie darauf, dass die Haut an den Wundrändern sauber und trocken ist. Bitte die Wundumgebung nicht tupfen, sondern wischen. Dabei pro Wischvorgang eine neue sterile Kompresse verwenden. Danach Handschuhe entsorgen, Hände waschen und saubere Handschuhe anlegen.

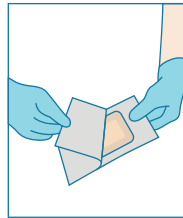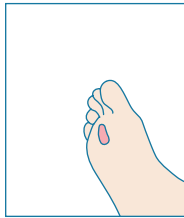


5 Wundverband öffnen

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung mit dem **AQUACEL® Foam** Wundverband und ziehen Sie die beiden durchsichtigen Kunststoffabdeckungen bis zu den Rändern des Wundverbandes zurück. Vermeiden Sie das Berühren der Wundkontaktseite.




6 Wundverband anlegen

Positionieren Sie den Wundverband über der Mitte der Wunde und achten Sie darauf, dass er die Wunde um mindestens 1 cm überlappt. Halten Sie den Wundverband mit einer Hand fest und entfernen mit der freien Hand die erste durchsichtige Kunststoffabdeckung. Streichen Sie dabei die Ränder des Verbandes beim Andrücken glatt.

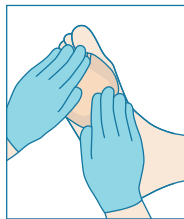

7 Wundverband fixieren und sichern

Den Wundverband erneut mit einer Hand halten und mit der anderen die zweite durchsichtige Kunststoffabdeckung entfernen. Die Ränder des Wundverbandes beim Andrücken glattstreichen. Zur Sicherung und Fixierung der nicht-klebenden Variante befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder medizinischen Fachkraft.

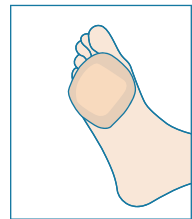



Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie folgende Symptome beobachten:

- Neue oder sich vergrößemde Wunde
- Neue oder sich ausbreitende Rötung oder Schwellung der wundumgebenden Haut
- Neue oder stärkere Schmerzen
- Neuer oder stärkerer Geruch nach dem Reinigen der Wunde
- Mehr Wundexsudat (Flüssigkeit, die aus der Wunde austritt) als bisher

Weitere Hinweise zu Einsatzgebieten und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte den Anwendungshinweisen auf dem Beipackzettel.

Mit den nachfolgenden PZN-Nummern (D), den REF (A) und den Pharmacodes (CH) stellen Sie sicher, dass Sie den Original-Wundverband von ConvaTec erhalten haben.

AQUACEL[®]Foam

Schaumverband mit verlässlichem Wundrandschutz



Vorsichtsmaßnahmen

- Kein Wundverband darf länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben, ohne gewechselt zu werden.
- Sollte der Wundverband sich nur schwer entfernen lassen, benetzen Sie ihn großzügig mit steriler Kochsalzlösung und lassen Sie diese etwas einweichen.
- Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Größe	Packungs- inhalt	PZN (D)	REF (A)	Pharma- code (CH)
adhäsiv (klebend)				
8 x 8 cm	10 Stück	087 464 95	420 804	780 79 37
8 x 13 cm	10 Stück	108 183 16	421 149	613 31 85
10 x 10 cm	10 Stück	095 085 33	420 680	780 79 36
10 x 20 cm	5 Stück	108 182 56	421 150	613 31 56
10 x 25 cm	5 Stück	108 182 62	421 152	613 31 62
10 x 30 cm	5 Stück	108 182 79	421 154	613 31 79
12,5 x 12,5 cm	10 Stück	090 603 40	420 619	529 31 42
17,5 x 17,5 cm	10 Stück	090 603 92	420 621	529 31 59
21 x 21 cm	5 Stück	090 604 17	420 623	529 31 65
25 x 30 cm	5 Stück	090 604 52	420 624	529 31 94
Ferse 19,8 x 14 cm	5 Stück	090 604 75	420 625	529 31 71
Sakral 20 x 16,9 cm	5 Stück	090 605 93	420 626	529 31 88
Sakral 24 x 21,5 cm	5 Stück	108 184 05	420 828	613 22 92
nicht-adhäsiv (nicht-klebend)				
5 x 5 cm	10 Stück	089 997 82	420 631	529 30 76
10 x 10 cm	10 Stück	089 997 99	420 633	780 79 38
10 x 20 cm	5 Stück	108 183 22	421 156	613 31 91
15 x 15 cm	5 Stück	089 998 07	420 635	529 30 99
15 x 20 cm	5 Stück	089 998 59	420 637	529 31 13
20 x 20 cm	5 Stück	089 998 36	420 636	529 31 07

Weitere Informationen

Diese Broschüre wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen Ihren Wundverband sicher und korrekt anzulegen und zu entfernen. Wenn Sie weiteren Rat zur Anwendung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft.

Zusätzliche Informationen zu ConvaTec Wundverbänden finden Sie auf unseren Internetseiten:



www.convatec.de/wundversorgung



www.convatec.at/wundversorgung



www.convatec.ch/wundversorgung



ConvaTec