

Características



Eye-Fix

Eye-Fix es un **dispositivo de fijación no estéril** especialmente diseñado para una sujeción y protección de la zona ocular. Hay dos modelos, con o sin ventana. Se pueden utilizar hasta un máximo de **3 días**.



Cath-Fix

Cath-Fix es un **dispositivo de fijación no estéril** especialmente diseñado para la sujeción de sondas vesicales u otro tipo de catéteres. Se puede utilizar hasta un máximo de **3 días**.



Naso-Fix

Naso-Fix es un **dispositivo de fijación no estéril** especialmente diseñado para la sujeción de las sondas nasogástricas y tubos nasales. Se puede utilizar hasta un máximo de **3 días**.

Composición

Dispositivos diseñados con un material de tejido-no tejido de color piel que se adhieren perfectamente gracias a las formas anatómicas de los mismos.

El adhesivo es atraumático y eficaz y disponemos de varios tamaños para Cath-Fix y Naso-Fix.

Puntos clave

• Seguridad y Adaptabilidad

La composición y diseño de los dispositivos permiten una aplicación segura y eficaz de los mismos.

En el caso de Eye-Fix, se protege el globo ocular de una posible evaporación cuando se está bajo anestesia o inconsciente. El modelo con ventana permite una cierta visibilidad en aquellos casos en que la persona pueda ver pero se necesite proteger la zona de la entrada de cuerpos extraños del exterior.

Naso-Fix y Cath-Fix aseguran el mantenimiento de los catéteres para los que están diseñados a sujetar, evitando la retirada accidental de los mismos.

• Discreción y Confort

Los dispositivos de fijación de ConvaTec son discretos, fáciles y cómodos de usar. Se disponen de diversos tamaños para poder adaptar más eficazmente el dispositivo de fijación según la edad del paciente.



Nuestro mundo es lo que hacemos de él™

Dispositivos de Fijación Eye-Fix/Cath-Fix/Naso-Fix



Guía de uso



Abrir el dispositivo y aplicarlo en la zona dónde se encuentra el catéter o sonda a sujetar.

Escoger el tipo de dispositivo de fijación según las formas anatómicas y tamaños disponibles.

Referencias

Nº Referencia	Nº SAP	Descripción de producto	Unidades/caja
1260010180	1256290	NASO-FIX PEDIÁTRICO Dispositivo de fijación para sonda nasogástrica	100/caja
1260030180	1256292	NASO-FIX PEQUEÑO Dispositivo de fijación para sonda nasogástrica	100/caja
1260020180	1256291	NASO-FIX GRANDE Dispositivo de fijación para sonda nasogástrica	100/caja
1260060180	1256227	CATH-FIX PEQUEÑO Dispositivo de fijación para sonda vesical	100/caja
1260050180	1256226	CATH-FIX MEDIANO Dispositivo de fijación para sonda vesical	100/caja
1260040180	1256515	CATH-FIX GRANDE Dispositivo de fijación para sonda vesical	100/caja
1260070180	1256289	EYE-FIX SIN VENTANA Dispositivo de fijación ocular	100/caja
1260080180	1256288	EYE-FIX CON VENTANA Dispositivo de fijación ocular	15/caja

Contacto

ConvaTec SL
C/Constitución 1, 3ª Planta
08960 Sant Just Desvern
Barcelona-España
Tel.: +34 93 602 37 00
Fax: +34 93 602 37 41

Servicio de información de ConvaTec

InfoTec
(900 30 40 50)
infotec@convatec.com

Infotec 900 30 40 50
www.Convatec.es

R / TM son marcas de ConvaTec Inc. © 2009 ConvaTec Inc.

Productos sin látex.

Nuestro mundo es lo que hacemos de él™

