


NATURA^{MD}

AVEC BARRIÈRES CUTANÉES MALLÉABLES



1 Une barrière cutanée bien ajustée

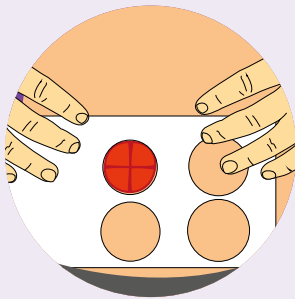


Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée malléable de la taille appropriée.




Façonner la barrière cutanée avec les doigts, puis rouler et façonner l'anneau à la taille de la stomie.

Ne pas étirer, tirer ou couper l'anneau.

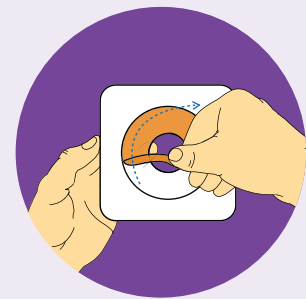


Retirer le papier protecteur transparent et centrer la stomie dans l'ouverture. .


2 Application de la barrière cutanée

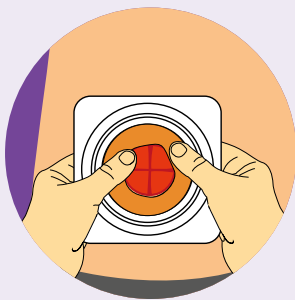

Appuyer sur la barrière cutanée pour la placer autour de la stomie et au besoin, ajuster l'adhésif autour de celle-ci afin qu'il l'épouse parfaitement. Lisser la barrière cutanée et la maintenir en place pendant 30 secondes.

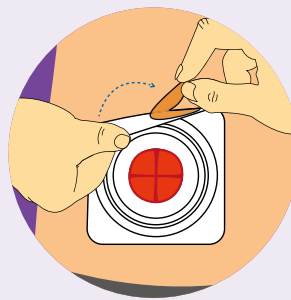


Retirer le papier protecteur blanc de la bordure adhésive.

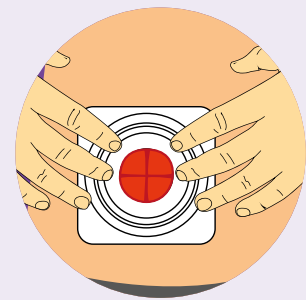


En éliminant les plis, appuyer délicatement sur la barrière cutanée pour qu'elle adhère à la peau.

3


Application et fermeture du sac

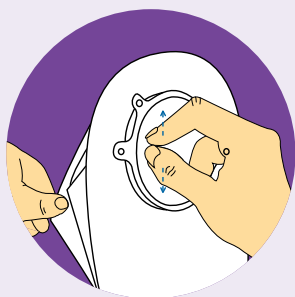


Séparer les deux parois du sac pour laisser entrer un peu d'air.

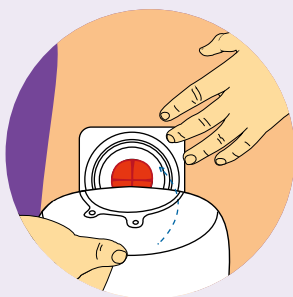

Placer le sac sur la barrière cutanée. Joindre les deux collerettes en appuyant délicatement, du bas vers le haut, jusqu'à ce que l'on entende le « clic » et sente sous les doigts que toute la circonférence de la collerette du sac est bien encastrée dans la collerette de la barrière cutanée. **Toujours vérifier si le couplage s'est effectué sur toute la circonférence; sinon, retirer le sac et recommencer.**

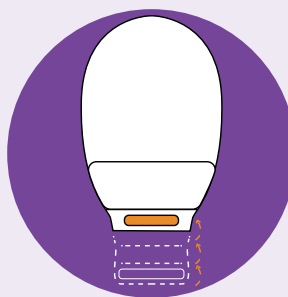


Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent. Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.

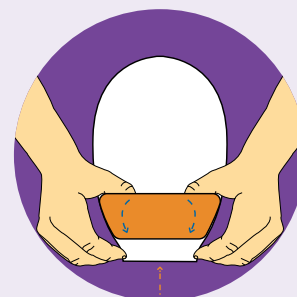


Retourner la pochette Lock-it-Pocket^{MC} sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4


Vidange et nettoyage du sac

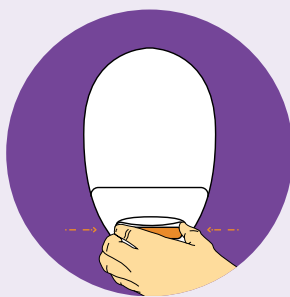

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.

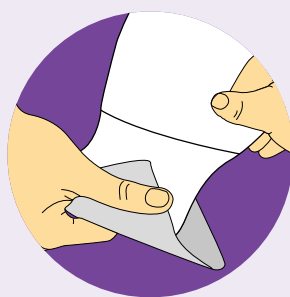


Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.

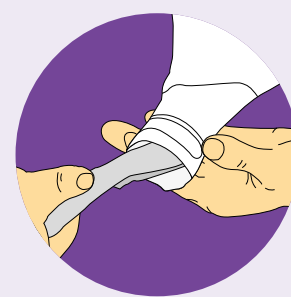


Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

Retrait du sac

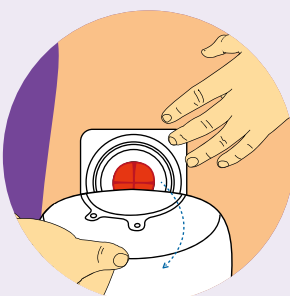

Pour décoller le sac de la barrière cutanée, tirer fermement sur la languette du sac, vers le bas.

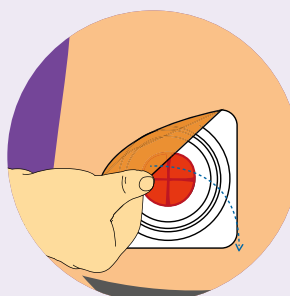

Pour retirer la barrière cutanée, la décoller délicatement en prenant appui sur la peau adjacente avec l'autre main.