




ESTEEM^{MD}

avec barrières cutanées
prédécoupées et à découper




1


Application de la barrière cutanée

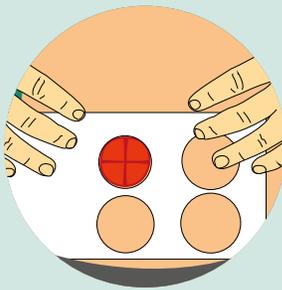

Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée de la taille appropriée.

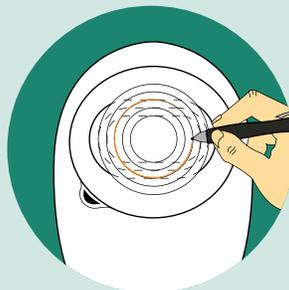


Barrières cutanées à découper :
Tracer le contour de la stomie au centre du papier protecteur transparent au dos de la barrière cutanée, puis découper une ouverture d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre de plus que le tracé.

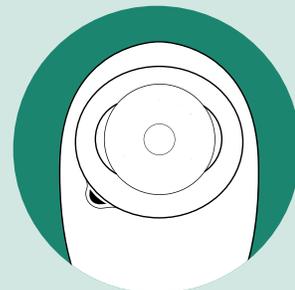


Barrières cutanées prédécoupées :
Choisir une barrière cutanée avec une ouverture prédécoupée légèrement plus grande que sa stomie.

2

Application et port du sac

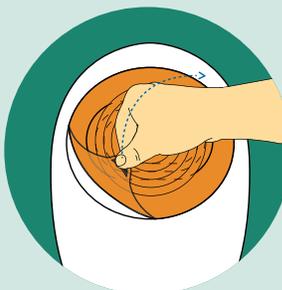

Retirer le papier protecteur transparent de la barrière cutanée en tirant sur la languette bleue.

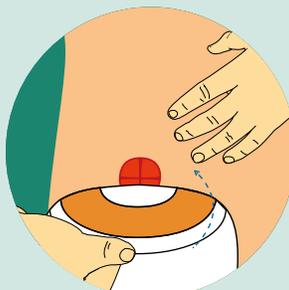


Placer délicatement le sac sur la stomie.




Appuyer sur la barrière cutanée pour qu'elle adhère à la peau. Lisser la bordure intérieure (la plus près de la stomie), puis la maintenir en place pendant 30 secondes pour s'assurer qu'elle épouse bien la stomie.

3


Fermeture du sac

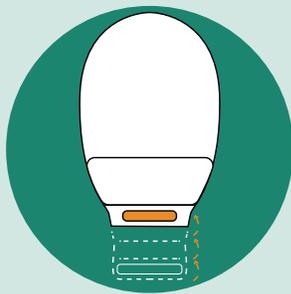

Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent.

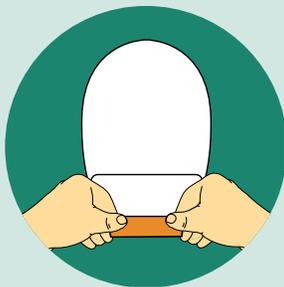


Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.

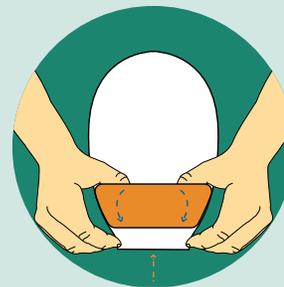

Retourner la pochette Lock-it-Pocket^{MC} sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4

Vidange et nettoyage du sac

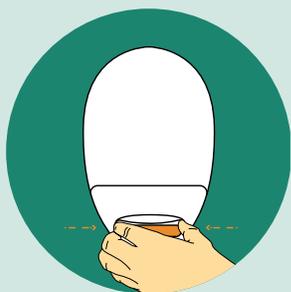

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.



Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.



Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

Retrait du sac



Décoller délicatement la barrière cutanée de la peau, du haut vers le bas tout en prenant appui sur la peau adjacente de l'autre main.