



Инструкция по применению

Катетер Фолея

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/84 от 04.04.2013. Срок действия – бессрочно.

Данная инструкция распространяется на следующие катетеры:

1. Катетеры Фолея 2-ходовые
2. Катетеры Фолея 3-ходовые

НАЗНАЧЕНИЕ

Катетеры для урологии одноразового применения используются для обеспечения оттока мочи и для ирригации лекарственных препаратов в просвет мочевого пузыря.

ПОКАЗАНИЯ


Заболевания мочевыделительной системы, уход за больным во время и после операции, также они используются с диагностической целью, нарушения функции мочевого пузыря.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления: силиконизированный латекс и 100% силикон. В зависимости от целей и задач применения выполняются из различных материалов, объединенных общими характеристиками: термопластичных, имплантационно нетоксичных, биосовместимых.

Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия. Коннектор цветомаркирован в зависимости от размера катетера.

Форма конца катетера – определяется направлением использования изделия. Количество и размер ирригационных отверстий определяется видом катетера.

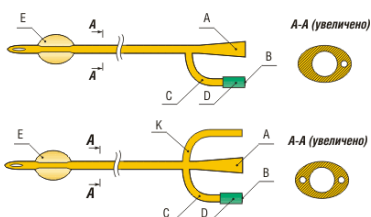

- A – дренажная воронка;
B – клапан для наполнения баллона;
C – невозвратный клапан;
D – цветовая маркировка;
E – баллон;

K – дополнительный просвет для инстилляций (3-х ходовой катетер).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Осмотрите упаковку изделия. Убедитесь в целостности упаковки. Убедитесь, что это действительно требуемое Вам изделие и необходимый размер.
2. При наличии повреждений на упаковке запрещается использование изделия. Уничтожьте его.
3. При необходимости – доведите до сведения пациента информацию о сути и задачах манипуляции катетеризирования
4. В стерильных условиях вскройте упаковку изделия.
5. С помощью шприца без канюли через специальный цветомаркированный порт раздуйте баллон рекомендованным объемом стерильной воды (информация на индивидуальном блистере)
6. Сдуйте баллон через тот же порт для раздувания манжеты с помощью шприца без иглы. Убедитесь в нормальном функционировании устройства раздувания-сдувания баллона и его целостности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. После предварительной обработки наружных половых органов произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым урологическим катетером
2. Подсоедините катетер-воронку урологического катетера к коннектору соединительной трубки мочевого приемного устройства
3. Раздуйте баллон рекомендованным объемом стерильной воды. Убедитесь в надежном стоянии катетера.
4. Введение лекарственных средств или промывание мочевого пузыря осуществляется через дополнительный порт 3-ходового катетера Фолея.
5. Убедитесь в беспрепятственном поступлении мочи в мочеиспускательное устройство (при необходимости)
6. Перекручивать и пережимать катетер снаружи запрещается.
7. При необходимости удалить катетер воспользуйтесь шприцем без иглы. Подсоедините канюлю шприца к цветомаркированному порту и потяните поршень на себя.

8. Извлекате катетер из мочевых путей пациента, аккуратно потянув катетер на себя.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукция для одноразового использования, отвечающая требованиям безопасности. Использованные изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами, регулирующими утилизацию биозагрязненной продукции.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации
Срок хранения – 5 лет.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 REF Номер в каталоге	 LOT Код партии	 Использовать до	 Дата изготовления	
 PCF Знак соответствия при декларировании соответствия	 STERILE R Радиационная стерилизация	 EC REP Уполномоченный представитель	 CE Знак CE- марки	 Изготовитель

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Unomedical Sdh. Bhd., Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia (Малайзия)

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94. За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8 800 200 80 99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00