

Vue d'ensemble des produits de prise en charge des stomies

Janvier 2019





ConvaTec : engagée pour une meilleure qualité de vie

ConvaTec compte parmi les entreprises à la pointe du développement et de la commercialisation de technologies médicales innovantes. Grâce à nos quatre secteurs d'activité principaux, prise en charge des stomies, traitement moderne des plaies, incontinence fécale, ainsi que soins intensifs et techniques de perfusion, nous soutenons le personnel médical spécialisé aussi bien dans les hôpitaux que dans les établissements de santé au niveau régional. Depuis sa création il y a plus de 35 ans, ConvaTec conçoit des produits innovants et propose des services liés à ces produits, ce qui permet à des millions de personnes dans le monde de vivre une vie plus agréable.

Nos valeurs sont le reflet de notre travail au quotidien : elles constituent la base du développement de notre entreprise et de sa croissance.

Notre objectif est de concevoir de nouvelles idées, de contribuer à créer un monde meilleur et d'apporter notre aide au personnel médical spécialisé, aux hôpitaux et aux services de soins à domicile dans leurs tâches quotidiennes.

Prise en charge des stomies

Grâce à des technologies novatrices et éprouvées cliniquement, ConvaTec aide des millions de patients stomisés à retrouver une meilleure qualité de vie. Nous sommes depuis plusieurs années à la pointe de l'innovation dans le domaine de la prise en charge des stomies. Nos supports cutanés, qui sont dotés de la technologie modelable de ConvaTec, ainsi que de technologies adhésives, contribuent à augmenter la qualité de vie des patients stomisés.

Nous concevons des produits et solutions qui aident les patients stomisés en étroite collaboration avec nos clients et avec les stomathérapeutes. Ainsi, nos conseillers professionnels formés vous proposent un soutien actif. Notre collaboration ouverte permet de faire progresser la recherche scientifique et nous développons continuellement notre gamme de produits pour aider les personnes stomisées à mener une vie digne, dans le confort et la sécurité.

Cher client, chère cliente,

cette vue d'ensemble comprend tous les produits de prise en charge des stomies proposés par ConvaTec en Suisse. Les références de commande sont également indiquées dans les tableaux.

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser au personnel commercial ou au service clientèle de ConvaTec. Vous trouverez les numéros de téléphone gratuits à l'arrière de la vue d'ensemble des produits.

Sincères salutations,
votre équipe

Poches de stomie 1 pièce

Poche fermée Esteem®  , plate.....	11 – 14
Caches pour stomie Stomadress® Plus	14
Poche fermée Esteem®  , convexe	15
Poche vidangeable Esteem®  , plate.....	16 – 19
Petite poche vidangeable Stomadress®, plate.....	19
Poche vidangeable Stomadress® Plus, plate	20
Poche vidangeable Esteem®  , convexe	21 – 22
Poche vidangeable Esteem®, convexe	23
Poche d'urostomie Esteem®, plate	24 – 25
Petite poche d'urostomie Stomadress®, plate.....	26
Poche d'urostomie Stomadress®, plate.....	26
Poche d'urostomie Esteem®  , convexe	27

Poches de stomie 2 pièces

Supports cutanés Natura® / Combihesive Natura®, plats.....	30 – 33
Supports cutanés Natura® / Combihesive Natura®, convexe.....	33 – 35
Poche fermée Natura® (+).....	36 – 37
Caches pour stomie Combihesive Natura®.....	38
Poche vidangeable Natura® (+).....	39 – 40
Poche vidangeable Combihesive Natura®.....	40 – 43
Poche de drainage et post-opératoire Combihesive Natura®.....	44
Poche d'urostomie Natura® (+).....	45
Poche d'urostomie Combihesive Natura®.....	46 – 48
Supports cutanés Esteem synergy®, plats.....	50 – 52
Supports cutanés Esteem synergy®, convexe.....	53
Poche fermée Esteem synergy® (+).....	54 – 55
Poche vidangeable Esteem synergy® (+).....	56 – 57
Poche d'urostomie Esteem synergy®.....	58 – 59
Supports cutanés ConSecura®, plats.....	60
Poche fermée ConSecura®.....	61
Poche vidangeable ConSecura®.....	62
Poche d'urostomie ConSecura®.....	63

Poches post-opératoires

Poche 1 pièce post-opératoire colostomie/iléostomie.....	65
Poche 2 pièces post-opératoire colostomie/iléostomie.....	66
Poche 2 pièces post-opératoire urostomie.....	67
Accessoires pour poches post-opératoires.....	67

Accessoires et produits complémentaires

Irrigation.....	69 – 70
Protection cutanée.....	71 – 75
Divers.....	76 – 80
Indications relatives à la durée de conservation.....	81

La protection cutanée éprouvée ConvaTec

La protection cutanée revêt une importance cruciale pour tous les patients stomisés. La poche de stomie est fixée en permanence sur la peau sensible du ventre, c'est pourquoi il est primordial que la texture du matériau adhésif soit d'une excellente qualité.

Protection cutanée Stomahesive®


Avec son matériau adhésif Stomahesive®, ConvaTec permet aux patients stomisés et au personnel soignant de garder l'esprit tranquille. Et ce à juste titre. Stomahesive® est un matériau à la fois non irritant, doté d'un excellent pouvoir adhésif et très étanche. Il favorise la réparation des peaux abîmées et pose ainsi les bases d'une prise en charge de stomie fiable. Stomahesive® est composé de substances naturelles telles que la pectine, la gélatine et la cellulose.



Gélatine adhésive Stomahesive®: protection cutanée douce, qui adhère de façon efficace et étanche, et qui peut être utilisée sur les peaux abîmées.



Protection cutanée DuraHesive®: gonfle au contact de l'humidité et assure une étanchéité parfaite autour de la stomie.

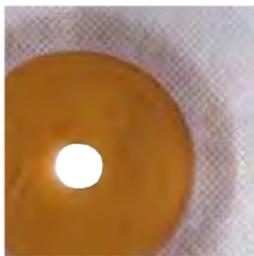

Le bord adhésif hydrocolloïde pour peaux sensibles est hypoallergénique et assure une flexibilité maximale.

Protection cutanée Durahesive®

La protection cutanée Durahesive® est extrêmement résistante contre les excréments agressives. En outre, elle se distingue par son excellente capacité de gonflement, ce qui lui permet de s'adapter parfaitement à la stomie. Le risque de fuites et donc d'irritations cutanées s'en voit nettement réduit.

Tous les produits équipés de la protection cutanée Durahesive® sont également adaptés aux stomies qui sont positionnées à des endroits défavorables.

Protection cutanée modelable



Avec nos **supports cutanés modelables plats**, nous proposons des supports cutanés extrêmement novateurs dotés d'un **effet mémoire** qui se distinguent par la protection cutanée éprouvée de ConvaTec. Le matériau à la fois non irritant, adhésif et très étanche assure une adaptation optimale à la stomie, sans qu'une découpe soit nécessaire.



Extrêmement flexible, il permet à la protection cutanée de s'étendre ou de se rétracter en fonction des besoins afin d'assurer une étanchéité maximale dans toutes les situations quotidiennes.

Les **supports cutanés modelables convexes** sont dotés de la protection cutanée Durahesive® éprouvée aussi bien sur le côté apposé sur le corps que sur le côté opposé.

Ils se distinguent par une capacité de gonflement et une stabilité de forme excellentes et présentent un **effet mémoire** pour une adaptation optimale aux stomies, qu'elles soient plates ou rétractées.

Les avantages des poches ConvaTec

Filtres hautes performances

Le filtre à charbon actif est positionné en haut au niveau du bord supérieur de la poche. Un film transparent placé devant le filtre à l'intérieur de la poche empêche le filtre d'être bouché par les excréments.

Le film de protection du filtre est fixé par de petits points au textile non tissé de la poche. Ceci permet d'assurer une sécurité supplémentaire et empêche le film de protection du filtre de s'enrouler.

Forme et ergonomie

Les poches  sont dotées de contours doux et symétriques : elles peuvent être portées aussi bien du côté gauche que du côté droit.

Impression de la référence de commande

Le numéro « RÉF. » correspondant est imprimé sur chaque poche afin de vous faciliter les travaux de recherche et de logistique lors de commandes ultérieures.

Replier et dissimuler

La « pochette d'insertion » des poches vidangeables dotées de la fermeture InvisiClose® permettent de maintenir une fermeture d'évacuation sûre et confortable.

Textile non tissé confortable

Le textile non tissé de la poche est très doux et sèche vite.



Comment fonctionne la fermeture sans clamp InvisiClose® de la poche vidangeable ⊕ ?

- 1 Commencez par replier la fermeture InvisiClose® en réunissant les bandes blanches d'extrémité jusqu'à ce que les bandes de la fermeture soient superposées. Vous pouvez également la replier tout simplement 3 fois et rabattre la languette de sécurité vers le bas.
- 2 Pressez **fermement** les bandes de fermeture sur l'ensemble de la largeur, jusqu'à ce que les bords soient fermés.




Facultatif: pochette d'insertion pour davantage de sécurité et de discrétion:

- 3 Retournez la pochette d'insertion par-dessus l'extrémité de la poche fermée afin de dissimuler la partie inférieure de la poche. Ainsi, la poche vidangeable a l'apparence d'une poche fermée.

Poche de stomie 1 pièce



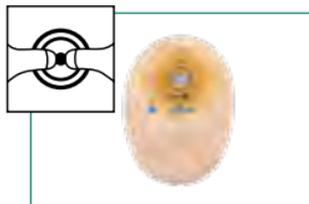

Poche fermée Esteem®

opaque (beige) / standard

- Protection cutanée Stomahesive® et Durahesive® modelable, intégrale, avec effet mémoire
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 450 ml

30 poches

Taille de stomie, modelable	Número REF	Pharmacode (CH)
20 – 30 mm	413509	5974646
30 – 40 mm	413510	5974652
40 – 50 mm	413511	6284895



Poche fermée Esteem®

opaque (beige) / petite

- Protection cutanée intégrale Stomahesive®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 250 ml

30 poches

Taille de stomie	Número REF	Pharmacode (CH)
20 – 70 mm à découper	421816	7400180
25 mm	421817	7400197
30 mm	421818	7400205
35 mm	421819	7400211
40 mm	421820	7400228

NOUVEAU



Poche fermée Esteem® (+)

opaque (beige) / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 500 ml

30 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 70 mm à découper	421686	7400234
25 mm	421687	7400240
30 mm	421688	7400257
35 mm	421689	7400263
40 mm	421822	7400286
50 mm	421823	7400292



Poche fermée Esteem® (+)

transparente / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 450 ml

30 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 70 mm à découper	416700	4717290
25 mm	416703	4717350
30 mm	416706	4717456
35 mm	416709	4717516
40 mm	416712	4717551

NOUVEAU

**Poche fermée Esteem®** 

opaque (beige) / grande

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 660 ml

30 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 50 mm à découper	421825	7400300
25 mm	421826	7400317
30 mm	421827	7400323
35 mm	421828	7400346
40 mm	421829	7400352
50 mm	421830	7400369

NOUVEAU

**Poche fermée Esteem®** (+)

transparente / grande

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Volume : 660 ml

30 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 50 mm à découper	421831	7400375
25 mm	421832	7400381
30 mm	421833	7400398
35 mm	421834	7400406
40 mm	421835	7400412
50 mm	421836	7400429

**Cache pour stomie Stomadress® Plus**

opaque (beige)

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Filtre au charbon actif

30 caches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 50 mm à découper	175611	1433215



Poche fermée Esteem™ (+) Flex Convexe opaque (beige) / standard

- Protection cutanée combinée intégrale convexe
- brides de ceinture intégrées
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 450 ml

30 poches


Taille de stomie		Pharmacode (CH)	Pharmacode (CH)
20 – 25 mm	V3	421614	6621364
20 – 35 mm	V2	421613	6621358
20 – 43 mm	V1	421612	6621341
20 – 57 mm	V0	422158	7389395

NOUVEAU

Quatre diamètres de cône différents :

Les poches de stomie Esteem™ (+) Flex Konvex sont disponibles en quatre diamètres de cône pour s'adapter aux besoins individuels en matière de taille de stomie.



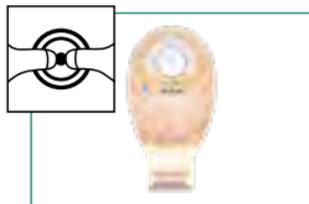


Poche vidangeable Esteem®

opaque (beige) / standard

- Protection cutanée Stomahesive® et Durahesive® modelable, intégrale avec effet mémoire
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie, modelable	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 30 mm	413521	5974617
30 – 40 mm	413522	5974623
40 – 50 mm	413523	6284926

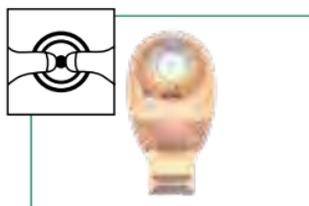

Poche vidangeable Esteem®

transparente / standard

- Protection cutanée Stomahesive® et Durahesive® modelable, intégrale avec effet mémoire
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie, modelable	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 30 mm	413515	5974592
30 – 40 mm	413516	5974600
40 – 50 mm	413517	6284903



Poche vidangeable Esteem® (+)

opaque (beige) / standard

- Protection cutanée intégrale Stomahesive®
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 70 mm à découper	416719	4717829
25 mm	416725	5526103
30 mm	416729	552 6126
35 mm	416733	5526132
40 mm	416737	5526149



Poche vidangeable Esteem® (+)

transparente / standard

- Protection cutanée intégrale Stomahesive®
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 70 mm à découper	416718	4717812



Poche vidangeable Esteem®

opaque (beige) / standard

- **Protection cutanée Durahesive® Plus**
Pour les durées de port prolongées
- **Bord adhésif flexible**
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 64 mm à découper	416975	5550136



Poche vidangeable Esteem®

transparente / standard

- **Protection cutanée Durahesive® Plus**
Pour les durées de port prolongées
- Bord adhésif flexible
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 64 mm à découper	416976	5550142



Poche post-opératoire Esteem® (+) pour colostomie et iléostomie

transparente

- Protection cutanée intégrale
- Fermeture InvisiClose®
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 800 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
8 – 100 mm	416908	4718415



Petite poche vidangeable Stomadress®

transparente / petite

- Protection cutanée intégrale Stomahesive®
- Surface de poche unilatérale respirante

Adaptée aux enfants

15 poches + 15 clips + 1 agrafe

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
9 – 50 mm à découper	020922	1376084

**Poche vidangeable Stomadress® Plus**

opaque (beige) / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 10 clips + 1 agrafe

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 64 mm à découper	175523	1434924

**Poche vidangeable Stomadress® Plus**

transparente / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 10 clips + 1 agrafe

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 64 mm à découper	175530	1434930



Poche vidangeable Esteem™ Flex Convex

opaque (beige) / standard

- Protection cutanée combinée intégrale convexe
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture Safe Seal
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 580 ml

10 poches

Taille de stomie		Numéro REF	Pharmacode (CH)
20 – 25 mm	V3	421622	6621424
20 – 35 mm	V2	421619	6621393
20 – 43 mm	V1	421615	6621370
 20 – 57 mm	V0	422159	7389403
25 mm	V3	421620	6621401
30 mm	V2	421621	6621418
35 mm	V1	421618	6621387

Voir page 15 pour de plus amples informations sur les diamètres de cône V0 à V3.



Poche vidangeable Esteem® (+) convexe
opaque (beige) / standard

- Protection cutanée Durahesive® convexe
- Bord adhésif hydrocolloïde
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 mm	416739	4717864
22 mm	416741	4717887
25 mm	416743	4717953
28 mm	416745	4717982
32 mm	416747	4718059
35 mm	416749	4718071



Poche vidangeable Esteem® (+) convexe
transparente / standard

- Protection cutanée Durahesive® convexe
- Bord adhésif hydrocolloïde
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 mm	416738	4717835
22 mm	416740	4717870
25 mm	416742	4717901
28 mm	416744	4717976
32 mm	416746	4717999
35 mm	416748	4718065

**Poche vidangeable Esteem® convexe**

opaque (beige) / moyenne

- Protection cutanée Durahesive® convexe
- Bord adhésif hydrocolloïde
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif réglable
- Textile doux, double face
- Pochette d'insertion pratique

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
22 mm	411601	3064437
25 mm	411602	3064443
28 mm	411603	3064466
32 mm	411604	3064472
35 mm	411605	3064489

**Poche vidangeable Esteem® convexe**

transparente / moyenne

- Protection cutanée Durahesive® convexe
- Bord adhésif hydrocolloïde
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif réglable
- Textile doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique

10 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
22 mm	411610	3064495
25 mm	411611	3064578
28 mm	411612	3064584
32 mm	411613	3064590
35 mm	411614	3064609

**Poche d'urostomie Esteem®**

opaque (beige) / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
13 – 45 mm à découper	401235	2702433

**Poche d'urostomie Esteem®**

transparente / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
13 – 45 mm à découper	401234	2702427

**Poche d'urostomie Esteem®**

opaque (beige) / grande

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
13 – 45 mm à découper	401233	2702410

**Poche d'urostomie Esteem®**

transparente / grande

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
13 – 45 mm à découper	401232	2702404



Petite poche d'urostomie Stomadress®

transparente / petite

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Volume : 130 ml

Adapté au traitement des enfants,
demandée pour le traitement des fistules.

15 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
9 – 25 mm à découper	020917	1376090



Poche d'urostomie Stomadress® Plus

transparente / standard

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- brides de ceinture intégrées
- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
19 – 45 mm à découper	064927	1470506
25 mm	064928	
32 mm	064929	



Poche d'urostomie Esteem™ Flex Convexe

opaque (beige) / standard

- Protection cutanée combinée intégrale convexe
- brides de ceinture intégrées
- Clapet de vidange
- Clapet anti-retour
- Textile doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 440 ml

10 poches

Taille de stomie		Pharmacode (CH)	Pharma-code (CH)
10 – 25 mm	V3	421628	6621476
10 – 35 mm	V2	421626	6621453
10 – 43 mm	V1	421623	6621430
15 mm	V3	421629	6621482
20 mm	V1	421625	6621447

Voir page 15 pour de plus amples informations sur les diamètres de cône V1 à V3.

* L'ajout de ce produit au catalogue des dispositifs auxiliaires a été demandé.

Poche de stomie 2 pièces



Natura® avec anneau accordéon



Natura® avec système accordéon

Grâce à ce système, les patients stomisés bénéficient d'une poche de stomie 2 pièces éprouvée et sophistiquée, qui se distingue par un solide et fiable mécanisme à soufflet.

Le support cutané Natura avec anneau accordéon est particulièrement adapté aux patients dont la paroi abdominale est sensible. L'anneau accordéon offre suffisamment de place pour l'attraper par le dessous et ainsi fixer la poche de stomie en toute simplicité et sécurité.

Grâce à son profil fin, la plaque de support assure une flexibilité maximale et s'adapte aux mouvements du corps.

Les supports cutanés Natura® peuvent être utilisés en association avec toutes les poches Natura.

Nos produits en 2 pièces sont indiqués par différents codes de couleur. Le code de couleur se trouve sur l'emballage et permet ainsi d'associer plus facilement les supports cutanés et les poches de stomie de même taille.


Adaptateur Combihesive Natura® pour prise en charge post-opératoire

L'adaptateur complémentaire Combihesive Natura® de réduction de la pression (voir page 79) permet de changer de poche sans douleur lors de la phase post-opératoire.

Tout d'abord, l'adaptateur est connecté au support cutané. Ensuite, le support cutané avec l'adaptateur est positionné sur le ventre. Il ne reste alors plus qu'à clipser la poche sur l'adaptateur sans aucune douleur.

Une fois que la sensibilité de la paroi abdominale liée à l'opération s'est atténuée, il est possible de se passer de l'adaptateur.



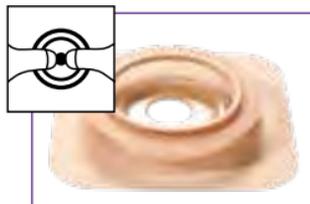


Support cutané Natura® avec anneau accordéon

- Protection cutanée Durahesive® modelable avec effet mémoire
- Bord adhésif hydrocolloïde
- Support cutané avec anneau accordéon

5 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
57 (13 – 22 mm)	421036	5974557
57 (22 – 33 mm)	421037	5974563
70 (33 – 45 mm)	421038	5974586

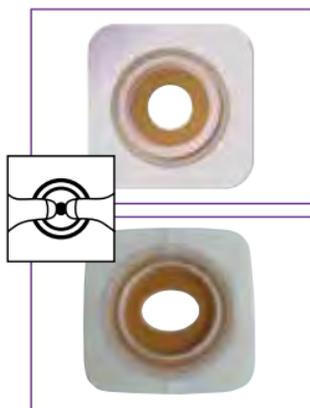

Support cutané Combihesive Natura®

- Protections cutanées Stomahesive® et Durahesive® modelables avec effet mémoire
- Bord adhésif hydrocolloïde
- Support cutané avec anneau

L'anneau de 70 mm est dotée d'une ouverture ovale, de sorte à disposer de suffisamment de matériau de protection cutanée pour un modelage adapté aux grandes stomies.

10 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 – 22) mm	411801	3811897
45 (22 – 33) mm	411803	3811905
57 (33 – 45) mm	411805	3811911
70 (45 – 56) mm	411807	3811928



Supports cutanés Natura® avec anneau accordéon

- Protection cutanée Stomahesive® ou Durahesive®
- Bord adhésif flexible
- Support cutané avec anneau accordéon

5 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 – 21) mm	421455	6284820
57 (13 – 33) mm	421459	6284837
70 (13 – 45) mm	421463	6284843
45 (13 – 21) mm	421453	6284783
57 (13 – 33) mm	421457	6284808
70 (13 – 45) mm	421461	6284814



Support cutané Combihesive Natura®

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané Duoflex
- Support cutané avec anneau

10 supports cutanés, *5 supports (100 mm)

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 (13 – 22) mm	402218	2137016
38 (13 – 28) mm	402219	2137022
45 (13 – 35) mm	402220	2137039
57 (13 – 47) mm	402221	2137045
70 (13 – 60) mm	402222	2137068
100 (13 – 90) mm*	401906	2702456



Support cutané Combihesive Natura®

- **Protection cutanée Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané Hydroflex
- **Bord adhésif hydrocolloïde**
- Support cutané avec anneau

10 supports cutanés


Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 (13 – 22) mm	410293	2702120
38 (13 – 28) mm	410294	2702137
45 (13 – 35) mm	410295	2702143
57 (13 – 47) mm	410296	2702166
70 (13 – 60) mm	410297	2702172

**Support cutané Combihesive Natura®**

- **Protection cutanée Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané flexible
- **Bord adhésif flexible**
- Support cutané avec anneau, oval

5 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 (13 – 22) mm	125900	1886543
38 (13 – 28) mm	125901	1886566
45 (13 – 35) mm	125902	1886572
57 (13 – 47) mm	125903	1886589
70 (13 – 60) mm	125904	1886595

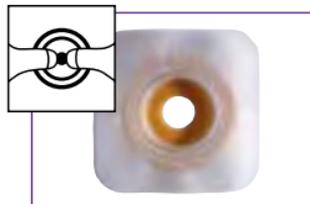**Support cutané Combihesive Natura® convexe**

- Protection cutanée Durahesive® modelable, convexe
- Bord adhésif flexible
- Support cutané avec anneau

10 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 – 22) mm	404592	2713773
45 (22 – 33) mm	404593	2713796
57 (33 – 45) mm	404594	2713804



Supports cutanés Combihesive Natura® avec bague d'arrêt en accordéon

- Protection cutanée Durahesive® convexe
- Support cutané avec anneau accordéon

5 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Bord adhésif hydrocolloïde		
45 (13-22) mm	421633	7106256
57 (13-35) mm	421635	7106279
70 (13-45) mm	421637	7106291
Bord adhésif flexible		
45 (13-22) mm	421632	7106233
57 (13-35) mm	421634	7106262
70 (13-45) mm	421636	7106285



Supports cutanés Combihesive Natura® convexes

- **Protection cutanée Durahesive® convexe**
- En Suisse : support cutané convexe
- **Bord adhésif flexible**
- Support cutané avec anneau, rond

5 supports cutanés

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 mm)	402200	2137335
45 (16 mm)	402201	2137341
45 (19 mm)	402202	2137358
45 (22 mm)	402203	2137364
45 (25 mm)	402204	2137370
45 (28 mm)	402205	2137387
45 (32 mm)	402206	2137393
45 (35 mm)	402207	2137401
57 (38 mm)	402208	2137418
57 (41 mm)	402209	2137424
57 (45 mm)	402210	2137430
57 (50 mm)	402211	2137447

NOUVEAU



Poche fermée Natura® (+)

opaque (beige) / petite

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 340 ml

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	421795	7389337
45 mm	421796	7389343
57 mm	421797	7389366

NOUVEAU



Poche fermée Natura® (+)

opaque (beige) / standard

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 560 ml

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	421678	7389219
45 mm	421680	7389225
57 mm	421682	7389231
70 mm	421798	7389248

NOUVEAU
Poche fermée Natura® (+)

transparente / standard

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 560 ml

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	421803	7389308
57 mm	421804	7389314
70 mm	421805	7389320

NOUVEAU
Poche fermée Natura® (+)

opaque (beige) / grande

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Fenêtre de visualisation
- Volume : 700 ml

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	421799	7389254
45 mm	421800	7389260
57 mm	421801	7389277
70 mm	421802	7389283



Caches pour stomie Combihesive Natura®
opaque (beige)

- Filtre au charbon actif
- Brides de ceinture
- Surface unilatérale respirante

25 caches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	404108	2141414
57 mm	404109	2141420



Poche vidangeable Natura®

opaque (beige) / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Brides de ceinture
- Textile non tissé doux double face
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	416415	4720978
45 mm	416417	4721015
57 mm	416420	4721050
70 mm	416423	4721104



Poche vidangeable Natura®

transparente / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Brides de ceinture
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	416416	4720990
57 mm	416419	4721044
70 mm	416422	4721096



Poche vidangeable Natura®

transparente / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Brides de ceinture
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
100 mm	416472	4725326



Poche vidangeable Combihesive Natura®

opaque (beige) / petite

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre à air
- Brides de ceinture
- Surface double face respirante

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	411354	2937892
45 mm	411355	2937900
57 mm	411356	2937917



Poche vidangeable Combihesive Natura®

opaque (beige) / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre à air
- Brides de ceinture
- Surface double face respirante

10 caches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	411348	2937828
38 mm	411349	2937834
45 mm	411350	2937840
57 mm	411351	2937857
70 mm	411352	2937863



Poche vidangeable Combihesive Natura®

transparente / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre à air
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	411360	2937969
57 mm	411361	2937975
70 mm	411362	2937981



Poche vidangeable Combihesive Natura®
transparente / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	413311	2938006
45 mm	413312	2938029
57 mm	413313	2938035
70 mm	413314	2938041



Poche vidangeable Combihesive Natura®
opaque (beige) / petite

- Brides de ceinture
- Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	125915	1886750
38 mm	125916	1886767
45 mm	125917	1886773



Poche vidangeable Combihesive Natura®

opaque (beige) / standard

- Brides de ceinture
- Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	125925	1886804
38 mm	125926	1886810
45 mm	125927	1886827
57 mm	125928	1886833
70 mm	125929	1886856



Poche vidangeable Combihesive Natura®

transparente / standard

- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38 mm	125921	1887488
45 mm	125922	1887494
57 mm	125923	1887502
70 mm	125924	1887519
100 mm	404136	2204215



**Poche de drainage et post-opérateur
Combihesive Natura®**

opaque (beige) / extra grande

- Robinet d'évacuation
- Filtre au charbon actif remplaçable
- Brides de ceinture
- Clapet anti-retour
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 650 ml

5 poches + 1 pince + 5 filtres + 1 adaptateur

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	404137	2151306
57 mm	404138	2151312
70 mm	404139	2151329



**Poche de drainage et post-opérateur
Combihesive Natura®**

transparente / extra grande

- Robinet d'évacuation
- Filtre au charbon actif remplaçable
- Brides de ceinture
- Clapet anti-retour
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 650 ml

5 poches + 1 pince + 5 filtres + 1 adaptateur

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	420695	5315122
57 mm	420696	5315139
70 mm	420697	5315145



Poche d'urostomie Natura® 

transparente / petite

- Fermeture souple
- Système de chambres multiples
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 210 ml

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	421074	5974712
38 mm	421075	5974729
45 mm	421076	5974735



Poche d'urostomie Natura® 

transparente / standard

- Fermeture souple
- Système de chambres multiples
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 390 ml

10 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	413435	5974669
38 mm	413436	5974675
45 mm	413437	5974681
57 mm	413438	5974698
70 mm	413439	5974706



Poche d'urostomie Combihesive Natura®

opaque (beige) / petite

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	401547	1887011
38 mm	401548	1887028
45 mm	401549	1887034
57 mm	401550	



Poche d'urostomie Combihesive Natura®

opaque (beige) / standard

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	401551	1887057
38 mm	401552	1887063
45 mm	401553	1887086
57 mm	401554	1887092



Poche d'urostomie Combihesive Natura®
transparente / standard

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	401542	1886968
38 mm	401543	1886974
45 mm	401544	1886980
57 mm	401545	1886997
70 mm	401546	1887005



Poche d'urostomie Combihesive Natura®
transparente / petite

- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	401538	1886922
38 mm	401539	1886939
45 mm	401540	1886945
57 mm	401541	1886951



Poche d'urostomie Combihesive Natura®
transparente / standard

- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
32 mm	401533	1886862
38 mm	401534	1886879
45 mm	401535	1886885
57 mm	401536	1886891
70 mm	401537	1886916

Esteem synergy



Esteem synergy® avec technologie adhésive


Ce système associe la discrétion d'une poche de stomie 1 pièce à la polyvalence d'un système 2 pièces.

- La poche de stomie Esteem synergy® est plate et discrète.
- Elle est dépourvue d'anneau et s'adapte ainsi parfaitement aux mouvements du corps.
- La connexion du support cutané et de la poche s'effectue sans exercer de pression sur la paroi abdominale. Ainsi, Esteem synergy® est également parfaitement adaptée à la prise en charge post-opératoire.

La poche de stomie 2 pièces Esteem synergy® est dotée d'un raccordement adhésif, ce qui signifie que la poche est collée sur le support cutané. À la place de l'anneau, le support cutané est doté d'une « zone de réception » constituée d'un film en plastique. La poche (+) est quant à elle équipée d'une « bague adhésive ». Les tailles des deux composants doivent correspondre lors de la sélection des produits (p. ex. une zone de réception de 48 mm est compatible uniquement avec les poches dotées d'une bague adhésive de 48 mm). La zone de réception située sur le support cutané est transparente, ce qui permet de contrôler l'étanchéité de la stomie en la soulevant ou en la rabattant. La poche Esteem synergy® (+) peut être retirée plusieurs fois de la zone de réception sur le support cutané et recollée sans aucun problème, par exemple afin de corriger l'orientation de la poche, de supprimer des plis au niveau de la bague adhésive ou encore de faire sortir l'air de la poche.

Important:

- La zone de réception doit être propre et sèche pour y apposer la poche.
- Veuillez ne pas toucher la zone adhésive de la bague de la poche (+). Ceci risquerait d'endommager le pouvoir adhésif de la zone de réception.

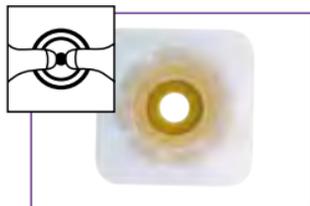

Supports cutanés Esteem synergy®

- Protection cutanée Stomahesive® et Durahesive® modelable avec effet mémoire
- Bord adhésif hydrocolloïde
- Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
48 (13 – 22) mm	411657	4715902 ¹
48 (22 – 33) mm	411658	4715960 ¹
61 (33 – 45) mm	411659	4715983 ²




Supports cutanés Esteem synergy®

- Protection cutanée intégrale Stomahesive®
- En Suisse : support cutané Duoflex
- Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 (13 – 35) mm	405467	2534042
48 (13 – 48) mm	405468	2534059
61 (13 – 61) mm	403948	2534065
89 (13 – 89) mm	405483	2534071

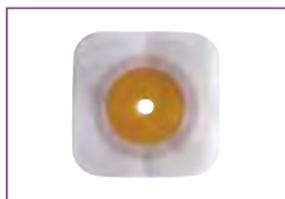


Supports cutanés Esteem *synergy*[®]

- **Protection cutanée Stomahesive[®]**
- En Suisse : support cutané flexible Hydroflex
- Bord adhésif hydrocolloïde
- Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 (13 – 35) mm	409288	2828039
48 (13 – 48) mm	409289	2828045
61 (13 – 61) mm	409290	2828051

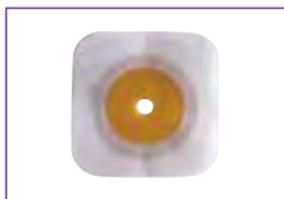


Supports cutanés Esteem synergy®

- **Protection cutanée Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané flexible ou prédécoupé
- **Bord adhésif flexible**
- Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 (13 – 35) mm	405456	2534007
48 (13 – 48) mm	405457	2534013
61 (13 – 61) mm	405458	2534036
35 (19 mm)	405474	2535076
35 (22 mm)	405475	2535082
35 (25 mm)	405476	2535099
35 (28 mm)	405477	2535107
35 (32 mm)	405478	2535113
35 (35 mm)	405479	2535136

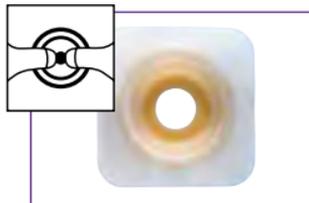

Supports cutanés Esteem *synergy*[®] convexes

- **Protection cutanée Durahesive[®] modelable, convexe**
- En Suisse : support cutané convexe
- **Bord adhésif flexible**
- Support cutané avec zone de réception

5 supports cutanés

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 (13 – 22) mm	409271	2535142
48 (22 – 33) mm	409272	2535159
61 (33 – 45) mm	409273	2535165



Poche fermée Esteem synergy® (+)

opaque (beige) / petite

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Volume : 200 ml

30 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416777	4719679
48 mm	416781	4719774



Poche fermée Esteem synergy® (+)

transparente / petite

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 200 ml

30 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416776	4719633



Poche fermée Esteem synergy® (+)

opaque (beige) / standard

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Volume : 450 ml

30 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416775	4719610
48 mm	416779	4719722
61 mm	416783	4719805



Poche fermée Esteem synergy® (+)

transparente / standard

- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Volume : 450 ml

30 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416774	4719604
48 mm	416778	4719691
61 mm	416782	4719797



Poche vidangeable Esteem synergy® (+)

opaque (beige) / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux double face
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416796	4719857
48 mm	416799	4719892
61 mm	416902	4719946



Poche vidangeable Esteem synergy® (+)

transparente / standard

- Fermeture InvisiClose®
- Filtre au charbon actif
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 500 ml

10 poches

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	416795	4719840
48 mm	416798	4719863
61 mm	416901	4719917



Poche vidangeable Esteem synergy®
transparente / extra grande

- Textile doux, un côté

10 poches + 10 pinces

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
89 mm	405406	2535202



Poche d'urostomie Esteem synergy®

transparente / petite

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	405446	2535610
48 mm	405447	2535627



Poche d'urostomie Esteem synergy®

opaque (beige) / grande

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	405448	2535544
48 mm	405449	2535550
61 mm	405450	2535567



Poche d'urostomie Esteem synergy®


transparente / grande

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Textile doux, un côté
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague adhésive	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	405451	2535573
48 mm	405452	2535596
61 mm	405453	2535604



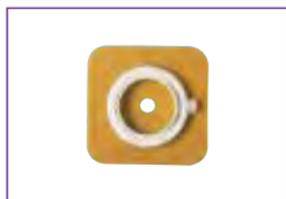

Supports cutanés ConSecura®

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané Duoflex
- Support cutané avec anneau de fixation automatique

5 supports cutanés

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	404524	2269597
45 mm	404525	2269605
57 mm	404526	2269611
70 mm	404527	2269628




Supports cutanés ConSecura®

- **Protection cutanée Stomahesive®**
- En Suisse : support cutané flexible
- **Bord adhésif flexible**
- Support cutané avec anneau de fixation automatique, oval

5 supports cutanés

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	404551	2269663
45 mm	404552	22696 92
57 mm	404553	2269717
70 mm	401432	2269723

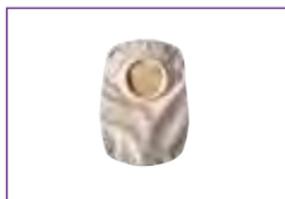

Poche fermée ConSecura®

opaque (beige) / standard

- Filtre au charbon actif
- Brides de ceinture
- Surface en textile doux, doubleface

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	401444	2270034
45 mm	401445	2270040
57 mm	401446	2270057
70 mm	401447	2270063



Poche fermée ConSecura®

transparente / standard

- Filtre au charbon actif
- Brides de ceinture
- Surface en textile doux, un côté

30 poches

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	401311	2270092
57 mm	401312	2270100
70 mm	401313	2270117



Poche vidangeable ConSecura®

opaque (beige) / standard

- Brides de ceinture
- Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	401434	2270123
45 mm	401435	2270146
57 mm	401436	2270152
70 mm	401437	2270270



Poche vidangeable ConSecura®

transparente / standard

- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	401440	2270293
57 mm	401441	2270318
70 mm	401442	2270330



Poche d'urostomie ConSecura®

opaque (beige) / standard

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	401462	2270502
45 mm	401463	2270577
57 mm	401464	2270583
70 mm	401465	2270608



Poche d'urostomie ConSecura®

transparente / standard

- Robinet
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	401452	2270459
45 mm	401453	2270465
57 mm	401460	2270488



Poche d'urostomie ConSecura®

transparente / standard

- Fermeture à clipser
- Clapet anti-retour
- Brides de ceinture
- Surface de poche unilatérale respirante
- Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
35 mm	401318	
45 mm	401319	2270407
57 mm	401320	2270413

Poches post-opératoires



stérile



Poche post-opératoire Esteem®⁺
pour colostomie et iléostomie, stérile
transparente

Constitué de :

- **Protection cutanée Stomahesive®** intégrale
- Fermeture InvisiClose®
- Textile non tissé doux, un côté
- Pochette d'insertion pratique
- Volume : 800 ml

5 poches

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
8 – 100 mm	416916	4883568

stérile



Kit post-opératoire Esteem synergy® pour colostomie et iléostomie, stérile

transparente

Constitué de :

- 1 support cutané Esteem synergy avec **protection cutanée Stomahesive®** intégrale
- 1 poche vidangeable Esteem synergy avec surface en textile doux, un côté
- 1 pont d'ostomie Loop
- 1 pince de poche

5 kits

Taille de bague adhésive (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
89 (13 – 89) mm	409345	2713483

stérile



Kit post-opératoire Natura® ⊕ pour colostomie et iléostomie, stérile

transparent

Constitué de :

- 1 support cutané Combihesive Natura avec **protections cutanées Stomahesive® et Durahesive®** intégrales
- 1 poche vidangeable Natura® ⊕ avec textile non tissé doux, un côté et fermeture InvisiClose®
- 1 adaptateur Natura pour réduction de la pression
- 1 baguette transverse pour stomie (70 et 100 mm)

5 kits

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 – 35) mm	416920	4883574
57 (13 – 47) mm	416924	4883580
70 (13 – 60) mm	416928	4883597
100 (13 – 90) mm	416930	4883605

stérile



Kit post-opérateur Natura® (+) pour urostomie, stérile

transparent

Constitué de :

- 1 support cutané Combihesive Natura avec **protections cutanées Stomahesive® et Durahesive® intégrales**
- 1 poche d'urostomie Combihesive Natura avec fermeture à clipser, transparente
- 1 adaptateur Natura pour réduction de la pression

5 kits

Taille de l'anneau (taille de stomie)	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 (13 – 35) mm	416936	4885739
57 (13 – 47) mm	416944	4885751
70 (13 – 60) mm	416952	4885774
100 (13 – 90) mm	416956	4885797

stérile



Baguette transverse pour stomie ConvaTec®

Baguette, stérile

- Forme de T
- Extrémité pivotante

10 pièces

Longueur	Numéro REF	Pharmacode (CH)
65 mm	022355	4464860
90 mm	022356	4464877

Accessoires et produits complémentaires





Kit d'irrigation Visi-Flow®

Pour les poches de stomie 1 pièce

Constitué de :

- 1 trousse
- 1 réservoir à eau avec cône et régulateur de débit
- 1 brosse de nettoyage
- 6 poches d'irrigation Stomadress®
- 1 clamp de poche
- 2 clips de fermeture
- 3 mini-poches Stomadress® Plus
- 3 caches pour stomie Stomadress® Plus
- 6 lingettes ConvaCare® pour le nettoyage de la peau

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Kit	175667	5333663



Système d'irrigation Visi-Flow®

Réservoir à eau avec tuyau,
cône et régulateur de débit

1 pièce

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 1 pièce	650610	5333686



Poche d'irrigation Stomadress® 1 pièce transparente

- **Protection cutanée intégrale Stomahesive®**
- Longueur : 90 cm

30 poches + 1 pince + 2 clips de fermeture

Taille de stomie	Numéro REF	Pharmacode (CH)
50 mm	175671	5333692



Pâte de protection cutanée Stomahesive®

Destinée à une application **externe** sur la peau environnant la stomie et les fistules (afin de combler les inégalités entre la stomie et la peau).

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Tube de 60 g	183910	0911747



Poudre de protection Stomahesive®

À appliquer sur les lésions superficielles ouvertes et suintantes.

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Dose de 25 g	025535	0869293



Anneaux de protection cutanée Stomahesive®

- Peuvent être étirés, enroulés, modelés ou superposés en cas de convexité.
- Peuvent être découpés, déchirés et recollés.
- Peuvent être utilisés en association avec la pâte de protection cutanée Stomahesive® et la poudre de protection Stomahesive®.
- Ne contiennent pas d'alcool et ne sèchent pas.

10 anneaux

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Ø 48 mm - Épaisseur 3 mm - Trou de départ 18 mm	413504	5499843
Ø 48 mm - Épaisseur 4 mm - Trou de départ 18 mm	413503	5499837
Ø 98 mm - Épaisseur 3 mm - Trou de départ 18 mm	413505	5499866

**Plaque de protection cutanée Stomahesive®**

Plaque de protection cutanée pour les stomies et fistules

5 pièces, 10 x 10 cm

3 pièces, 20 x 20 cm

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
5 pièces 10 x 10 cm	021713	0702883
3 pièces 20 x 20 cm	021737	0846323

**Pâte adhésive Stomahesive®**

Destinée à une application sur les muqueuses, ainsi que les lésions ouvertes et suintantes en dehors de la zone de stomie.

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Tube de 30 g	129730	0712769



Film de protection cutanée doux Sensi-Care™

- Film de protection cutanée à base de silicone
- Hypoallergénique, sèche rapidement et sans alcool
- Applicateur stérile contenant 1 ml ou 3 ml
- Vaporisateur de 28 ml

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
1 ml, stérile 5 applicateurs	420793	5541870
1 ml, stérile 25 applicateurs	420794	5541887
3 ml, stérile 5 applicateurs	420795	5541893
3 ml, stérile 25 applicateurs	420796	5541901
Spray 1 x 28 ml	420797	5541924



Film de protection cutanée doux Silesse™

- Film de protection cutanée à base de silicone
- Hypoallergénique, sèche rapidement et sans alcool
- Vaporisateur (sans butane) ou boîte contenant 30 lingettes dans des emballages individuels

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Spray 1 x 50 ml	420790	3953930
30 lingettes	420789	3953947



Dissolvant d'adhésif non-irritant Sensi-Care™

- Dissolvant d'adhésif à base de silicone
- Hypoallergénique, exempt d'alcool, d'huile, de parfums et de conservateurs
- Vaporisateur (sans butane) ou boîte contenant 30 lingettes dans des emballages individuels

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Spray 1 x 50 ml	413499	6668377
Spray stérile 1 x 150 ml	420798	5541918
30 lingettes	413500	6668360



Dissolvant d'adhésif Niltac™

- Dissolvant d'adhésif à base de silicone
- Hypoallergénique, exempt d'alcool, d'huile, de parfums et de conservateurs
- Vaporisateur (sans butane) ou boîte contenant 30 lingettes dans des emballages individuels

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Spray 1 x 50 ml	420787	3953918
30 lingettes	420788	3953924



Lingettes ConvaCare® pour le nettoyage de la peau

Lot contenant 100 lingettes sous forme d'**emballages individuels** afin de retirer en douceur les substances adhésives et résidus de pansements.

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 100 pièces	037443	1589779



Diamonds™ Anti-odeur et superabsorbant

- Superabsorbant avec matériau anti-odeur ActiveOne™
- Piège les odeurs et les excréments intestinales liquides dans la poche de stomie
- Sachets prêts à l'utilisation aux propriétés gélifiantes destinés à une utilisation dans les poches vidangeables ou dans les poches de colostomie fermées
- Boîte contenant 100 pièces avec 1 sachet de transport

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Boîte contenant 100 sachets	420791	4001321



Adaptateur Combihesive Natura®

Pour fixer une poche Natura® sur un support cutané Natura® sans exercer de pression

10 pièces, emballage individuel

Taille de l'anneau	Numéro REF	Pharmacode (CH)
45 mm	401993	4095049
57 mm	401994	4095055
70 mm	401995	4095084
100 mm	401996	4095090

Remarque : parfait pour une prise en charge quasiment sans douleur lors ... de la phase post-opératoire.



Sangle ConvaTec®

– Réglable (environ 47 à 92 cm)

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 1 pièce	175510	0839694



pinces de poche ConvaTec®

Adaptées aux poches vidangeables sans fermeture InvisiClose®

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 10 pièces	175632	1018663



Poche de nuit d'urostomie ConvaTec® transparente

- Non stérile
- Tuyau de 120 cm
- Volume de 2 000 ml

Également adaptée en tant que sac collecteur pour les stomies présentant des fistules ou pour les stomies

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 5 pièces	401784	0907355



Sac poubelle ConvaTec®

Pour la mise au rebut discrète des poches de stomie usagées.

Contenance	Numéro REF	Pharmacode (CH)
Emballage avec 30 pièces	168511	1434901



Joint circulaire convexe Combihesive Natura®

Adaptés aux supports cutanés plats et non modelables Combihesive Natura®

5 anneaux

Taille de l'anneau/ Taille d'orifice	Numéro REF	Pharmacode (CH)
38/19 mm	404006	2136867
38/22 mm	404007	2136904
38/25 mm	404008	2136910
45/29 mm	404009	2136927
45/32 mm	404010	2136956
45/35 mm	404011	2136962
57/38 mm	404012	2136979
57/41 mm	404013	2136991

Durée de conservation des produits ConvaTec

L'ensemble des produits de la gamme de prise en charge des stomies de ConvaTec ont une durée de conservation de 5 ans. Dans le cas des produits stériles et des poches dotées des technologies , Sensi-Care™, Silesse™, Niltac™ et Diamonds™, la date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, contactez notre service à la clientèle. Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos produits :



Produits

ConvaTec (Suisse) GmbH
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhouse www.convatec.ch

Conseil à la clientèle
Tél. : 0 800 / 55 11 10
(numéro gratuit)
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 17 h



Conseil à la clientèle



Conseillers et
supports
d'information



Sous réserve de modifications, d'inexactitudes et de fautes de frappe.
© 2019 ConvaTec D/A/CH · Imprimé en
Allemagne Réf. 5324 · Version 03/2019

Les marques Stomahesive, Durahesive Esteem,
Natura et InvisiClose indiquées par le symbole ®
appartiennent à ConvaTec Inc. et sont des marques
déposées aux États-Unis.