


Little Ones^{MD} de ConvaTec - Mode d'emploi Appareillage pour enfant doté de la technologie de couplage adhésif de ConvaTec

Commencer par nettoyer la peau autour de la stomie de votre enfant à l'aide d'un savon doux, exempt d'huile, et de l'eau tempérée. Si l'on préfère utiliser des lingettes humides commerciales, en choisir qui ne contiennent ni huiles ni lotions, car ces dernières peuvent nuire à la bonne adhérence de l'appareillage sur la peau. La peau devrait être exempte de tous solvants et de toutes substances grasses. Assécher complètement par tapotements.

Préparation de la barrière cutanée*

1. À l'aide du guide de mesure fourni, prendre la mesure de la base de la stomie. Tracer la mesure choisie sur le papier protecteur de la barrière cutanée en centrant l'ouverture prédécoupée. (Il n'est peut-être pas nécessaire de porter des gants; consulter un professionnel de la santé.)
2. Découper l'ouverture de la même grandeur que la stomie. Au moyen de ciseaux courbes à branches courtes, couper en suivant le tracé.
3. Retirer le papier protecteur de la barrière cutanée.

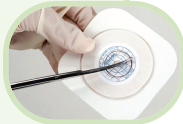

Application de la barrière cutanée*

4. Délicatement, mettre la barrière cutanée en place, puis la maintenir pendant 30 secondes afin qu'elle épouse bien tout le tour de la base de la stomie.
5. Si l'on utilise une barrière cutanée flexible, on peut retirer le papier protecteur d'un côté du collet, puis appliquer celui-ci sur la peau en lissant. Répéter pour l'autre côté du collet en s'assurant qu'il est bien lisse et sans plis.



Mise en place du sac sur la barrière cutanée*

6. Si vous utilisez un sac vidable, on recommande, avant l'application du sac sur la barrière cutanée, de fermer le dispositif de fermeture de sac sans attache InvisiClose® en le repliant vers le haut tout en appuyant fermement sur les languettes jusqu'à ce que l'on sente qu'elles sont bien jointes; un « clic » audible indique que le dispositif est bien verrouillé.
7. Veiller à séparer les surfaces internes du sac et s'assurer que celui-ci contient un peu d'air.
8. Retirer le papier protecteur de l'anneau du sac.
9. Replier vers soi la moitié supérieure de l'anneau adhésif du sac afin de pouvoir guider son application; puis, passer les doigts sur la partie supérieure pour que le sac colle bien. Toujours vérifier sous la partie supérieure du sac que le sac adhère solidement à la barrière cutanée.



Retrait et remise en place du sac et de la barrière cutanée*

Pour replacer le sac : Tout en appuyant sur la zone d'application transparente de la barrière cutanée avec une main, tirer la languette supérieure du sac avec l'autre main pour décoller celui-ci de la barrière cutanée, puis le replacer.

Pour retirer le sac et la barrière cutanée, préparer une débarbouillette douce ou une serviette en papier humide afin de nettoyer la peau de votre enfant. Saisir le bord du sac d'une main, tout en appuyant avec précaution sur la peau avec l'autre main. Tirer lentement et délicatement afin de retirer la barrière cutanée et le sac ensemble.

Jeter l'appareillage.



* Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.



SOUTIEN

Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au **1 800 465-6302** ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**



Ne pas oublier de vider le sac de votre enfant lorsqu'il est au tiers plein. Il est déconseillé d'utiliser des savons ou d'autres nettoyants à l'intérieur du sac. Au besoin, rincer avec de l'eau tiède.



ConvaTec
Little Ones™