## Colostomia



## Colostomia



## Colostomia



# Colostomia





Contacte-nos gratuitamente através da Linha Verde 800-20-1678

Av. da Liberdade, 144 -7° Dto • 1250-146 Lisboa • email: convatel.pt@convatec.com



ConvaTec

®/™ são marcas de ConvaTec Inc.

© 2020 ConvaTec Inc.

AP-016526-PT

# Um mundo de soluções para **Colostomia**



> destaque pelo picotado e assinale os produtos que deve utilizar					
Ficha de Prescrição	☐ ConvaTec				
Código CNP	Designação do Produto	Diâmetro Ø	Quantidade (nº caixas)		
Ficha de Prescrição		(II) Co	nvaTec		
Código CNP	Designação do Produto	Diâmetro Ø	Quantidade (nº caixas)		
Ficha de Prescrição		<u>Ш</u> Со	nvaTec		
Código CNP	Designação do Produto	Diâmetro Ø	Quantidade (nº caixas)		

Designação do Produto

**Ⅲ** ConvaTec

Ficha de Prescrição

Código CNP

# Índice

Introdução	2
O que é uma Ostomia?	3
Colostomias	4
Vida Social e Familiar	5
O cuidar da pele periestomal	E
Tipos de dispositivos	8
Aplicação dos dispositivos	10
Alimentação	16
Informações de interesse	18
A quem pode recorrer em caso de dúvida	a 20
Anotações pessoais	21
Anotações do profissional	22
Gama de dispositivos para colostomia	24
Fichas de prescrição de dispositivo	contracapa



É com o maior prazer que lhe oferecemos este livro, para o ajudar a esclarecer algumas dúvidas, bem como informá-lo sobre esta nova fase da sua vida.

E, porque tentamos compreendê-lo, saiba que pode sempre contar com muitas pessoas que estão dispostas a ajudá-lo, desde o seu médico à sua enfermeira, acabando em nós — ConvaTec®, onde existe à sua inteira disposição um serviço de informação profissional, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua ostomia, bem como orientá-lo na utilização e aquisição do seu material. Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite! Pergunte.

# O que é uma Colostomia?

O aparelho digestivo tem um papel muito importante na absorção de nutrientes, assim como na sua posterior eliminação. Os elementos que não são úteis ao organismo transformam-se em fezes. Por distintas razões, algumas pessoas necessitam de ser operadas para desviar as fezes da sua saída habitual - o ânus - e construir um novo caminho para o exterior. Este tipo de operação chama-se ostomia e realiza-se criando um estoma na parede abdominal. O estoma constrói-se com uma porção de intestino, e é através deste que as fezes são eliminadas. Por esta razão, as pessoas colostomizadas necessitam de utilizar um saco para a recolha de fezes.




## **Colostomias**

Numa colostomia, o orifício (estoma) situa-se ao nível do intestino grosso (cólon).

Consoante a sua localização no intestino grosso (cólon), as colostomias produzem geralmente fezes pastosas ou fezes sólidas.

Como resultado do processo digestivo, as colostomias produzem gases. Por isso, é importante utilizar um saco que tenha um filtro adequado, para eliminar o mau cheiro, e que seja fechado para recolher as fezes (sólidas ou pastosas).

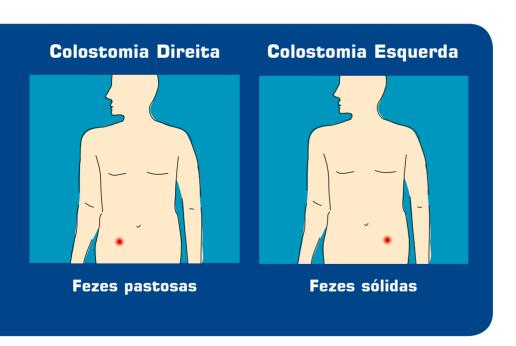



## Vida Social e Familiar

Depois de um período de adaptação, poderá realizar a maioria das actividades que realizava antes de ser operado, como trabalhar, ir ao café, ir a uma festa, viajar, nadar, ir à praia, andar de bicicleta, ou simplesmente passear ao ar livre, se essa for a opção que melhor se adapte ao seu estilo de vida. Verá que, com o passar do tempo, voltará a sentir-se plenamente seguro e confiante.

O seu médico, a sua enfermeira, e a sua família dar-lhe-ão todo o apoio necessário durante este período de adaptação. Quem melhor do que eles para o ajudar no seu regresso ao dia-a-dia normal? Por esta razão, é muito importante que exista uma relação de diálogo e confiança com eles, de forma a que possa falar livremente sobre a sua situação.

# O cuidar da pele periestomal

A pele periestomal (e o próprio estoma) é especialmente sensível. Por isso é importante cuidá-la bem. Uma pele periestomal em bom estado é fundamental para o seu bem-estar. O seu estoma não deve ser um entrave à sua higiene, devendo por isso, cui-



dar da sua higiene pessoal como o fazia antes de ser operado. Pode tomar banho de imersão ou duche, com ou sem o saco colocado, segundo a sua preferência. Se optar por tomar banho com o saco, não se preocupe, pois este não descola e secará rapidamente com a ajuda de uma toalha (lembre-se de proteger o filtro com o autocolante, de forma a evitar que o este se molhe e perca a eficácia).

Prevenir os problemas de pele é bem mais fácil do que tratá-los. Evite que a sua pele sofra. É muito importante saber fazer a higiene do seu estoma; para tal, tenha em consideração os seguintes pontos:

• Lave suavemente a pele periestomal e o estoma, com a ajuda de uma esponja suave, com água morna e sabão com pH neutro.



• Seque bem o estoma e a pele periestomal, sem friccionar, mantenha a pele que está debaixo do saco, limpa e seca.





• Não use substâncias irritantes para a pele à volta do estoma, como por exemplo: perfume, álcool, éter, antissépticos ou sabões agressivos.

• Se os pêlos em redor do estoma são abundantes, corte-os com uma tesoura (não utilize gilete ou creme depilatório).

- Não utilize qualquer tipo de creme gordo, pois pode impedir a boa aderência dos dispositivos.
- Utilize um sistema de ostomia (saco) que lhe proporcione a segurança de ter uma pele bem cuidada. Por isso, utilize produtos que sejam capazes de proteger a pele.


Contacte a sua enfermeira ou médico, se o seu estoma apresentar qualquer alteração, se tiver diarreia, ou se a sua colostomia não funcionar durante alguns dias.

## Tipos de dispositivos

Os dispositivos são hoje concebidos especialmente para que não tenha qualquer tipo de preocupações relativamente à sua segurança, discrição e conforto.

O material protector cutâneo – Stomahesive® – que fixa o dispositivo ao seu corpo, é feito à base de substâncias que, para além de permitirem que a sua pele permaneça em bom estado, lhe oferecem uma óptima aderência.

Por outro lado, o material de que são feitos os sacos é perfeitamente estanque, flexível, macio e constitui uma barreira perfeita contra os cheiros. Para reforçar a sua eficácia na eliminação dos cheiros, têm incorporado um filtro de carvão activado. Ninguém, a não ser você, saberá que usa um saco e ninguém sentirá incómodo algum em estar ao seu lado.

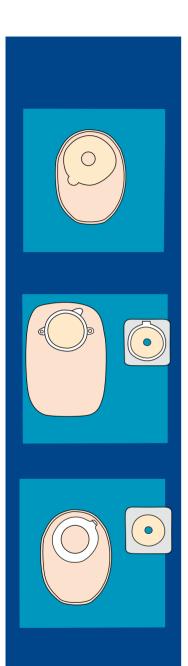

Tem à sua disposição três tipos de dispositivos para colostomia:

Sistema de Uma Peça — neste tipo de dispositivo, o saco é auto-aderente e tem uma base de protector cutâneo — Stomahesive® — que permite uma perfeita aderência à pele. Assim, quando se muda o saco, o sistema é removido como um todo.

**Sistema de Duas Peças** – este sistema, tal como o nome indica, é constituído por dois componentes: o saco e o penso protector cutâneo. Assim, pode mudar-se o saco sempre que for necessário, sem descolar o penso protector cutâneo durante alguns dias (2-3 dias).

Sistema com Tecnologia de Fixação Adesiva – ACT\* – trata-se de um sistema para ostomias com uma nova tecnologia, que permite reunir todas as vantagens dos sistemas acima descritos.

É constituído por um penso protector cutâneo e por um saco, mas não apresenta qualquer aro ou anel plástico.


As suas principais características são a simplicidade, a segurança, a protecção cutânea, a comodidade e a discrição.

<sup>\*</sup>Adhesive Coupling Technology

# Aplicação dos dispositivos

#### Como aplicar o Sistema de Uma Peça

- **1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- 2. Medir o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas.
- **3.** Tratando-se de um saco recortável, deve desenhar a forma do estoma sobre o papel de protecção, recortando-o depois com uma tesoura de extremidades curvas.
- **4.** No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o saco.
- **5.** Destacar o papel protector e aplicar o saco de baixo para cima, ao longo da pele periestomal.

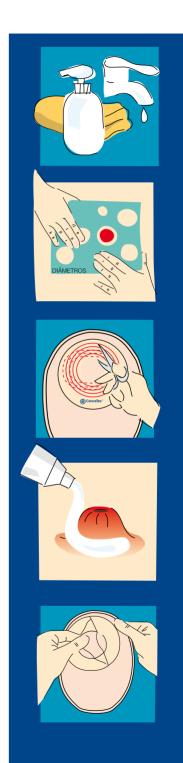





- **6.** Com a ajuda do calor das mãos, adaptar correctamente a parte adesiva protector cutâneo ao estoma.
- 7. Para retirar o saco, faça-o de cima para baixo com as duas mãos, em que uma segura o protector e a outra apoia a pele a fim de evitar irritações.
- **8.** Quando retirar o saco deve limpar novamente a pele, como já foi explicado anteriormente.


Esteem® Plus está disponível em dois tamanhos, para se adaptar melhor às suas necessidades particulares do dia-a-dia. Por exemplo, em momentos de convívio social, se for à praia, ou se for passear, poderá utilizar um saco mais pequeno, que lhe dará mais discrição e mais conforto.

Esteem® Plus apresenta um novo filtro, que proporciona uma boa eficácia na eliminação dos odores, permitindo a saída de gases, evitando obstruções, e prolongando o tempo de utilização do saco.

#### Como utilizar o Sistema de Duas Peças

- **1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- **2.** Meça o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas, e desenhe-o no papel protector do penso.

- **3.** Recorte o orifício central até ao diâmetro desejado.
- **4.** No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o penso protector cutâneo.
- **5.** Retirar o papel protector e aplicar o penso sobre o estoma, com a ajuda do calor das mãos, para adaptar correctamente a parte adesiva protector cutâneo ao estoma.

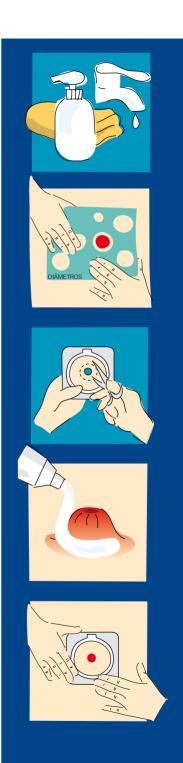












- **6.** Aplique Stomahesive® sobre a pele periestomal no interior do aro, para obter maior protecção cutânea e segurança na fixação do penso.
- 7. Encaixe o saco no penso, exercendo pressão nos aros e assegurando-se de que fica bem preso. Para retirar o saco, e no caso de estar a utilizar o sistema ConSecura®, basta pressionar para a direita ou esquerda, a patilha de segurança do fecho automático e removê-lo, sem necessidade de fazer força. Caso esteja a utilizar o sistema Natura® ou Combihesive IIS, deve segurar na placa com uma mão, e com a outra retirar o saco.
- **8.** Com o Sistema ConSecura®, sempre que necessário, pode orientar ou mudar a posição do saco, fazendo-o girar sem ter de o separar do aro, como por exemplo, quando estiver na cama.
- **9.** O penso pode permanecer na pele vários dias. Será você, melhor do que ninguém, que decidirá quando o deve retirar e substituir por um novo. Ao fazê-lo, descole o penso pela parte superior, usando as duas mãos, em que uma segura o penso e a outra apoia a pele circundante, de forma a que o processo seja o mais delicado possível para a pele.

Quando retirar o penso, deve limpar cuidadosamente a pele, como foi explicado em cima, e aplicar um novo penso e saco.

# Como utilizar o Sistema de Fixação Adesiva - ACT\* - Esteem synergy® Plus


Este sistema combina as vantagens dos sistemas de uma e de duas peças.

- **1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- 2. Meça o diâmetro à volta do estoma.
- **3.** Recorte o penso pela medida exacta do estoma.
- **4.** Retire o papel de protecção. Verifique se a base de fixação transparente está limpa e seca.
- 5. Aplique o penso.

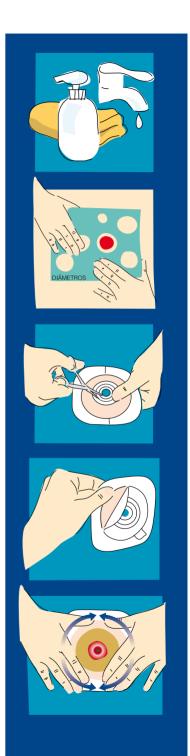

<sup>\*</sup>Adhesive Coupling Technology



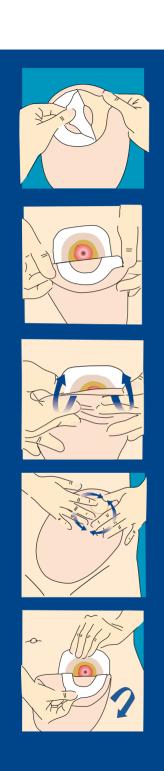

**6.** Retire o papel siliconado do anel adesivo do saco.

**7.** Segure o saco por fora do anel adesivo e dobre-o. Alinhe o bordo inferior do anel adesivo do saco com a parte inferior da base de fixação transparente do penso.

**8.** Aplique o saco com um movimento rotativo de baixo para cima.

**9.** Para avaliar se o saco está seguro à base de fixação, deve correr o dedo ao redor do anel adesivo do saco.

**10.** Para retirar o saco, segure a base de fixação transparente do penso com uma mão, enquanto com a outra descola o saco, através da aba do anel de fixação.

# Alimentação

O nosso conselho é: Coma de tudo como dantes! Ou seja, se antes da operação seguia alguma dieta, provavelmente deverá continuar com essa dieta. Se comia de tudo sem restrições, o mais certo é que continue assim.

Existem no entanto, algumas regras básicas de alimentação, que ajudam a manter o seu organismo mais saudável, vivendo melhor com a sua ostomia. É aconselhável que vá experimentando um alimento diferente de cada vez, para saber qual o seu efeito.

Se se der bem, continue a comê-lo. Se não, é melhor retirá-lo dos seus hábitos alimentares. Assim, em pouco tempo, saberá reconhecer o tipo de alimentos que mais lhe convêm.

É importante recordar que todos nós deveríamos beber 1,5 a 2 litros de água

por dia.

É também importante realçar, que a sua alimentação deve incluir alimentos ricos em fibras, como as frutas, verduras e legumes, pois ajudam a regular o trânsito intestinal, contribuindo para uma regularidade das



dejecções, bem como para diminuir a frequência de diarreias ou de "prisão de ventre".

Damos nesta tabela, alguns conselhos importantes para a sua alimentação.

Alim	entos que "pi	andom" o int	octino
Arroz	Queijo s	eco Bata	ata
Frutos seco	os Banana	Com	pota de maçã
Alime	ntos que pod	em provocar d	liarreia
Leite	Feijão	Figos	Ameixas
Morango	Melancia	Laranja	Kiwi
_	Vegetais	Gorduras cr	uas
	9		
Alimentos o	ue provocam i	mais cheiro na	s fezes/gases
Ovos	Cebola	Queijo	Peixe
Espargo		Café	Couve
Lopai go	AIIIO	Garc	Odave
Alimentos	que diminuen	o cheiro das	fezes/gases
logurtes	Salsa	Espinafres	Alface
logui ces	Jaisa	Lahingu ea	Allace
	L'arrant and a second		
	limentos que		
Condiment	os fortes	Sumo de fru	ta ácida
	Alimentos que	provocam gas	ses
Feijão	Ervilhas	Legumes	Cebolas
Pão	Bolos	Chocolates	Fermentos
Cerveja	Refrigerante	S	
,	0		

Aconselhamos que desfrute bem a sua refeição, comendo sem pressas e mastigando bem os alimentos.



de interesse

#### Comparticipações

Os dispositivos são comparticipados por lei, sendo a percentagem variável de acordo com o sistema de protecção social de cada um.

#### **Benefícios Fiscais**

Existe legislação aplicável aos ostomizados, tendo sido estabelecidos benefícios em diversas áreas.

#### Vestuário

Se quiser pode usar a última moda! Ou se preferir, use o mesmo estilo que usava antes. Os sacos modernos são extremamante discretos. Por isso. descanse, pois não se notará nada. Deve apenas ter a precaução de não colocar cintos, elásticos ou roupas muito apertadas por cima do estoma, para se sentir mais confortável.

#### Desporto e Tempos-livres

Pode e deve praticar exercício físico! É claro que não lhe dizemos para fazer boxe ou para lançar o dardo. Mas actividades como correr, andar de bicicleta, nadar ou jardinagem, são totalmente recomendáveis. Se decidir praticar um desporto ou uma actividade que exija um grande esforço físico, deverá consultar o seu médico ou enfermeiro estomaterapeuta.

#### **Viagens**

Pode viajar à vontade e sempre que o desejar! Quando for viajar, apenas não se esqueça de preparar um pequeno estojo (pequena maleta) que contenha todo o material necessário para cuidar do seu estoma, durante o período em que estiver fora de casa (para se sentir mais seguro leve sempre mais material do que normalmente necessita). Aconselhamos que leve sempre este material na sua bagagem de mão, pois em caso de extravio das malas, estará sempre prevenido.

## A quem pode recorrer em caso de dúvida

Relembramos que existem profissionais de saúde à sua disposição, para lhe dar conselhos, e toda a informação que diz respeito aos cuidados com o estoma, e à sua vida depois da operação. Certamente que o seu cirurgião, o seu enfermeiro estomaterapeuta, os enfermeiros que o assistem ou o seu médico de família dar-lhe-ão toda a ajuda de que necessitar. Existem actualmente associações que defendem os direitos dos ostomizados, e que lhe oferecem a possibilidade de participar em reuniões informativas, bem como apoiá-lo sempre. Pode ainda contar connosco – **ConvaTec**®. Pelo nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida do ostomizado, desenvolvemos os melhores produtos para satisfazer as suas necessidades, e oferecemos um Serviço de Informação Profissional, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua

ostomia, bem como orientálo na utilização e aquisição do seu material. Este serviço conta com uma larga experiência e está ao seu inteiro dispor, através de uma linha telefónica gratuita.

Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite em contactar-nos!




e-mail: convatel.pt@convatec.com

# Anotações do profissional

Nome do profissional	
Data da intervenção	
Tipo de intervenção	
Outros dados relevantes	
Diâmetro do estoma	
Produto aconselhado	
Data da próxima consulta	

## Aparelho digestivo

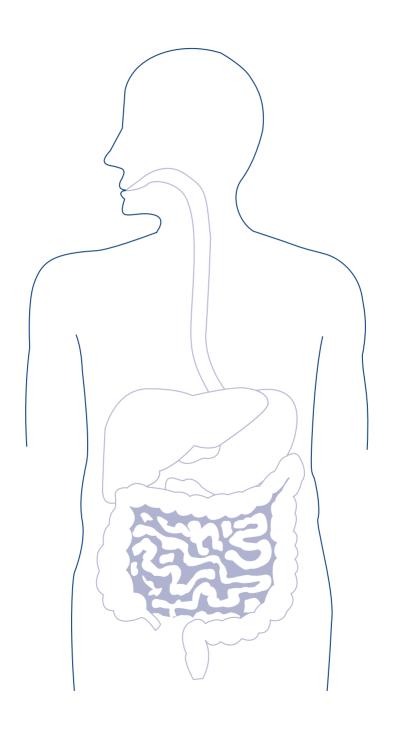

### Gama de Dispositivos para Colostomia

#### Sistemas de Uma Peça



PRODUTO		REF	CNP
ESTEEM® PLUS			
Transparente Recortável	Rec. de 20/70mm (30 sacos)	416700	6210500
Opaco Grande Recortável	Rec. de 20/70mm (30 sacos)	416701	6210518
Opaco Grande	Rec. de 25mm (30 sacos)	416704	6210476
	30mm (30 sacos)	416707	6210484
	35mm (30 sacos)	416710	6210492
	40mm (30 sacos)	416713	6211300
	50mm (30 sacos)	416715	6211318



Stoma Cap Fechado Rec. de 19/50mm (30 dispositivos) 175611 6685388



### Sistemas de Duas Peças



	REF	CNP
45mm (30 sacos)	401445	7879379
57mm (30 sacos)	401446	7879387
45mm (30 sacos)	401311	7879395
57mm (30 sacos)	401312	7879403
	57mm (30 sacos) 45mm (30 sacos)	## A5mm (30 sacos) 401445  57mm (30 sacos) 401446  45mm (30 sacos) 401311  57mm (30 sacos) 401312







### Sistemas de Duas Peças

PRODUTO		REF	CNP
NATURA™+			
Saco fechado opaco	32mm (30 sacos)	416400	6990010
	38mm (30 sacos)	416403	6990028
	45mm (30 sacos)	416406	6990036
	57mm (30 sacos)	416409	6990044
	70mm (30 sacos)	416412	6990051
Saco Transparente	45mm (30 sacos)	421803	7017442
	57mm (30 sacos)	421804	7017459
	70mm (30 sacos)	421805	7017467



#### NATURA™+

Penso flexível	32mm (5 pensos)	413100	6990127
	38mm (5 pensos)	413101	6990135
	45mm (5 pensos)	413102	6990143
	57mm (5 pensos)	413103	6990150
	70mm (5 pensos)	413104	6990168
Penso Stomahesive®	32mm (5 pensos)	401980	6990184
	38mm (5 pensos)	401981	6990192
	45mm (5 pensos)	401982	6990200
	57mm (5 pensos)	401983	6990218
	70mm (5 pensos)	401984	6990226
	100mm (5 pensos)	401906	6990176





## Sistemas de Duas Peças



PRODUTO		REF	CNP
NATURA™+			
Penso moldável flexível	estoma 13mm-22mm/ saco 45mm (5 pensos)	411809	6990267
	estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos)	411811	6990275
	estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos)	411813	6990283
	estoma 45mm-56mm/ saco 70mm (5 pensos)	411815	6990291
Penso moldável convexo	estoma 13mm-22mm/ saco 45mm (5 pensos)	420233	6990234
	estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos)	420234	6990242
	estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos)	420235	6990259
Penso Durahesive® convexo	19/45mm 5 pensos)	125280	6990069
	22/45mm (5 pensos)	125281	6990077
	25/45mm (5 pensos)	125282	6990085
	28/45mm (5 pensos)	125283	6990093
	32/45mm (5 pensos)	125284	6990101
	35/45mm (5 pensos)	125285	6990119



NATURA™ACCORDEON	NOVO		
Penso Flexível	45mm (5 pensos)	421455	6506162
	57mm (5 pensos)	421459	6506170
	70mm (5 pensos)	421463	6506188
NATURA™ACCORDEON		NOVO	
Penso Durahesive Convex	22/45mm (5 pensos)	421633	6505974
	35/57mm (5 pensos)	421635	6505982
	48/70mm (5 pensos)	421637	6505990
NATURA™ACCORDEON		NO	vo
Penso Moldável Flexível	estoma 13mm-22mm saco 57mm (5 pensos)	421030	6506139
	estoma 22mm-33mm/ saco 57mm (5 pensos)	421031	6506147
	estoma 33mm-45mm/ saco 70mm (5 pensos)	421032	6506154

## Sistemas de Duas Peças

PRODUTO				REF	CNP
COMBIHESIVE® II S					
Saco fechado com filtro		32mm (30	) sacos)	402521	6745687
		38mm (30	) sacos)	402522	6745695
		45mm (30	) sacos)	402523	6745703
		57mm (30	) sacos)	402524	6745711
		70mm (30	) sacos)	402525	6745729
COMBIHESIVE® II S					
Penso Plus		32mm (5	pensos)	125137	6745083
		38mm (5	pensos)	125138	6745091
		45mm (5	pensos)	125139	6745109
		57mm (5	pensos)	125140	6745117
		70mm (5	pensos)	125141	6745125
		100mm (5	pensos)	125163	6745133
COMBIHESIVE® II S					
Penso Flexível		32mm (5	pensos)	125132	6745141
		38mm (5	pensos)	125133	6745158
		45mm (5	pensos)	125134	6745166
		57mm (5	pensos)	125135	6745174
		70mm (5	pensos)	125136	6745182
Combihesive IIS Penso Flexível Pediá	átrico	32mm (5	pensos)	125016	6745190
COMBIHESIVE® II S					
Penso "Durahesive Convex"		19/45mm	(5 pensos)	125028	6745208
		22/45mm	(5 pensos)	125029	6745216
		25/45mm	(5 pensos)	125030	6745224
		28/45mm	(5 pensos)	125031	6745232
		32/45mm	(5 pensos)	125032	6745240
		35/45mm	(5 pensos)	125033	6745257
COMBIHESIVE® II S					
PENSO stomahesive moldável 22	2/33m	m - 45mm	(5 pensos)	411827	6118885
33	3/45m	m - 57mm	(5 pensos)	411829	6118893
45	/56mr	n - 70mm	(5 pensos)	411831	6118901

#### Sistemas c/ Tecnologia de Fixação Adesiva - ACT\*



PRODUTO		REF	CNP
ESTEEM synergy® PLUS			
Saco Pequeno fechado opaco	35 mm (30 sacos)	416777	6210393
	48 mm (30 sacos)	416781	6210401
Saco Standard fechado opaco	35 mm (30 sacos)	416775	6210419
	48 mm (30 sacos)	416779	6210427
	61 mm (30 sacos)	416783	6210435
Saco Standard fechado transparente	35 mm (30 sacos)	416774	6210443
	48 mm (30 sacos)	416778	6210450
	61 mm (30 sacos)	416782	6210468



Penso Flexível	$13/35 \text{ mm} = \emptyset \text{ saco } 35 \text{ mm } (5 \text{ pensos}) 409265 7919159$
	13/48 mm = ø saco 48 mm (5 pensos) 409266 7919167
	13/61 mm = ø saco 61 mm (5 pensos) 409267 7919175



Penso ø estoma 13/22 = ø saco 48 mm (10 pensos) 411657 6185926 Moldável ø estoma 22/33 = ø saco 48 mm (10 pensos) 411658 6185934 Flexível ø estoma 33/45 = ø saco 61 mm (10 pensos) 411659 6185942





Penso 13/35 mm =  $\emptyset$  saco 35 mm (5 pensos) 405484 7919183 Stomahesive\* 13/48 mm =  $\emptyset$  saco 48 mm (5 pensos) 405485 7919191 13/61 mm =  $\emptyset$  saco 61 mm (5 pensos) 405486 7919209

#### Acessórios

PRODUTO	REF	CNP
STOMAHESIVE® SEAL		



Anel Moldável de Proteção Cutânea	Fino 48mm (cx. 10)	413504	6412601
Anel Moldável de Proteção Cutânea	98mm (cx. 10)	413505	6412619



#### **STOMAHESIVE®**

Pasta	60g	183910	6640813

			•
		_	-
		to	2000.
		100.	-
6		-	-
III No.	11	1	

Kit de Irrigação c/cone	401989	6730796

Manga de Irrigação	10 mangas + 2 clips	175612	6730804
	<u> </u>		



#### **NILTAC®**

Spray Removedor de adesivo médico	(50 ml)	TR101	6299099
Toalhetes Removedor de adesivo médico	(cx 30)	TR102	6299107



#### SILESSE"

Toalhetes Protector cutâneo	(cx 30)	TR103	6299123
Spray Protector cutâneo	(50ml)	TR104	6299115



#### **DIAMONDS**®

	Saquetas de Gelificante Super-Absorvente	100 unids.	TR104	6299131
--	--	------------	-------	---------



CINTO	(1 cinto)	175507	6745745
Clips	cx 10	175632	6745737



