



Accordion Flange de Natura™ con Tecnología Moldeable de ConvaTec™


1 Aplicación del Accordion Flange

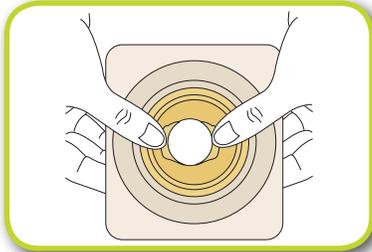

En el dorso de la barrera de piel hay un protector antiadherente. **NO LO RETIRE TODAVÍA.** Enrolle y adapte el adhesivo moldeable el tamaño del estoma. **No lo estire, hale o corte.** Colóquelo haciendo presión una vez obtenido al tamaño deseado.

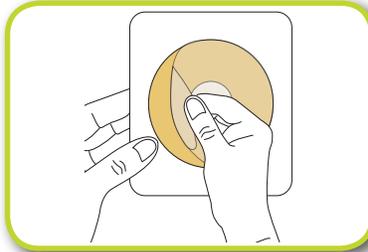


Retire el protector antiadherente, centre la abertura sobre el estoma y aplíquelo en la piel limpia y seca.

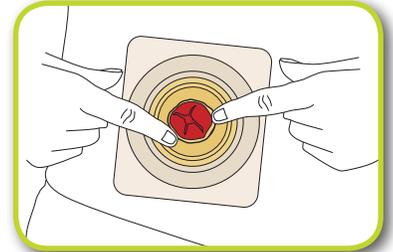


Coloque sobre el cuerpo el reborde del acordeón. Presione el adhesivo enrollado hacia el estoma para asegurar un ajuste exacto. Retire el papel antiadhesivo del collar de cinta y presione contra la piel. Sostenga suavemente la barrera de piel en su sitio durante aproximadamente 30 segundos.


2 Aplicación de la bolsa

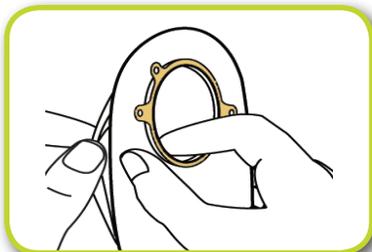

Separe los lados de la bolsa para permitir que le entre algo de aire.

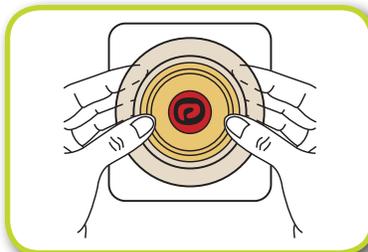

HALE HACIA ARRIBA el acordeón flange y sosténgalo con los dedos pulgares por encima y con los demás dedos por debajo. Alinee las bridas de la bolsa y la barrera de piel.

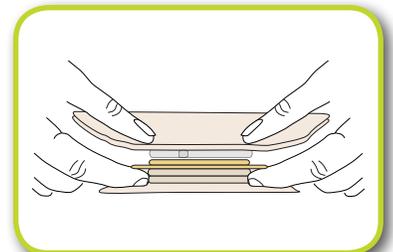


Comience en el fondo y aplique presión completamente alrededor de las bridas hasta que la bolsa y la brida queden abrochadas completamente entre sí.



Accordion Flange de Natura™ con Tecnología Moldeable de ConvaTec™

3 Cierre, vaciamiento y remoción de la bolsa


Para el cierre del extremo InvisiClose™:

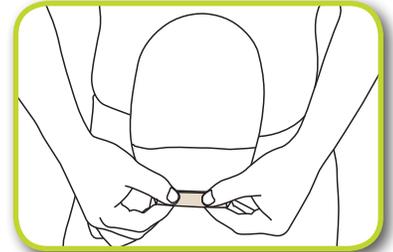


Para cerrar la bolsa, doble el extremo para arriba hacia usted 3 veces hasta que los cierres de cruce estén alineados. Mantenga una pequeña cantidad de aire en la bolsa. Presione y comprima a través de todo el cierre para asegurarlo.

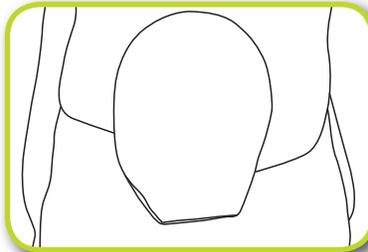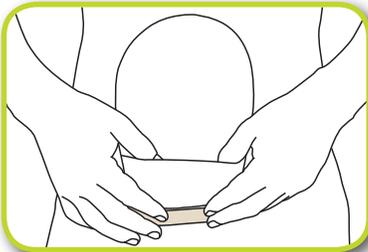

Voltee al revés el Lock-it-Pocket™ para esconder el extremo dentro.

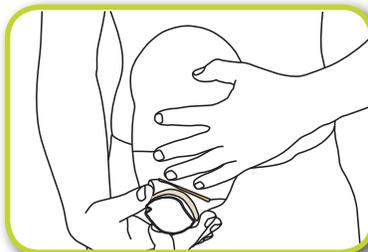

Para vaciar la bolsa, incline hacia arriba el extremo en dirección al cuerpo. Abra despegando el cierre y desenvuelva el extremo. Para una apertura más fácil, empuje juntando los lados.

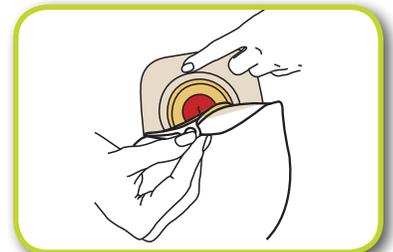

Para retirar la bolsa del flange, sujételo suavemente con una mano y desabroche con delicadeza la bolsa.

Notas:

Más información llamando al **1-800-422-8811** de lunes a viernes 8:30 - 19:00 www.ConvaTec.com