

Flexi-Seal™ Collecteur pour incontinence fécale

Avec adhésif hydrocolloïde

POSITION DU PATIENT

Placer le patient en position allongée sur le côté gauche ou droit, le genou du dessus plié jusqu'à la poitrine, pour dégager la région périanale.



PRÉPARATION DE LA PEAU

Bien nettoyer la peau de la région périanale à l'eau tiède. Rincer à fond pour enlever tout résidu de savon ou de produit nettoyant. Retirer les résidus de pâte provenant du collecteur précédent.

Couper soigneusement, avec des ciseaux, tous les poils de la région périanale près de la racine.

Utiliser la pâte Stomahesive® 60 grammes en présence de fissures et de plis cutanés. Appliquer un anneau de pâte autour de l'ouverture prédécoupée du collecteur, et non pas sur la peau du patient, puis attendre environ une minute avant de mettre le collecteur en place. Des études cliniques ont démontré que l'utilisation de la pâte Stomahesive® 60 grammes prolonge le port de l'appareillage.



MISE EN PLACE DU COLLECTEUR

Au besoin, agrandir l'ouverture du collecteur en coupant la barrière cutanée. L'ouverture devrait être légèrement plus large que l'anus pour ne pas entraver la dilatation.

Ne retirer que le papier protecteur de la barrière cutanée; laisser la pellicule de protection de la bordure adhésive.

Pour faciliter la mise en place du collecteur, plier la barrière cutanée en deux verticalement.



NE PAS TOUCHER L'ADHÉSIF AVEC LES DOIGTS

Séparer les fesses du patient et appliquer la partie étroite de la barrière cutanée sur le périnée.

Appliquer d'abord la barrière cutanée autour de l'anus et ensuite sur la région périanale. Appuyer fermement sur la barrière cutanée pour qu'elle épouse la forme du corps.

Appliquer ensuite la barrière cutanée sur la région située entre l'anus et le coccyx en appuyant fermement dessus pour qu'elle épouse la forme du corps.

Retirer la bande de papier qui protège la bordure adhésive et appliquer soigneusement sur la fesse supérieure et ensuite sur la fesse inférieure. Couper soigneusement, à l'aide de ciseaux, la portion de la bordure qui empiète sur le vagin ou le scrotum.

Exercer une pression ferme pendant environ une minute pour bien fixer le collecteur.



POSITION DU COLLECTEUR

Insérer le collecteur entre les jambes du patient et bien lisser pour éviter les plis du sac ou les frottements sur les points de compression.



UTILISATION DU COLLECTEUR

Selles liquides

Drainage nocturne: Attacher l'extrémité

ouverte de la bonde de drainage à la tubulure du sac de drainage nocturne.

Déplacements: Retirer le dispositif de drainage de l'adaptateur et le refermer.

Selles molles

Couper l'embout du collecteur juste au-dessus de la bonde de drainage et le refermer à l'aide de l'attache incluse dans l'emballage.

Pour refermer le collecteur, enrouler une seule fois l'embout autour de la tige de l'attache. Maintenir en place. Abaisser la barre de l'attache jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée. Pour retirer l'attache, séparer les deux branches l'une de l'autre.

Ouvrir et refermer l'attache, selon les besoins, pour vider le collecteur. Ne pas laisser le collecteur se remplir à plus du tiers de sa capacité.

Nettoyage

On peut rincer le collecteur sans l'enlever. Nettoyer par l'ouverture du bas avec de l'eau tiède.



RETRAIT DU COLLECTEUR

Retirer délicatement la barrière cutanée en appuyant légèrement sur la peau adjacente à l'aide de la main libre.

Replier la barrière cutanée sur elle-même et la jeter dans le contenant approprié.

Le collecteur Flexi-Seal™ pour incontinence fécale peut être laissé en place jusqu'à 48 heures s'il est solidement attaché.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le collecteur Flexi-Seal™ pour incontinence fécale est un sac allongé muni d'un adhésif hydrocolloïde, d'une pellicule adhésive semblable à du tissu et doté d'un dispositif de drainage et d'un filtre désodorisant.

INDICATION

Patients alités souffrant d'incontinence fécale (selles molles ou insuffisamment moulées).

CONTRE-INDICATION

Patients présentant une hypersensibilité connue à l'adhésif, au collecteur ou à ses composantes.

POUR COMMANDER

Flexi-Seal™ Collecteur pour incontinence fécale
boîte de 10

REF 650 078



avant

arrière

Pour en savoir plus, appelez le

0800 - 55 11 10

www.convatec.ch

ConvaTec