

# INVICLOSE<sup>MD</sup>

## MODE D'EMPLOI DE LA FERMETURE DE SAC SANS ATTACHE INVICLOSE<sup>MD</sup>




Lock-it-Pocket<sup>MC</sup>




Deux bandelettes à l'extrémité du sac

Deux dispositifs de fermeture qui s'imbriquent

### 1 FERMETURE DU SAC

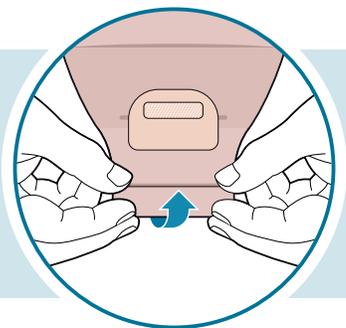

Étape 1 : Replier les bandelettes vers le haut jusqu'à ce que les dispositifs de fermeture se juxtaposent.

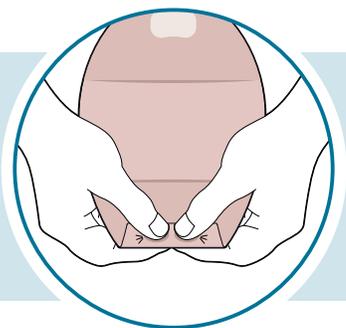


Étape 2 : Appuyer sur toute la largeur des dispositifs de fermeture jusqu'à ce que l'on sente, sous les doigts, le verrouillage s'effectuer.




Étape 3 : Placer les pouces dans la pochette Lock-it-Pocket<sup>MC</sup> et saisir l'extrémité repliée entre les pouces et les index.


Étape 4 : Retourner la pochette sur elle-même pour y dissimuler l'extrémité du sac.

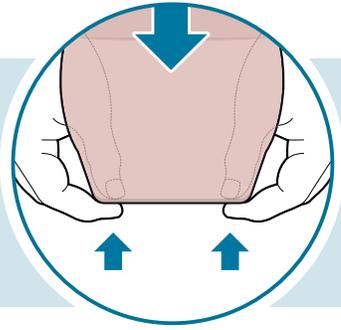**2****VIDANGE ET NETTOYAGE DU SAC**


**Étape 1 :** Redéployer la pochette Lock-it-Pocket<sup>MC</sup> pour avoir accès à l'extrémité du sac.

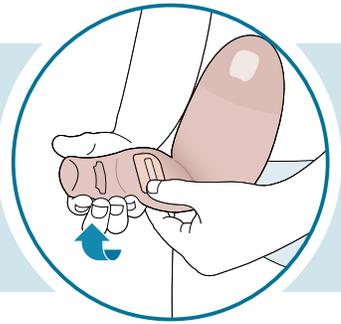

**Étape 2 :** Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut (vers soi), ouvrir la fermeture en mousse, puis déplier l'extrémité.

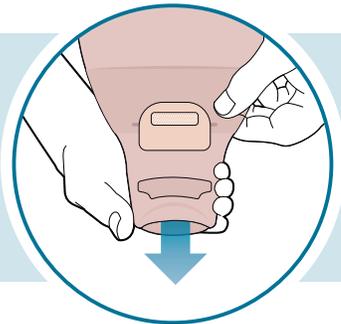**Conseils pour le nettoyage de l'extrémité du sac :**

**Étape 3 :** Tenir l'extrémité du sac d'une main, et de l'autre, ouvrir l'extrémité en appuyant sur les deux côtés des bandelettes pour vider le sac.

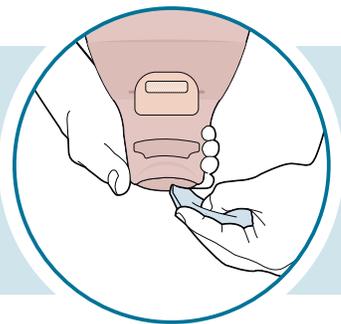

**Étape 4 :** Nettoyer délicatement la surface à l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes, et au choix, avec du savon au pH neutre et de l'eau.



Pour obtenir plus d'information, communiquez avec le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **[www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)**

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.

MD et MC indiquent respectivement des marques déposées et des marques de commerce de ConvaTec Inc.  
© 2016 ConvaTec Inc. AP-016448-MM V1451

