

ESTEEM[®]

S TVAROVATEĽNOU TECHNOLOGIOU



1 Príprava tvarovateľnej časti




Odstráňte tvarovateľnú časť z vrečka.




Odstráňte ochrannú fóliu **č. 1**. Odkryje sa vám tvarovateľná strana.




Rolujte a tvarujte otvor, ktorý zodpovedá veľkosti a tvaru stómie. **Nenatahujte ani nestrihajte adhezívnu hmotu.** Po dosiahnutí požadovaného tvaru hmotu na mieste zatlačte.

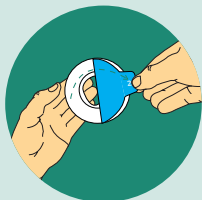

Odstráňte ochrannú fóliu **č. 2**. Táto strana bude aplikovaná na kožu.

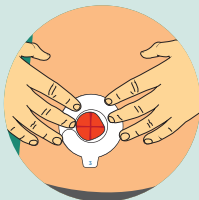

Vytvarovanú časť aplikujte na telo tak, aby otvor tesne priliehal k stómii. Prítlačte hmotu, aby dobre obomkla stómiu.

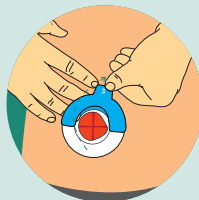


Odstráňte ochrannú fóliu **č. 3**.

2 Aplikácia stomického vrečka k tvarovateľnej časti



Odstráňte ochrannú fóliu z lepiwej časti vrečka.

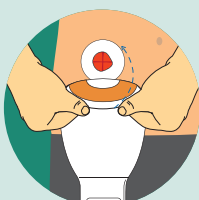

Vrečko prehnite a začnite ho nalepovať od dolnej polovice smerom hore. Lepivú plochu prítlačte na telo a podržte cca 30 sekúnd, aby stomická pomôcka dobre prilnula po celej ploche.

3

Bezsvorkový uzáver InvisiClose™




Výpust uzavrite preložením suchých zipsov 3x od konca smerom hore tak, aby celou plochou do seba zapadli a stlačte ich po celej dĺžke.




Pre väčšiu bezpečnosť a diskrétnosť prehnite prednú časť úschovného vrecka, čím schováte výpust dovnútra.

4


Vyprázdenie a čistenie vrecka

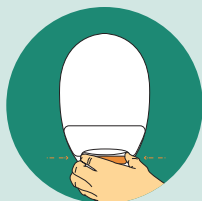

Na vyprázdenie obsahu z vrecka uchopte výpust a stlačením obidvoch strán k sebe ho otvorte, čím obsah vyprázdnite.

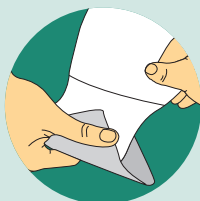


Rady pre čistenie vrecka:
Podržte vrecko jednou rukou a očistite výpust na vrecku toaletným papierom, ktorý držíte v druhej ruke.

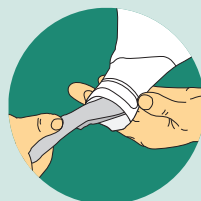

Vyčistite vnútornú časť výpustu toaletným papierom alebo detskými vhlčnými utierkami.

5

Odstránenie vrecka

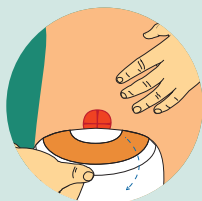

Vrecko sa odstraňuje spolu s tvarovateľnou časťou ako celok.

OSLAVUJEME

1991 **25** 2016

ROKOV
na Slovensku



0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o.

Štúrova 71A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933

www.convatec.sk

Distribúcia:

STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88

PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 99 111

PHAREX s.r.o., Prieloztek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569

