


# COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA SACCA A FONDO APERTO CON CHIUSURA INVISICLOSE®

## 1 Come chiudere la sacca



Arrotola il fondo della sacca per 3 volte, fino a far combaciare le striscette in velcro. Schiaccia bene l'intera striscia per chiudere ermeticamente il fondo

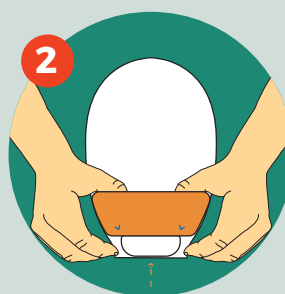

Ripiega il fondo della sacca nell'apposita tasca Lock-it, inserendo i pollici e rigirandola verso il basso, per maggiore discrezione

## 2 Svuotare e rimuovere la sacca



Sgancia le striscette in velcro e srotola la sacca. Allarga l'apertura sul fondo premendo ai lati delle due striscette e svuota la sacca



Per cambiare la sacca, rimuovila dall'alto verso il basso

Disponibile nei sistemi due pezzi con flangia, con aggancio adesivo e monopezzo

Per maggiori informazioni, contatta il numero verde gratuito **800.930.930** dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo [convatel.italia@convatec.com](mailto:convatel.italia@convatec.com)  
[www.convatec.it](http://www.convatec.it)

*\*Numero verde destinato ad assistenza tecnica*

®/TM sono marchi registrati di Convatec Inc. © 2016 Convatec Inc.,

Dispositivo medico **CE** Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso

 **Convatec**