

Mode d'emploi

Solvant non-irritant pour adhésifs Niltac^{MC}



Première étape

Vaporiser le solvant pour adhésifs Niltac^{MC} autour des bords de l'adhésif, puis attendre quelques secondes.



Retrait facile

Décoller délicatement l'adhésif; au besoin, vaporiser d'autre solvant pour adhésifs Niltac^{MC} pour faciliter le retrait.



Séchage en quelques secondes

Une fois sec, le solvant non-irritant pour adhésifs Niltac^{MC} ne compromettra pas l'adhésion d'autres pansements ou d'autres dispositifs.

CONSEIL : Essayez la barrière protectrice non-irritante en aérosol ou en lingettes Silesse^{MC} pour protéger la peau avant d'appliquer un dispositif.

Code de produit	Description du produit	Dimensions du produit
420787	Solvant non-irritant pour adhésifs Niltac ^{MC} (50 ml)	Un aérosol de 50 ml

Mode d'emploi

Lingettes non-irritantes pour adhésifs Niltac^{MC}



Première étape

Déchirer le sachet pour l'ouvrir, puis retirer et déplier la lingette.



Retrait facile

Frotter la lingette sur les résidus d'adhésif pour les retirer.



Séchage en quelques secondes

Une fois sec, le solvant non-irritant pour adhésifs Niltac^{MC} ne compromettra pas l'adhésion d'autres pansements ou d'autres dispositifs.

CONSEIL : Essayez le solvant non-irritant pour adhésifs Niltac^{MC} en aérosol pour retirer un dispositif sans devoir y toucher.

Code de produit	Description du produit	Dimensions du produit
420788	Lingettes non-irritantes pour adhésifs Niltac ^{MC} (30 lingettes)	boîte de 30 lingettes



Pour obtenir plus d'information, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.
MC indique une marque de commerce de ConvaTec Inc.

© 2016 ConvaTec Inc.

V1407

Niltac^{MC}
Essentiel au bien-être de vos patients