

> destaque pelo picotado e assinale os produtos que deve utilizar

Colostomia



Colostomia



Colostomia



Colostomia



Contacte-nos gratuitamente através da Linha Verde 800-20-1678
Av. da Liberdade, 144 -7º Dº • 1250-146 Lisboa • email: infotec@convatec.com

@/™ são marcas de ConvaTec Inc.

© 2016 ConvaTec Inc.

AP-016526-PT

Julho/2016



Um mundo de soluções para **Colostomia**



> destaque pelo picotado e assinale os produtos que deve utilizar

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Índice

| | |
|---|-------------------|
| Introdução | 2 |
| O que é uma Ostomia? | 3 |
| Colostomias | 4 |
| Vida Social e Familiar | 5 |
| O cuidar da pele periestomal | 6 |
| Tipos de dispositivos | 8 |
| Aplicação dos dispositivos | 10 |
| Alimentação | 16 |
| Informações de Interesse | 18 |
| A quem pode recorrer em caso de dúvida | 20 |
| Anotações pessoais | 21 |
| Anotações do profissional | 22 |
| Gama de Dispositivos para Colostomia | 24 |
| Fichas de Prescrição de Dispositivo | contracapa |




Introdução

É com o maior prazer que lhe oferecemos este livro, para o ajudar a esclarecer algumas dúvidas, bem como informá-lo sobre esta nova fase da sua vida.

E, porque tentamos compreendê-lo, saiba que pode sempre contar com muitas pessoas que estão dispostas a ajudá-lo, desde o seu médico à sua enfermeira, acabando em nós – ConvaTec®, onde existe à sua inteira disposição um serviço de informação profissional, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua ostomia, bem como orientá-lo na utilização e aquisição do seu material. Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite! Pergunte.

O que é uma Colostomia?

O aparelho digestivo tem um papel muito importante na absorção de nutrientes, assim como na sua posterior eliminação. Os elementos que não são úteis ao organismo transformam-se em fezes. Por distintas razões, algumas pessoas necessitam de ser operadas para desviar as fezes da sua saída habitual - o ânus - e construir um novo caminho para o exterior. Este tipo de operação chama-se ostomia e realiza-se criando um estoma na parede abdominal. O estoma constrói-se com uma porção de intestino, e é através deste que as fezes são eliminadas. Por esta razão, as pessoas colostomizadas necessitam de utilizar um saco para a recolha de fezes.

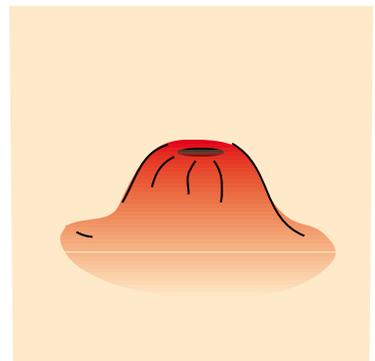


Colostomias

Numa colostomia, o orifício (estoma) situa-se ao nível do intestino grosso (cólon).

Consoante a sua localização no intestino grosso (cólon), as colostomias produzem geralmente fezes pastosas ou fezes sólidas.


Como resultado do processo digestivo, as colostomias produzem gases. Por isso, é importante utilizar um saco que tenha um filtro adequado, para eliminar o mau cheiro, e que seja fechado para recolher as fezes (sólidas ou pastosas).

Colostomia Direita

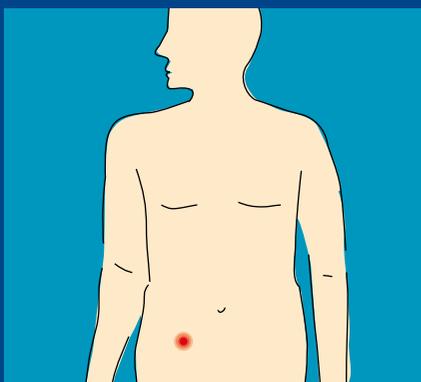

Fezes pastosas

Colostomia Esquerda

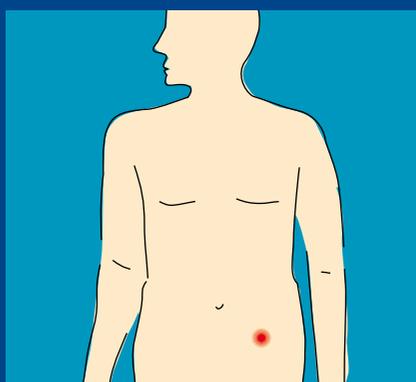

Fezes sólidas



Vida Social e Familiar

Depois de um período de adaptação, poderá realizar a maioria das actividades que realizava antes de ser operado, como trabalhar, ir ao café, ir a uma festa, viajar, nadar, ir à praia, andar de bicicleta, ou simplesmente passear ao ar livre, se essa for a opção que melhor se adapte ao seu estilo de vida. Verá que, com o passar do tempo, voltará a sentir-se plenamente seguro e confiante.

O seu médico, a sua enfermeira, e a sua família dar-lhe-ão todo o apoio necessário durante este período de adaptação. Quem melhor do que eles para o ajudar no seu regresso ao dia-a-dia normal? Por esta razão, é muito importante que exista uma relação de diálogo e confiança com eles, de forma a que possa falar livremente sobre a sua situação.

O cuidar da pele periestomal

A pele periestomal (e o próprio estoma) é especialmente sensível. Por isso é importante cuidá-la bem. Uma pele periestomal em bom estado é fundamental para o seu bem-estar. O seu estoma não deve ser um entrave à sua higiene, devendo por isso, cuidar da sua higiene pessoal como o fazia antes de ser



operado. Pode tomar banho de imersão ou duche, com ou sem o saco colocado, segundo a sua preferência. Se optar por tomar banho com o saco, não se preocupe, pois este não descola e secará rapidamente com a ajuda de uma toalha (lembre-se de proteger o filtro com o autocolante, de forma a evitar que o este se molhe e perca a eficácia).

Prevenir os problemas de pele é bem mais fácil do que tratá-los. Evite que a sua pele sofra. É muito importante saber fazer a higiene do seu estoma; para tal, tenha em consideração os seguintes pontos:

- Lave suavemente a pele periestomal e o estoma, com a ajuda de uma esponja suave, com água morna e sabão com pH neutro.




- Seque bem o estoma e a pele periestomal, sem friccionar, mantenha a pele que está debaixo do saco, limpa e seca.



- Não use substâncias irritantes para a pele à volta do estoma, como por exemplo: perfume, álcool, éter, antissépticos ou sabões agressivos.

- Se os pêlos em redor do estoma são abundantes, corte-os com uma tesoura (não utilize gilete ou creme depilatório).

- Não utilize qualquer tipo de creme gordo, pois pode impedir a boa aderência dos dispositivos.

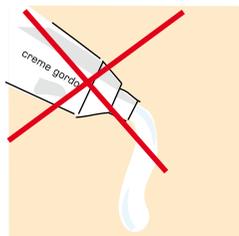

- Utilize um sistema de ostomia (saco) que lhe proporcione a segurança de ter uma pele bem cuidada. Por isso, utilize produtos que sejam capazes de proteger a pele.

Contacte a sua enfermeira ou médico, se o seu estoma apresentar qualquer alteração, se tiver diarreia, ou se a sua colostomia não funcionar durante alguns dias.


Tipos de dispositivos

Os dispositivos são hoje concebidos especialmente para que não tenha qualquer tipo de preocupações relativamente à sua segurança, discrição e conforto.


O material protector cutâneo – Stomahesive® – que fixa o dispositivo ao seu corpo, é feito à base de substâncias que, para além de permitirem que a sua pele permaneça em bom estado, lhe oferecem uma óptima aderência.

Por outro lado, o material de que são feitos os sacos é perfeitamente estanque, flexível, macio e constitui uma barreira perfeita contra os cheiros. Para reforçar a sua eficácia na eliminação dos cheiros, têm incorporado um filtro de carvão activado. Ninguém, a não ser você, saberá que usa um saco e ninguém sentirá incómodo algum em estar ao seu lado.


Tem à sua disposição três tipos de dispositivos para colostomia:

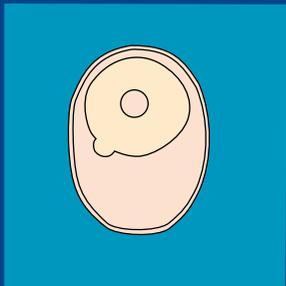

Sistema de Uma Peça – neste tipo de dispositivo, o saco é auto-aderente e tem uma base de protector cutâneo – Stomahesive® – que permite uma perfeita aderência à pele. Assim, quando se muda o saco, o sistema é removido como um todo.

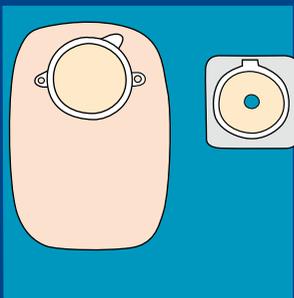

Sistema de Duas Peças – este sistema, tal como o nome indica, é constituído por dois componentes: o saco e o penso protector cutâneo. Assim, pode mudar-se o saco sempre que for necessário, sem descolar o penso protector cutâneo durante alguns dias (2-3 dias).

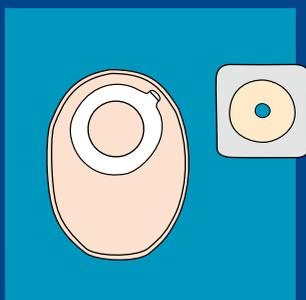

Sistema com Tecnologia de Fixação Adesiva – ACT* – trata-se de um sistema para ostomias com uma nova tecnologia, que permite reunir todas as vantagens dos sistemas acima descritos.

É constituído por um penso protector cutâneo e por um saco, mas não apresenta qualquer aro ou anel plástico.



As suas principais características são a simplicidade, a segurança, a protecção cutânea, a comodidade e a discrição.

*Adhesive Coupling Technology

Aplicação dos dispositivos


Como aplicar o Sistema de Uma Peça

- 1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- 2.** Medir o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas.
- 3.** Tratando-se de um saco recortável, deve desenhar a forma do estoma sobre o papel de protecção, recortando-o depois com uma tesoura de extremidades curvas.
- 4.** No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o saco.
- 5.** Destacar o papel protector e aplicar o saco de baixo para cima, ao longo da pele periestomal.

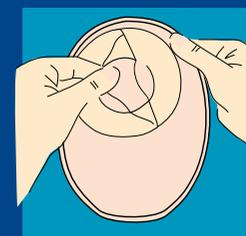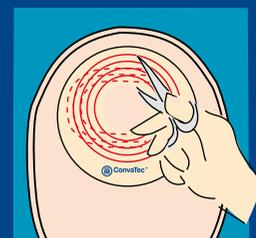





6. Com a ajuda do calor das mãos, adaptar correctamente a parte adesiva – protector cutâneo – ao estoma.

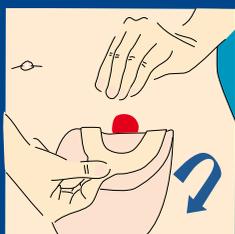


7. Para retirar o saco, faça-o de cima para baixo com as duas mãos, em que uma segura o protector e a outra apoia a pele a fim de evitar irritações.

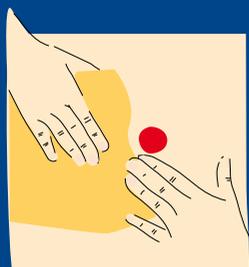

8. Quando retirar o saco deve limpar novamente a pele, como já foi explicado anteriormente.

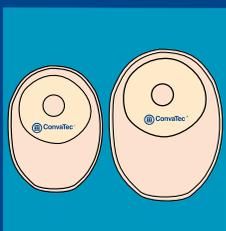

Esteem® Plus está disponível em dois tamanhos, para se adaptar melhor às suas necessidades particulares do dia-a-dia. Por exemplo, em momentos de convívio social, se for à praia, ou se for passear, poderá utilizar um saco mais pequeno, que lhe dará mais discrição e mais conforto.

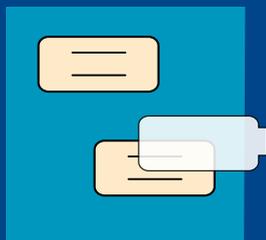

Esteem® Plus proporciona um novo filtro, que apresenta uma boa eficácia na eliminação dos odores, permitindo a saída de gases, evitando obstruções, e prolongando o tempo de utilização do saco.

Como utilizar o Sistema de Duas Peças



1. Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.


2. Meça o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas, e desenhe-o no papel protector do penso.

3. Recorte o orifício central até ao diâmetro desejado.

4. No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o penso protector cutâneo.

5. Retirar o papel protector e aplicar o penso sobre o estoma, com a ajuda do calor das mãos, para adaptar correctamente a parte adesiva – protector cutâneo – ao estoma.

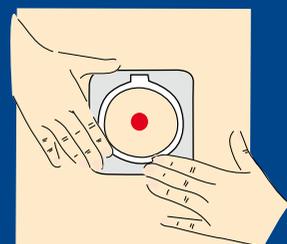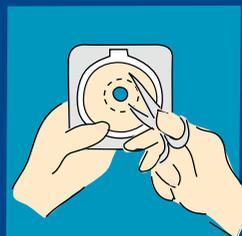


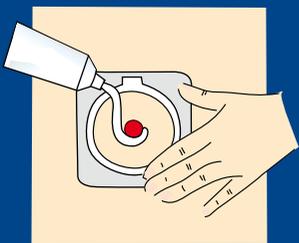

6. Aplique Stomahesive® sobre a pele periestomal no interior do aro, para obter maior protecção cutânea e segurança na fixação do penso.



7. Encaixe o saco no penso, exercendo pressão nos aros e assegurando-se de que fica bem preso. Para retirar o saco, e no caso de estar a utilizar o sistema ConSecura®, basta pressionar para a direita ou esquerda, a patilha de segurança do fecho automático e removê-lo, sem necessidade de fazer força. Caso esteja a utilizar o sistema Natura®, deve segurar na placa com uma mão, e com a outra retirar o saco.

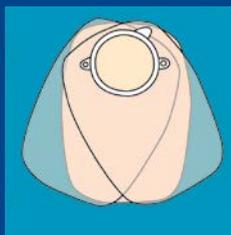

8. Com o Sistema ConSecura®, sempre que necessário, pode orientar ou mudar a posição do saco, fazendo-o girar sem ter de o separar do aro, como por exemplo, quando estiver na cama.



9. O penso pode permanecer na pele vários dias. Será você, melhor do que ninguém, que decidirá quando o deve retirar e substituir por um novo. Ao fazê-lo, descole o penso pela parte superior, usando as duas mãos, em que uma segura o penso e a outra apoia a pele circundante, de forma a que o processo seja o mais delicado possível para a pele.

Quando retirar o penso, deve limpar cuidadosamente a pele, como foi explicado em cima, e aplicar um novo penso e saco.

Como utilizar o Sistema de Fixação Adesiva – ACT* – Esteem synergy® Plus

Este sistema combina as vantagens dos sistemas de uma e de duas peças.




1. Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.

2. Meça o diâmetro à volta do estoma.

3. Recorte o penso pela medida exacta do estoma.

4. Retire o papel de protecção. Verifique se a base de fixação transparente está limpa e seca.


5. Aplique o penso.

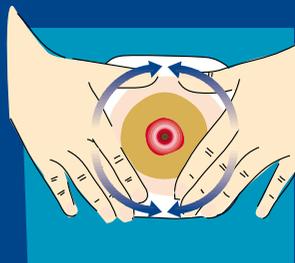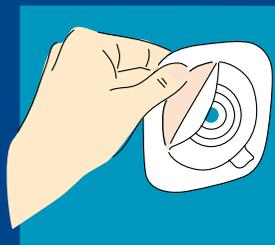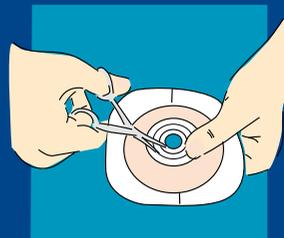


*Adhesive Coupling Technology



6. Retire o papel siliconado do anel adesivo do saco.

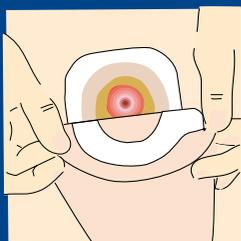


7. Segure o saco por fora do anel adesivo e dobre-o. Alinhe o bordo inferior do anel adesivo do saco com a parte inferior da base de fixação transparente do penso.

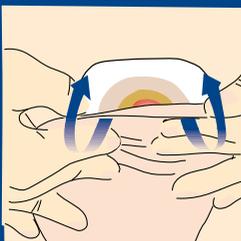

8. Aplique o saco com um movimento rotativo de baixo para cima.



9. Para avaliar se o saco está seguro à base de fixação, deve correr o dedo ao redor do anel adesivo do saco.

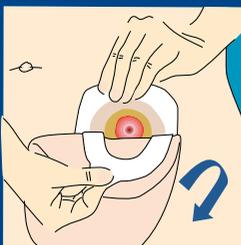

10. Para retirar o saco, segure a base de fixação transparente do penso com uma mão, enquanto com a outra descola o saco, através da aba do anel de fixação.

Alimentação

O nosso conselho é: Coma de tudo como dantes! Ou seja, se antes da operação seguia alguma dieta, provavelmente deverá continuar com essa dieta. Se comia de tudo sem restrições, o mais certo é que continue assim.

Existem no entanto, algumas regras básicas de alimentação, que ajudam a manter o seu organismo mais saudável, vivendo melhor com a sua ostomia.

É aconselhável que vá experimentando um alimento diferente de cada vez, para saber qual o seu efeito. Se se der bem, continue a comê-lo. Se não, é melhor retirá-lo dos seus hábitos alimentares. Assim, em pouco tempo, saberá reconhecer o tipo de alimentos que mais lhe convêm.

É importante recordar que todos nós deveríamos beber 1,5 a 2 litros de água por dia.

É também importante realçar, que a sua alimentação deve incluir alimentos ricos em fibras, como as frutas, verduras e legumes, pois ajudam a regular o trânsito intestinal, contribuindo para uma regularidade das



dejecções, bem como para diminuir a frequência de diarreias ou de “prisão de ventre”.

Damos nesta tabela, alguns conselhos importantes para a sua alimentação.

| Alimentos que “prendem” o intestino | | | |
|--|-------------|-----------------|--|
| Arroz | Queijo seco | Batata | |
| Frutos secos | Banana | Compota de maçã | |

| Alimentos que podem provocar diarreia | | | |
|--|----------|----------------|---------|
| Leite | Feijão | Figos | Ameixas |
| Morango | Melancia | Laranja | Kiwi |
| Cerveja | Vegetais | Gorduras cruas | |

| Alimentos que provocam mais cheiro nas fezes/gases | | | |
|---|--------|--------|-------|
| Ovos | Cebola | Queijo | Peixe |
| Espargo | Alho | Café | Couve |

| Alimentos que diminuem o cheiro das fezes/gases | | | |
|--|-------|------------|--------|
| logurtes | Salsa | Espinafres | Alface |

| Alimentos que irritam o estoma | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Condimentos fortes | Sumo de fruta ácida |

| Alimentos que provocam gases | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| Feijão | Ervilhas | Legumes | Cebolas |
| Pão | Bolos | Chocolates | Fermentos |
| Cerveja | Refrigerantes | | |

Aconselhamos que desfrute bem a sua refeição, comendo sem pressas e mastigando bem os alimentos.



Informações de interesse

Comparticipações

Os dispositivos são comparticipados por lei, sendo a percentagem variável de acordo com o sistema de protecção social de cada um.

Benefícios Fiscais

Existe legislação aplicável aos ostomizados, tendo sido estabelecidos benefícios em diversas áreas.

Vestuário

Se quiser pode usar a última moda! Ou se preferir, use o mesmo estilo que usava antes. Os sacos modernos são extremamante discretos. Por isso,

descanse, pois não se notará nada. Deve apenas ter a precaução de não colocar cintos, elásticos ou roupas muito apertadas por cima do estoma, para se sentir mais confortável.

Desporto e Tempos-livres

Pode e deve praticar exercício físico! É claro que não lhe dizemos para fazer boxe ou para lançar o dardo. Mas actividades como correr, andar de bicicleta, nadar ou jardinagem, são totalmente recomendáveis. Se decidir praticar um desporto ou uma actividade que exija um grande esforço físico, deverá consultar o seu médico ou enfermeiro estomaterapeuta.

Viagens

Pode viajar à vontade e sempre que o desejar! Quando for viajar, apenas não se esqueça de preparar um pequeno estojo (pequena maleta) que contenha todo o material necessário para cuidar do seu estoma, durante o período em que estiver fora de casa (para se sentir mais seguro leve sempre mais material do que normalmente necessita). Aconselhamos que leve sempre este material na sua bagagem de mão, pois em caso de extravio das malas, estará sempre prevenido.

A quem pode recorrer em caso de dúvida

Relembramos que existem profissionais de saúde à sua disposição, para lhe dar conselhos, e toda a informação que diz respeito aos cuidados com o estoma, e à sua vida depois da operação. Certamente que o seu cirurgião, o seu enfermeiro estomaterapeuta, os enfermeiros que o assistem ou o seu médico de família dar-lhe-ão toda a ajuda de que necessitar. Existem actualmente associações que defendem os direitos dos ostomizados, e que lhe oferecem a possibilidade de participar em reuniões informativas, bem como apoiá-lo sempre. Pode ainda contar connosco – **ConvaTec®**. Pelo nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida do ostomizado, desenvolvemos os melhores produtos para satisfazer as suas necessidades, e oferecemos um **Serviço de Informação Profissional**, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua ostomia, bem como orientá-lo na utilização e aquisição do seu material. Este serviço conta com uma larga experiência e está ao seu inteiro dispor, através de uma linha telefónica gratuita. Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite em contactar-nos!



e-mail: infotec@convatec.com

Anotações do profissional

Nome do profissional

Data da intervenção

Tipo de intervenção


Outros dados relevantes

Diâmetro do estoma

Produto aconselhado

Data da próxima consulta

Aparelho digestivo

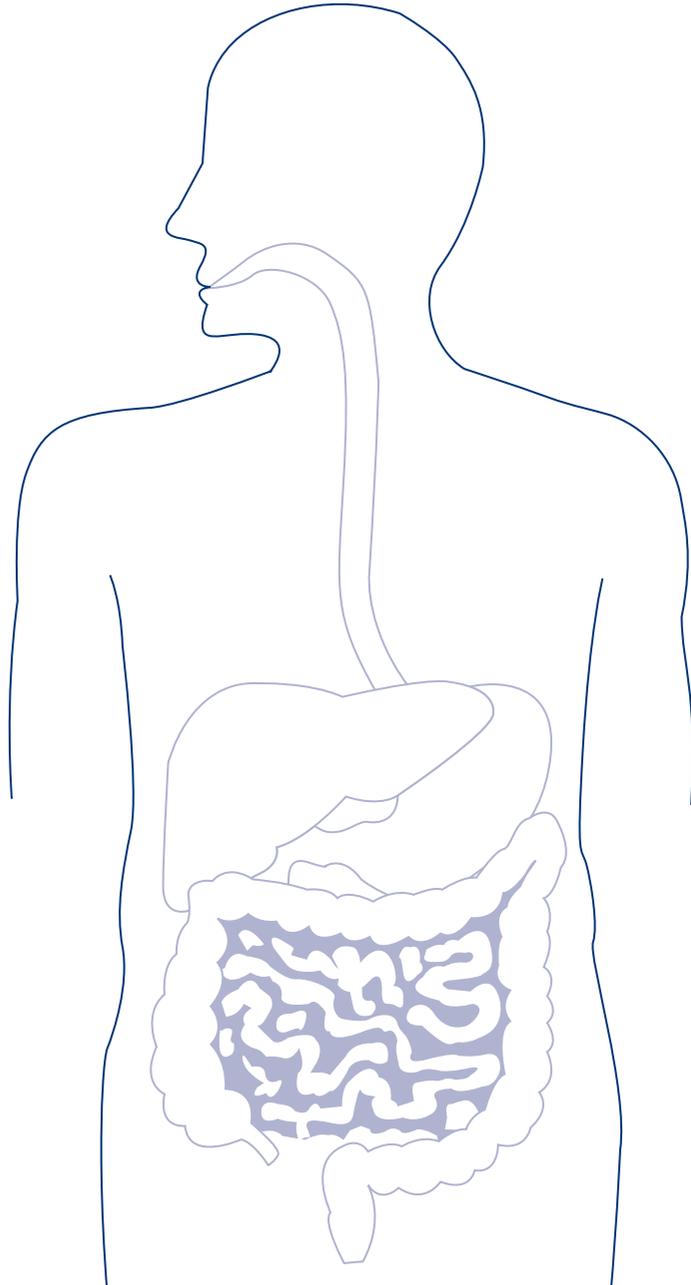

Gama de Dispositivos para Colostomia

Sistemas de Uma Peça

| PRODUTO | | CNP |
|--------------------------|----------------------------|---------|
| ESTEEM® PLUS | | |
| Transparente Recortável | Rec. de 20/70mm (30 sacos) | 6210500 |
| Opaco Grande Recortável | Rec. de 20/70mm (30 sacos) | 6210518 |
| Opaco Pequeno Recortável | Rec. de 20/70mm (30 sacos) | 6210526 |
| Opaco Grande | Rec. de 25mm (30 sacos) | 6210476 |
| | 30mm (30 sacos) | 6210484 |
| | 35mm (30 sacos) | 6210492 |
| | 40mm (30 sacos) | 6211300 |
| | 50mm (30 sacos) | 6211318 |



COLOHESIVE® PLUS

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Opaco Fechado | Rec. de 19/64mm (30 sacos) | 6659128 |
| | 32mm (30 sacos) | 6684399 |
| | 38mm (30 sacos) | 6681825 |
| | 45mm (30 sacos) | 6684415 |
| | 50mm (30 sacos) | 6684423 |
| Transparente Fechado | Rec. de 19/64mm (30 sacos) | 6659136 |
| | 32mm (30 sacos) | 6685719 |
| | 38mm (30 sacos) | 6685727 |
| | 45mm (30 sacos) | 6685735 |
| | 50mm (30 sacos) | 6685743 |
| A Opaco Fechado | Rec. de 19/45mm (30 sacos) | 6684431 |
| Stoma Cap Fechado | Rec. de 19/50mm (30 dispositivos) | 6685388 |



Sistemas de Duas Peças

PRODUTO CNP

CONSECURA® AUTOLOCK



| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| Opaco Fechado c/ Filtro | 45mm (30 sacos) | 7879379 |
| | 57mm (30 sacos) | 7879387 |
| | 70mm (30 sacos) | 7893719 |
| Transparente Fechado c/ Filtro | 45mm (30 sacos) | 7879395 |
| | 57mm (30 sacos) | 7879403 |
| | 70mm (30 sacos) | 7879411 |

Penso Stomahesive®



| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| Penso Stomahesive® | 35mm (5 pensos) | 7893743 |
| | 45mm (5 pensos) | 7893750 |
| | 57mm (5 pensos) | 7893768 |
| | 70mm (5 pensos) | 7893776 |

Penso Flexível



| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| Penso Flexível | 35mm (5 pensos) | 7879239 |
| | 45mm (5 pensos) | 7879247 |
| | 57mm (5 pensos) | 7879254 |
| | 70mm (5 pensos) | 7879262 |

NATURA™+




| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| Saco fechado opaco | 32mm (30 sacos) | 6990010 |
| | 38mm (30 sacos) | 6990028 |
| | 45mm (30 sacos) | 6990036 |
| | 57mm (30 sacos) | 6990044 |
| | 70mm (30 sacos) | 6990051 |

Sistemas de Duas Peças

| PRODUTO | | CNP |
|---|---|---|
| NATURA™ + | | |
| Penso flexível | 32mm (5 pensos) | 6990127 |
| | 38mm (5 pensos) | 6990135 |
| | 45mm (5 pensos) | 6990143 |
| | 57mm (5 pensos) | 6990150 |
| | 70mm (5 pensos) | 6990168 |
| Penso Stomahesive® | 32mm (5 pensos) | 6990184 |
| | 38mm (5 pensos) | 6990192 |
| | 45mm (5 pensos) | 6990200 |
| | 57mm (5 pensos) | 6990218 |
| | 70mm (5 pensos) | 6990226 |
| Penso moldável flexível | estoma 13mm-22mm/ saco 45mm (5 pensos) | 6990267 |
| | estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos) | 6990275 |
| | estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos) | 6990283 |
| | estoma 45mm-56mm/ saco 70mm (5 pensos) | 6990291 |
| | Penso moldável convexo | estoma 13mm-22mm/ saco 45mm (5 pensos) |
| estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos) | | 6990242 |
| estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos) | | 6990259 |
| Penso Durahesive® convexo | 19/45mm (5 pensos) | 6990069 |
| | 22/45mm (5 pensos) | 6990077 |
| | 25/45mm (5 pensos) | 6990085 |
| | 28/45mm (5 pensos) | 6990093 |
| | 32/45mm (5 pensos) | 6990101 |
| | 35/45mm (5 pensos) | 6990119 |



Sistemas c/ Tecnologia de Fixação Adesiva – ACT*

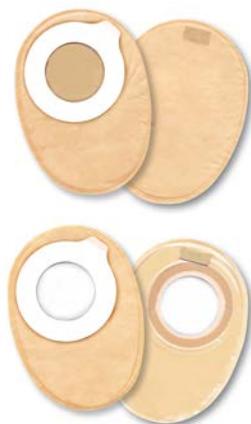

| PRODUTO | | CNP |
|-------------------------------|------------------|---------|
| ESTEEM synergy® PLUS | | |
| Pequeno fechado opaco | 35 mm (30 sacos) | 6210393 |
| | 48 mm (30 sacos) | 6210401 |
| Standard fechado opaco | 35 mm (30 sacos) | 6210419 |
| | 48 mm (30 sacos) | 6210427 |
| | 61 mm (30 sacos) | 6210435 |
| Standard fechado transparente | 35 mm (30 sacos) | 6210443 |
| | 48 mm (30 sacos) | 6210450 |
| | 61 mm (30 sacos) | 6210468 |



| | | |
|----------------|------------------------------------|---------|
| Penso Flexível | 13/35 mm = ø saco 35 mm (5 pensos) | 7919159 |
| | 13/48 mm = ø saco 48 mm (5 pensos) | 7919167 |
| | 13/61 mm = ø saco 61 mm (5 pensos) | 7919175 |



| | | |
|----------|---|---------|
| Penso | ø estoma 13/22 = ø saco 48 mm (10 pensos) | 6185926 |
| Moldável | ø estoma 22/33 = ø saco 48 mm (10 pensos) | 6185934 |
| Flexível | ø estoma 33/45 = ø saco 61 mm (10 pensos) | 6185942 |



| | | |
|---------------|--|---------|
| Penso Convexo | ø estoma 13/22 = ø saco 35 mm (5 pensos) | 6118919 |
| Moldável | ø estoma 22/33 = ø saco 48 mm (5 pensos) | 6118927 |
| Flexível | ø estoma 33/45 = ø saco 61 mm (5 pensos) | 6118935 |



| | | |
|--------------|------------------------------------|---------|
| Penso | 13/35 mm = ø saco 35 mm (5 pensos) | 7919183 |
| Stomahesive® | 13/48 mm = ø saco 48 mm (5 pensos) | 7919191 |
| | 13/61 mm = ø saco 61 mm (5 pensos) | 7919209 |

Acessórios

PRODUTO CNP

STOMAHESIVE® SEAL

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|
| Anel Moldável de Proteção Cutânea | Fino 48mm (cx. 10) | 6412601 |
| Anel Moldável de Proteção Cutânea | 98mm (cx. 10) | 6412619 |



STOMAHESIVE®

| | | |
|-------|-----|---------|
| Pasta | 60g | 6640813 |
|-------|-----|---------|



| | | |
|-------------------------|--|---------|
| Kit de Irrigação c/cone | | 6730796 |
|-------------------------|--|---------|



| | | |
|--------------------|---------------------|---------|
| Manga de Irrigação | 10 mangas + 2 clips | 6730804 |
|--------------------|---------------------|---------|



NILTAC®

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Spray Removedor de adesivo médico | (50 ml) | 6299099 |
| Toalhetes Removedor de adesivo médico | (cx 30) | 6299107 |



SILESSÉ™

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Toalhetes Protector cutâneo | (cx 30) | 6299123 |
| Spray Protector cutâneo | (50ml) | 6299115 |



DIAMONDS®

| | | |
|--|------------|---------|
| Saquetas de Gelificante Super-Absorvente | 100 unids. | 6299131 |
|--|------------|---------|



| | | |
|-------|-----------|---------|
| CINTO | (1 cinto) | 6745745 |
|-------|-----------|---------|

