




NATURA™


PLACCA A SOFFIETTO CON TECNOLOGIA MODELLABILE



1
Arrotola l'adesivo verso l'esterno con i polli **senza tirarlo o tagliarlo**. Riproduci approssimativamente le dimensioni della stomia. Schiaccia l'adesivo arrotolato

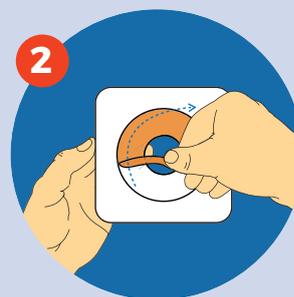


2
Rimuovi la carta protettiva trasparente e applica la barriera alla cute, centrando la stomia

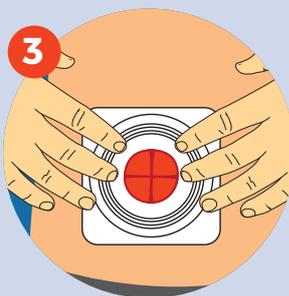

3
Avvicina l'adesivo ai contorni della stomia in modo da non lasciare spazi vuoti. Rimuovi la carta protettiva dal cerotto rosa per completare l'adesione della placca



4
Estrai il soffierto inserendo le dita tra questo e la placca

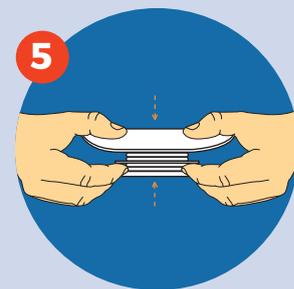

5
Aggancia la sacca alla placca esercitando pressione su tutta la circonferenza del soffierto. Quindi, riporta il soffierto nella posizione originale

Disponibile per il sistema due pezzi con flangia Natura®

Per maggiori informazioni, contatta il numero verde gratuito **800.930.930** dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com
www.convatec.it

*Numero verde destinato ad assistenza tecnica

®/TM sono marchi registrati di Convatec Inc. © 2016 Convatec Inc.,

Dispositivo medico **CE** Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso

