



ConvaTec

# ConvaCare® 2

## Gaziki z płynem ochroniającym



## Gaziki ConvaCare® z płynem ochroniającym

- ◆ tworzą ochronną, zabezpieczającą warstwę na skórze wokół stomii
- ◆ ułatwiają gojenie zmian skórnych
- ◆ zwiększają przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego
- ◆ gwarantują pewność i poczucie bezpieczeństwa pacjenta

## Gaziki z płynem ochroniającym



1. Po zdjęciu sprzętu stomijnego dokładnie umyj skórę wokół stomii i samą stomię z pozostałości treści jelitowej lub moczu. Jeśli na skórze znajdują się ślady przyklepca, zmyj je za pomocą brązowych gazików **ConvaCare® do zmywania skóry wokół stomii** (po ich zastosowaniu skórę NALEŻY umyć, usuwając tłusty osad).



2. Następnie dokładnie przetrzyj skórę wokół stomii (bez dotykania samej stomii) **gazikiem ConvaCare® z płynem ochroniającym**. Gazik nasączony jest specjalnymi substancjami, które po wyschnięciu tworzą na skórze ochronną warstwę ułatwiającą przyklejanie sprzętu stomijnego i zwiększającą jego przyleganie do skóry. Jednocześnie warstwa ochronna pozwala skórze oddychać, chroniąc ją przed maceracją i odparzeniami.



3. Kiedy płyn ochroniający przeschnie na skórze, tworząc zabezpieczającą warstwę, przyklej płytkę stomijną lub worek z przyklepcem. **Gaziki ConvaCare® z płynem ochroniającym** zapewniają ochronę skóry oraz łagodzą podrażnienia.