



# MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF DE FERMETURE DE SAC SANS ATTACHE InvisiClose<sup>MD</sup>

Ce mode d'emploi s'applique aux appareillages pour stomies Natura<sup>MD</sup> et Esteem synergy<sup>MD</sup> munis du dispositif de fermeture de sac sans attache InvisiClose<sup>MD</sup>.

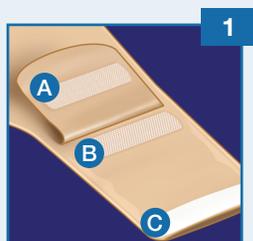


## FERMETURE DU SAC


1. Le dispositif de fermeture de sac sans attache InvisiClose<sup>MD</sup> comprend un rabat de sécurité **A**, un dispositif de fermeture par pression et glissière **B** et des languettes **C**.

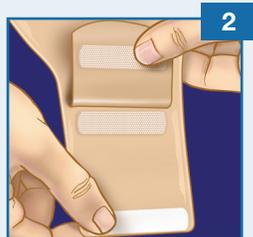

2. Relever le rabat de sécurité sur le devant du sac, exposant ainsi le dispositif de fermeture par pression et glissière.

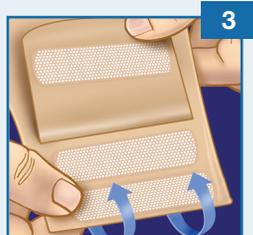

3. Replier l'extrémité du sac quatre fois sur elle-même, en s'assurant que les parties du dispositif de fermeture par pression et glissière sont alignées.

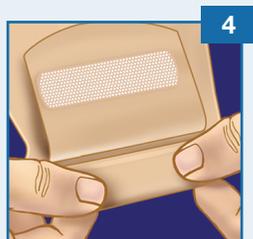

4. Appuyer fermement sur toute la surface du dispositif de fermeture; un clic indique qu'elles sont bien verrouillées.



5. Replier le rabat de sécurité vers l'arrière du sac (**côte du corps**). Appuyer fermement sur toute la surface; un clic indique que le rabat est bien verrouillé.


# MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF DE FERMETURE DE SAC SANS ATTACHE

## InvisiClose<sup>MD</sup>



### VIDANGE DU SAC

6. Soulever l'extrémité du sac et le retourner vers soi (**côte du corps**). Soulever délicatement le rabat de sécurité vers soi (vers le haut) afin de le déverrouiller.

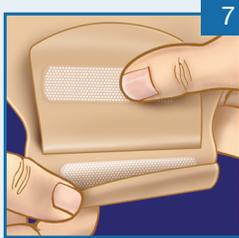

7. Tout en maintenant le rabat de sécurité contre le devant du sac, soulever un coin de chaque languette de fermeture pour la déverrouiller, puis dérouler.



8. Pour faciliter la vidange ou le nettoyage du sac, l'ouvrir en appuyant avec le pouce et l'index sur les deux extrémités des languettes de l'orifice. On peut nettoyer l'extrémité du sac à l'eau et au savon doux. Assécher par tapotements.



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au **[www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)**

Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.

MD indique une marque de commerce de ConvaTec Inc.  
© 2016 ConvaTec Inc.

V583