


# ESTEEM™ Soft Convex

MED TØMBAR UROSTOMIPOSE

## SÅDAN BRUGER DU UROSTOMIPOSEN MED AFTAPNINGSRØR




### 1 SÅDAN LUKKER DU POSEN

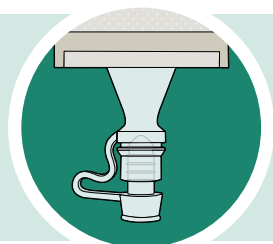


Sørg for at aftapningsrøret er forsvarligt lukket.


### 2 SÅDAN TØMMER DU POSEN

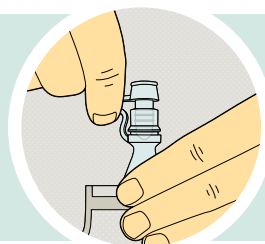

Tilt aftapningsrøret op så det peger opad mod dig selv.

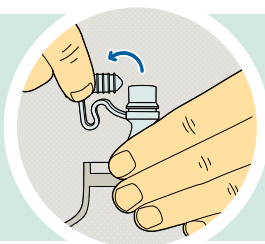


Hold bunden af aftapningsrøret opad med den ene hånd og åben toppen af aftapningsrøret med den anden hånd.

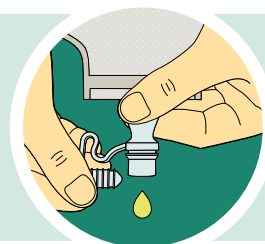


Tøm posen for urin ved at hælde urinen direkte ud i toilettet.

### 3 SÅDAN BRUGER DU KONNEKTOREN

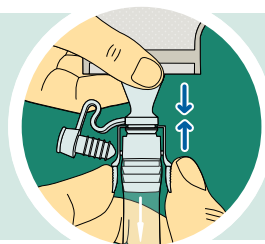

Indsæt forsigtigt den rillede del nederst på aftapningsrøret ind i den bredeste del af mellemstykket med den ene hånd, mens du holder bunden oppe med den anden hånd.

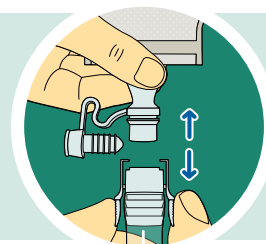

Fjern konnektoren ved at trække bunden fra toppen.

**Få flere oplysninger ved at ringe til os på - 48 16 74 75**  
Der henvises til indlægssedlen for den fuldstændige brugsanvisning.

Esteem Soft Convex er et registreret varemærke i USA.  
© 2019 ConvaTec

