


Little Ones^{MD} de ConvaTec - Mode d'emploi Appareillage à une pièce pour enfant

Commencer par nettoyer la peau autour de la stomie de votre enfant à l'aide d'un savon doux, exempt d'huile, et de l'eau tempérée. Si l'on préfère utiliser des lingettes humides commerciales, en choisir qui ne contiennent ni huiles ni lotions, car ces dernières peuvent nuire à la bonne adhérence de l'appareillage sur la peau. La peau devrait être exempte de tous solvants et de toutes substances grasses. Assécher complètement par tapotements.


Préparation et application de la barrière cutanée et du sac*

1. À l'aide du guide de mesure fourni, prendre la mesure de la base de la stomie. Tracer la mesure choisie sur le papier protecteur de la barrière cutanée en centrant l'ouverture prédécoupée. (Il n'est peut-être pas nécessaire de porter des gants; consulter un professionnel de la santé.)
2. **Important :** Avant de découper l'ouverture, séparer les panneaux avant et arrière du sac afin d'éviter de couper ce dernier. Le sac devrait contenir un peu d'air. Puis, au moyen de ciseaux courbes à branches courtes, couper en suivant le tracé.
3. Découper l'ouverture de la même grandeur que la stomie, en suivant le tracé sur le papier protecteur. Ne pas découper au-delà de la dernière ligne.
4. Retirer le papier protecteur de la barrière cutanée.
5. **Si votre enfant à une colostomie ou une iléostomie et qu'un sac vidable est utilisé, il est recommandé de fermer le sac avant l'application.**

Retirer le papier protecteur de la languette adhésive sur le dispositif de fermeture du sac. Placer le dispositif à environ 6,25 mm (1/4 po) de l'extrémité du sac, du côté opposé à la barrière cutanée. Appuyer pour maintenir en place. Replier l'extrémité du sac quatre fois, en serrant. Puis, toujours en serrant, replier les deux extrémités du dispositif de fermeture vers le côté du sac où se trouve la barrière cutanée. S'assurer que l'extrémité du sac est lisse, bien plate et sans plis.

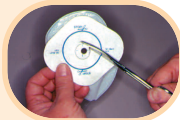

6. **Si votre enfant à une urostomie et qu'un sac pour urostomies est utilisé,** veiller à bien fermer la valve avant l'application. Pour fermer la valve : plier le tube de drainage afin qu'il rejoigne le bouchon; puis, insérer complètement le bouchon dans le tube.
7. Délicatement mettre en place l'appareillage sur la stomie de votre enfant
8. Appuyer sur la barrière cutanée pour l'appliquer solidement sur le corps de votre enfant, en prêtant une attention particulière à la zone péristomiale (autour de la stomie).
9. Pendant la mise en place, maintenir une légère pression sur la barrière cutanée pendant 30 secondes afin de favoriser une meilleure adhérence.

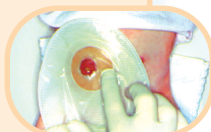

Retrait de l'appareillage*

Pour retirer l'appareillage, préparer une débarbouillette douce ou une serviette en papier humide afin de nettoyer la peau de votre enfant. Saisir le bord de l'appareillage d'une main, tout en appuyant avec précaution sur la peau avec l'autre main. Tirer lentement et délicatement sur la barrière cutanée pour la retirer.

Jeter le sac.



* Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.



SOUTIEN

Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au **1 800 465-6302** ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**



Ne pas oublier de vider le sac de votre enfant lorsqu'il est au tiers plein. Il est déconseillé d'utiliser des savons ou d'autres nettoyants à l'intérieur du sac. Au besoin, rincer avec de l'eau tiède.



ConvaTec
Little Ones™