


## Wat betekenen de lampjes?

De lampjes op de pomp geven aan of er sprake is van een probleem:

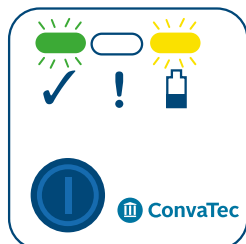


Als het **gele '!**-lampje gaat knipperen, moeten de batterijen binnen 24 uur worden vervangen. Houd de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het pompje uit te schakelen en vervang de batterijen (zie achterzijde). Houd de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het pompje in te schakelen; u ziet dat het groene '✓'-lampje gaat knipperen om aan te geven dat de behandeling weer is gestart. Als de batterijen niet binnen 24 uur worden vervangen, zal het pompje automatisch uitgaan, waardoor de behandeling stilvalt. Het gele '!'-lampje zal knipperen wanneer de blauwe knop wordt ingedrukt.




Het **gele '!'-lampje** gaat knipperen als er sprake is van een luchtlek in het verband en het pompje geen negatieve druk kan uitoefenen. Het pompje gaat dan na 30 seconden uit. Zorg ervoor dat het verband rondom vastzit en strijk eventuele plooiën in de fixatietape en de rand en de rand van het verband glad, waar het lek zich mogelijk heeft voorgedaan. Controleer ook of de connectoren van het slangetje goed zijn vastgedraaid. Houd vervolgens de blauwe knop drie seconden ingedrukt om de behandeling te hervatten; het groene '✓'-lampje gaat nu knipperen. Als het gele '!'-lampje opnieuw gaat knipperen, herhaal dan het gladstrijken en druk opnieuw de blauwe knop in. Als het gele '!'-lampje toch weer knippert, neemt u dan contact op met uw zorgverlener, omdat dan het verband mogelijk moet worden vervangen.

Op de achterzijde van deze folder leest u hoe u de batterij moet vervangen en of u met Avelle een bad of douche mag nemen.


## Praktische vragen en antwoorden

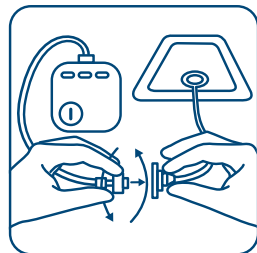

Afb. 1 Druk op de blauwe knop om het pompje uit te schakelen en draai de connectoren los om het verband van het pompje los te koppelen voordat u gaat douchen.

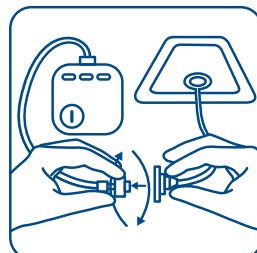

Afb. 2 Draai de connectoren vast om het verband weer op het pompje aan te sluiten. Druk op de blauwe knop om het pompje na uw douche weer te starten.

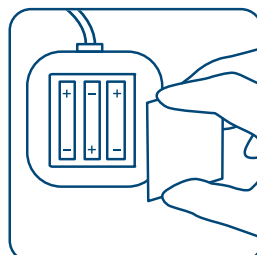

Afb. 3

### Hoe kan ik de batterijen vervangen?

Als het **gele '!'-lampje** gaat knipperen, moeten de batterijen binnen 24 uur worden vervangen. Houd de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het pompje uit te schakelen. Plaats de batterijen aan de achterzijde in het pompje door het klepje van het batterijvak te verwijderen. U hebt 3x batterijen van AAA-formaat nodig (alkaline batterijen aanbevolen). Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst zoals aangeduid in het vakje. Alle lampjes zullen gelijktijdig eenmaal knipperen om aan te geven dat de batterijen correct zijn geplaatst. Plaats het klepje van het batterijvak terug.

### Mag ik een bad of douche nemen?

Een lichte douche is mogelijk, maar het verband mag niet direct in aanraking komen met waterstralen of onder water komen. Voordat u onder de douche gaat, moet het pompje worden afgekoppeld van het verband. Houd daarvoor de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het pompje uit te schakelen (het groene '✓'-lampje stopt met knipperen en gaat uit). Koppel vervolgens het pompje (als dit direct op het verband is aangesloten) of het slangetje los van het verband door de connectoren los te draaien. Leg het pompje op een veilige, droge plaats terwijl u zich wast. Als u zover bent om het pompje weer op het verband aan te sluiten, draai dan de connectoren weer vast en houd de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het pompje in te schakelen. Het groene '✓'-lampje gaat weer knipperen om aan te geven dat het pompje correct werkt.

Voor meer informatie over Avelle kunt u contact opnemen met het ConvaTec Service Team 0800 - 0224460 of kijkt u op [www.convatec.nl](http://www.convatec.nl)

Avelle is een handelsmerk van ConvaTec Inc. ©2016 ConvaTec Inc. AP-016101-MM EM WCON739 Oktober 2016, N040244



# Avelle™

Negatieve druk, positieve kracht

## Systeem voor wondbehandeling met negatieve druk



### Informatie voor patiënten

U heeft deze brochure gekregen omdat uw wond wordt behandeld met Avelle™, een systeem voor wondbehandeling met negatieve druk. Lees deze informatie aandachtig door. Als u vervolgens nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent.



## Wat is het Avelle™-systeem?

Het Avelle™-systeem bestaat uit een wondverband dat is aangesloten op een klein pompje dat zuigkracht uitoefent; dit noemen we wondbehandeling met negatieve druk (NWPT – Negative Wound Pressure Therapy).



### Hoe werkt het?


Het verband wordt op de wond aangebracht en door middel van fixatietape op zijn plaats gehouden. Vervolgens wordt het aangesloten op het pompje. Wanneer deze wordt ingeschakeld, wordt er op het verband zuigkracht uitgeoefend: de lucht onder het verband wordt weggezogen en wondvocht wordt in het verband opgenomen. Deze toepassing van NWPT voor uw wond in combinatie met de afvoer van wondvocht en de bacteriën die daarin zitten, zijn bedoeld om de wondgenezing te ondersteunen.

### Waarom wordt dit op mijn wond toegepast?

Uw zorgverlener heeft besloten dat u mogelijk baat heeft bij het toepassen van NWPT en dat het Avelle™-systeem voor u geschikt is.

### Doet het pijn?

Als u het Avelle™-pompje voor het eerste inschakelt, ervaart u mogelijk een licht trekkend gevoel, maar als er sprake is van pijn moet u dat aan uw zorgverlener laten weten.

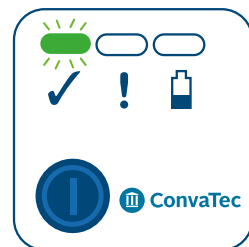

### Hoe weet ik of het systeem correct werkt?


Het **groene** '✓'-lampje knippert doorlopend om aan te geven dat het pompje correct werkt.

## Hoelang moet ik het Avelle-systeem gebruiken?

Dat kan per situatie verschillen. Uw zorgverlener zal met u bespreken hoelang de behandeling in uw geval moet worden aangehouden. Eén verband kan tot zeven dagen blijven zitten en hetzelfde pompje kan tot 30 dagen achtereenvolgend worden gebruikt.

### Moet het verband worden verschoond?

Ja. Hoe vaak het verband verschoond moet worden, varieert per patiënt en hangt sterk af van het type wond dat u hebt en hoeveel wondvocht er vrijkomt. In sommige gevallen kan een verband tot zeven dagen blijven zitten, in andere gevallen is dat korter. Uw zorgverlener kan u vertellen wanneer bij uw wond het verband moet worden verschoond. Het verschoonen kan enig ongemak opleveren. Mocht dat het geval zijn, laat het uw zorgverlener dan weten.

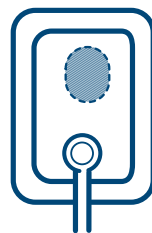

**Verschoond  
correct  
aangebracht.**



**Verschoond  
moet worden  
verschoond.**




**Verschoond  
moet worden  
verschoond.**

### Neem contact op met uw zorgverlener als:

- U irritatie of een toename van pijn ervaart;
- Er wondvocht door/uit het verband lekt;
- U tekenen van bloeden opmerkt;
- De huid rondom de wond rood, warm of pijnlijk wordt;
- Het verband niet goed aansluit of loslaat;
- Als u nog andere vragen heeft.

## Wat doe ik als het pompje niet meer werkt?

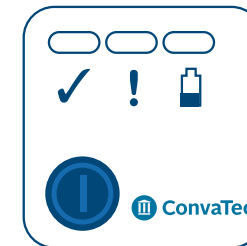

Als er geen enkel lampje meer knippert, houd dan de blauwe knop drie seconden ingedrukt. Als het pompje niet start en geen van de lampjes gaat knipperen, probeer dan of het met nieuwe batterijen lukt.



Als het pompje niet start, ondanks dat u de blauwe knop hebt ingedrukt en de batterijen hebt vervangen, en de twee gele lampjes '!' en '🔋' afwisselend knipperen, dan is de maximale werkingsduur van 30 dagen verstreken en hebt u een nieuw pompje nodig. Neem contact op met uw zorgverlener.

### Moet ik het pompje 's nachts uitschakelen?

Nee. Om te waarborgen dat er doorlopend negatieve druk wordt uitgeoefend, moet het pompje op het verband aangesloten blijven en te allen tijde ingeschakeld blijven (behalve als u zich wast – zie achterzijde). Het systeem werkt geluidsarm en houdt u niet wakker. U dient het pompje op een veilige plaats te leggen tijdens uw slaap, zodat het niet op de grond kan vallen.

### Mag ik het pompje schoonmaken?

Ja. Reinig het pompje door het af te nemen met een zachte doek die is bevochtigd in water met een mild reinigingsmiddel. Bij verontreiniging met lichaamsvloeistoffen: afnemen met isopropylalcohol of antimicrobieel middel op waterbasis. Niet onderdompelen.