




Una semplice misurazione
che può salvare la vita



UnoMeter Abdo-Pressure™

L'importanza di un parametro vitale

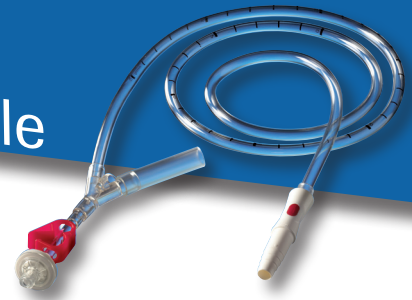

La misurazione ed il monitoraggio costante della pressione intraddominale hanno acquistato un'importanza crescente nel corso degli anni.

Studi recenti evidenziano l'entità del problema e le conseguenze gravi che può avere il mancato monitoraggio della pressione intraddominale¹.



È stato calcolato che la prevalenza di sindrome compartimentale addominale nei reparti di terapia intensiva varia dall'1 al 15%, mentre quella dell'ipertensione intraddominale dal 2 al 33% in relazione alla tipologia dei pazienti, alla durata media della degenza e alle terapie utilizzate^{2 3}.

1. Inneke E, Delaet, Mariska Ravyts, Wesley Vidts, Jody Valk, Jan J. DeWaele, Manu L.N.G. Malbrain, Current insight in intra-abdominal hypertension abdominal compartment syndrome: open the abdomen and keep it open! Langenbeck's Archives of Surgery 2008; 393:833-847.
2. Malbrain ML, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple center epidemiological study. Crit Care Med 2005; 33:315-22.
3. Morken J. Abdominal compartment syndrome in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care Med 2001; 7:268-74.

L'innalzamento patologico della pressione all'interno della cavità addominale coinvolge potenzialmente tutti gli organi, compromettendo il normale funzionamento del sistema cardiovascolare, epatico, gastrointestinale, nervoso centrale e respiratorio.

La WSACS (World Society of the Abdominal Compartment Syndrome) raccomanda che i pazienti ricoverati in terapia intensiva vengano sottoposti ad una analisi dei possibili fattori di rischio per lo sviluppo d'ipertensione addominale o di sindrome compartimentale addominale, preferibilmente al momento del ricovero⁴.

I possibili fattori di rischio sono:

- ▷ Riduzione della compliance della parete addominale
- ▷ Aumentato contenuto intraluminale
- ▷ Aumentato contenuto addominale
- ▷ Alterazione della permeabilità capillare/Rimpiazzo volêmico massivo




In caso siano presenti due o più fattori di rischio, si raccomanda di misurare la pressione intraddominale al momento dell'ammissione in reparto. Qualora si riscontri l'ipertensione intraddominale, è opportuno misurare costantemente la pressione intraddominale durante tutto il periodo di degenza⁵. In particolare si consiglia di effettuare la misurazione almeno 2-4 volte al giorno¹.

4. <http://www.wsacs.org/algorithms.php>

5. M. L. Cheatham, Malbrain ML, Results from International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome, II Recommendations, Intensive Care Med 2007; 33:951-962.

UnoMeter Abdo-Pressure™

Un design unico ed una soluzione pratica per misurare la pressione intraddominale tramite catetere vescicale.

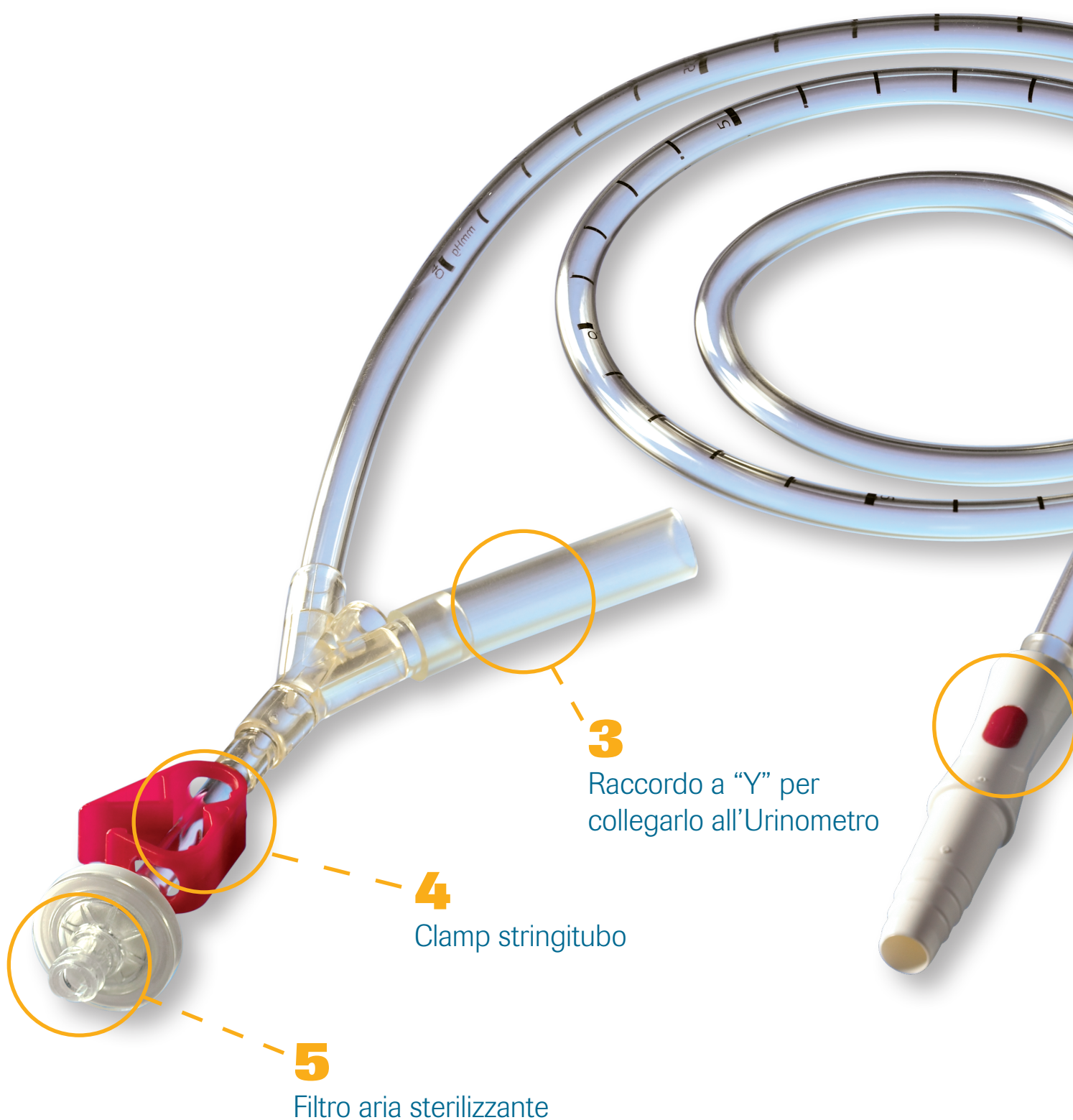

**Misurare la pressione
intraddominale non è mai stato
così facile!**

1

Tubo manometrico con scala in mmHg

2

Connettore al catetere Foley con porta di campionamento senza ago (KombiKon)

BENEFICI:

Possibilità di monitorare la pressione intraddominale in modo:

▷ **SEMPLICE**

tramite catetere vescicale, non necessita di trasduttore

▷ **VELOCE**

dalla lettura immediata, non necessita di ulteriori accessori

▷ **PRECISO ED AFFIDABILE**


scala premarcata graduata già in mmHg

▷ **ECONOMICO**


dispositivo per ogni singolo paziente, resta in situ quanto il catetere Foley

Modalità di utilizzo


**Ciascuna misurazione
richiede meno di 10 secondi...**

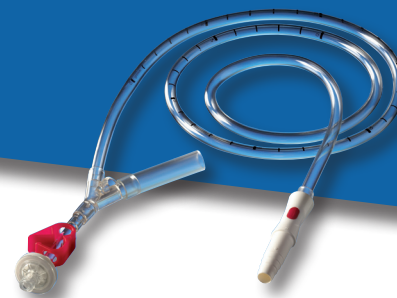


Installazione (preparazione del prodotto)

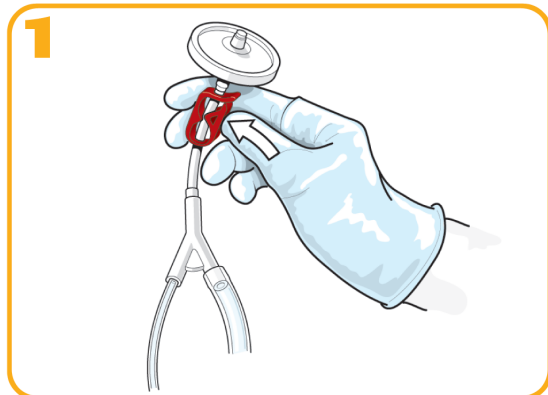

1 Estrarre UnoMeter™ Abdo-Pressure™ dalla confezione e chiudere la clamp rossa.

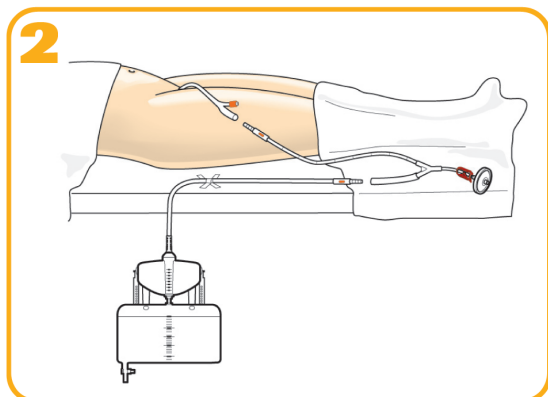


2 Connettere l'UnoMeter Abdo-Pressure da una parte al catetere foley e dall'altra all'urinometro. Posizionare il tubo intorno alla gamba del paziente evitando inginocchiamenti del tubo

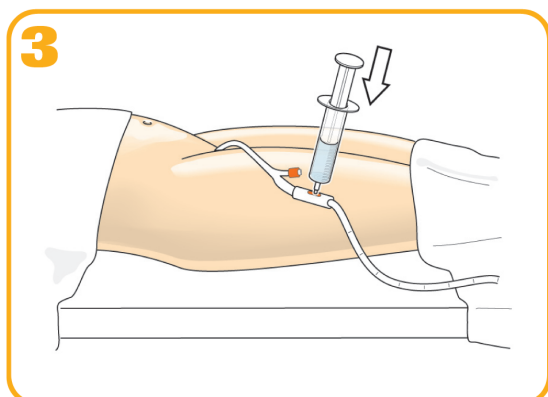


3 Iniettare all'interno del tubo 20 ml di soluzione fisiologica attraverso la porta di campionamento senza ago (KombiKon)


Misurazione (da ripetere)

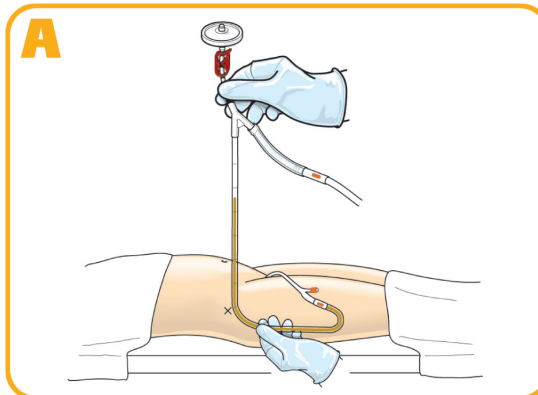

A Sollevare verso l'alto il tubo manometrico. Posizionare lo zero all'altezza della sinfisi pubica (contrassegnare con una x il punto di riferimento sul paziente)

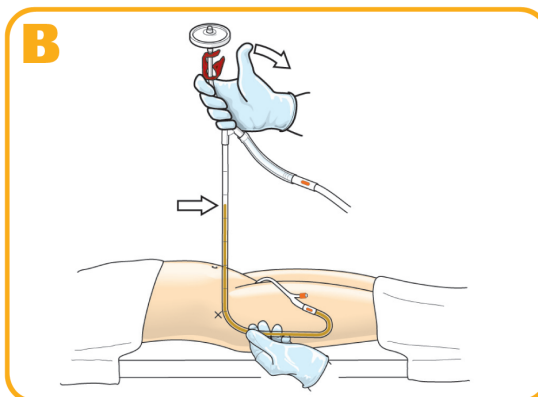


B Aprire la clamp di colore rosso e misurare la pressione intraddominale

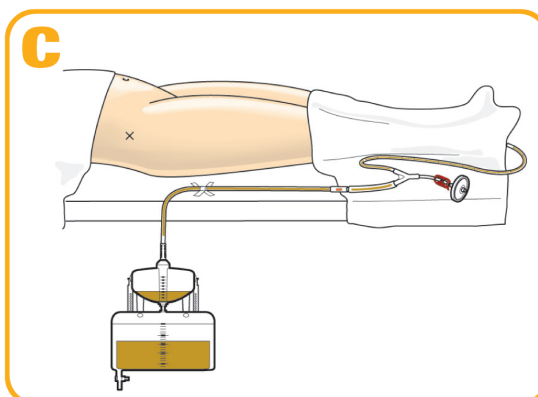

C Chiudere la clamp di colore rosso. Posizionare il tubo intorno alla gamba del paziente evitando inginocchiamenti del tubo

L'Abdo-Pressure™ esiste anche nella versione preconnessa all'Urinometro

Piccoli dettagli fanno la grande differenza...

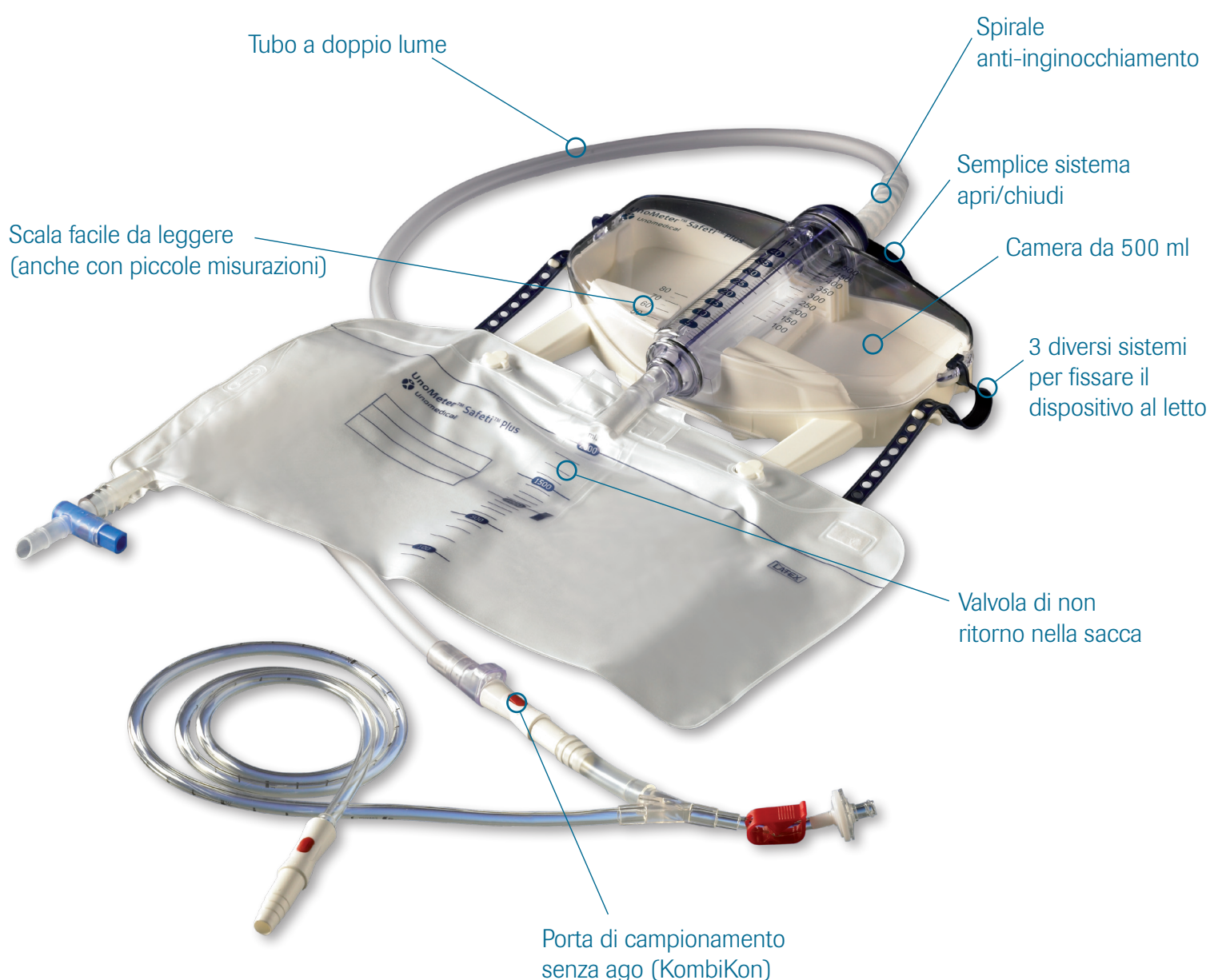

CODICI PRODOTTO

Abdo-Pressure™

Abdo-Pressure™	158100110190
Abdo-Pressure™ KIT (comprende UnoMeter™ Safeti™ Plus)	158100910190

UnoMeter™ Safeti™ Plus

UnoMeter™ Safeti™ Plus 2L Sacca Fissa, Ganci e linguette di fissaggio, 150 cm	158101310190
UnoMeter™ Safeti™ Plus 2L Sacca Fissa, Ganci e linguette di fissaggio, 110 cm	158100510190
UnoMeter™ Safeti™ Plus 1,5L Deconnettibile, Ganci e linguette di fissaggio, 150 cm	158100710190
UnoMeter™ Safeti™ Plus 1,5L Deconnettibile, Ganci e linguette di fissaggio, 110 cm	158101110190

Sacca di ricambio

Sacca di ricambio 1,5 L	30 810 1 S-90
Sacca di ricambio 3,5 L	47 810 1 S-90

ConvaTec Italia s.r.l.

Via Mario Bianchini 60
00142 Roma

Info 800.930.930
Fax ordini 800.508.140

TM/® sono marchi di proprietà di ConvaTec Inc.

© 2011 ConvaTec Inc.