
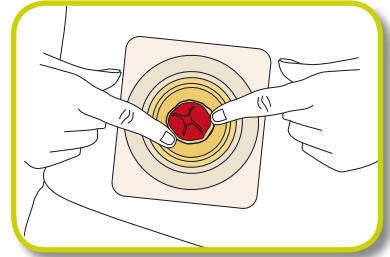
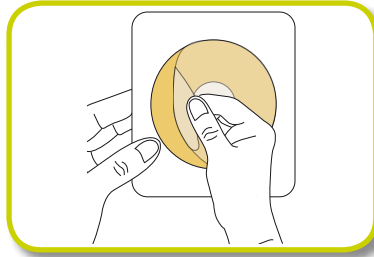


# Natura® Placca a Soffietto con Tecnologia Modellabile

## 1 Prepara e applica la barriera cutanea a soffietto


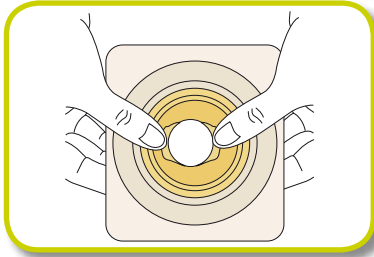


**Non rimuovere** la carta protettiva trasparente sul retro della placca. Arrotola l'adesivo verso l'esterno con i pollici **senza tirarlo o tagliarlo**. Riproduci approssimativamente le dimensioni della stomia. Schiaccia l'adesivo arrotolato, in modo da mantenerne le dimensioni che hai personalizzato

Rimuovi la carta protettiva trasparente e applica la barriera alla cute, centrando la stomia

Avvicina l'adesivo ai contorni della stomia in modo da non lasciare spazi vuoti. Rimuovi la carta protettiva dal cerotto rosa per completare l'adesione della placca


## 2 Applica la sacca

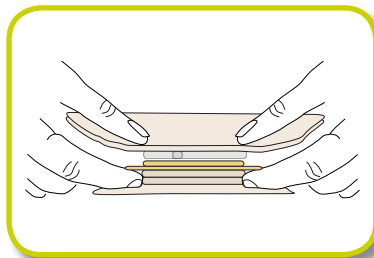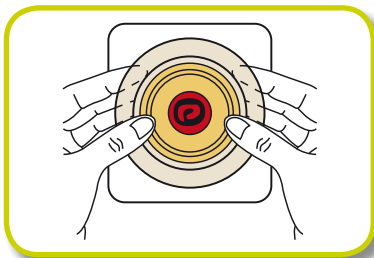

Estrai il soffietto inserendo le dita tra questo e la placca

Aggancia la sacca alla placca esercitando pressione su tutta la circonferenza del soffietto. Quindi, riporta il soffietto nella posizione originale

*Pagina depositata al Ministero della salute il 15/05/2014*


Disponibile per il sistema due pezzi con flangia Natura® 

Per maggiori informazioni, contatta il numero verde gratuito **800.930.930\*** dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo [convatel.italia@convatec.com](mailto:convatel.italia@convatec.com)

[www.convatec.it](http://www.convatec.it)

\*Numero verde destinato ad assistenza tecnica

®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc. © 2014 ConvaTec Inc.

Dispositivo medico  Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

**ConvaTec** 