





NATURA^{MD}


avec barrières cutanées
prédécoupées et à découper

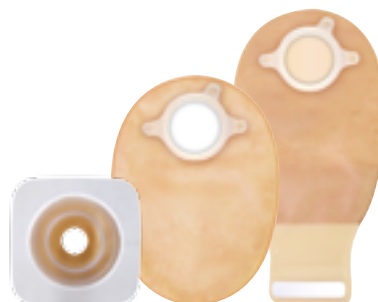


1 Application de la barrière cutanée

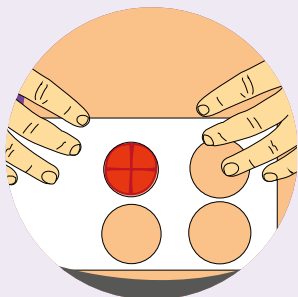


Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée de la taille appropriée.

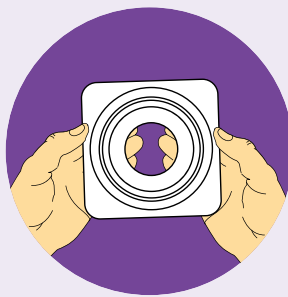

Barrières cutanées prédécoupées :
Choisir une barrière cutanée avec une ouverture prédécoupée légèrement plus grande que la stomie.

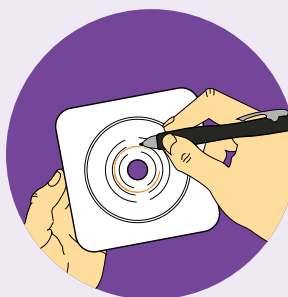


Barrières cutanées à découper :
Tracer le contour de la stomie au centre du papier protecteur transparent au dos de la barrière cutanée, puis découper une ouverture d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre de plus que le tracé.

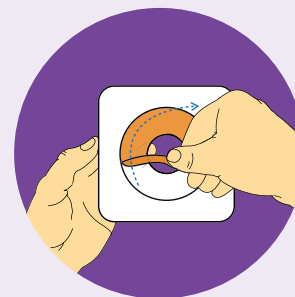


Retirer le papier protecteur et centrer la stomie dans l'ouverture. Appliquer sur une peau propre et asséchée.

2 Application et port du sac

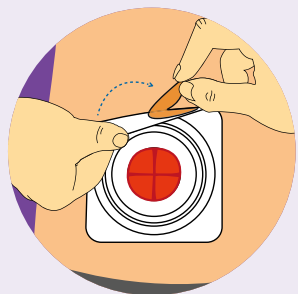

Au besoin, retirer le papier protecteur blanc de la bordure adhésive.

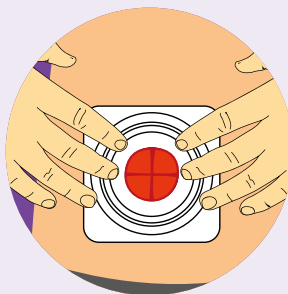

En éliminant les plis, appuyer délicatement sur la barrière cutanée pour qu'elle adhère à la peau.



Séparer les deux parois du sac pour laisser entrer un peu d'air.




Placer le sac sur la barrière cutanée. Joindre les deux collerettes en appuyant délicatement, du bas vers le haut, jusqu'à ce que l'on entende le « clic » et sente sous les doigts que toute la circonférence de la collerette du sac est bien encastrée dans la collerette de la barrière cutanée.


Toujours vérifier si le couplage s'est effectué sur toute la circonférence; sinon, retirer le sac et recommencer.

3


Fermeture du sac

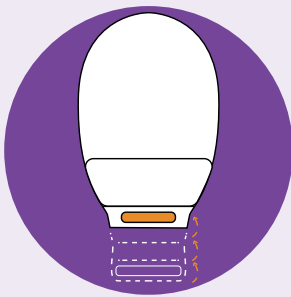

Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent.

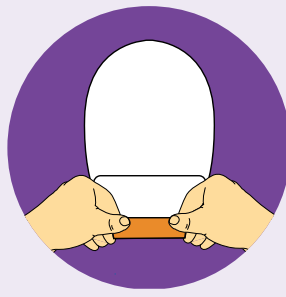


Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.

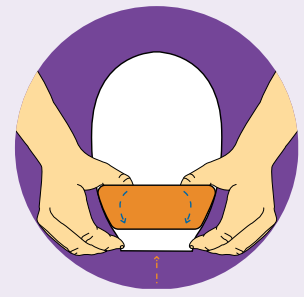


Retourner la pochette Lock-it-Pocket^{MC} sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4


Vidange et nettoyage du sac

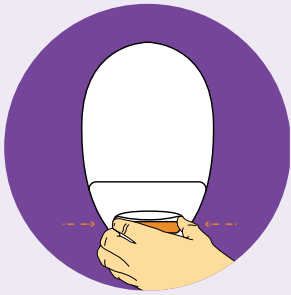

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.

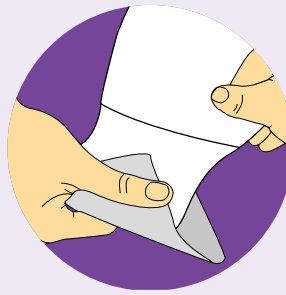


Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.

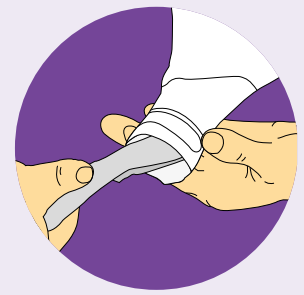


Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

Retrait du sac

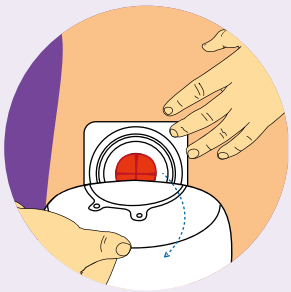

Pour décoller le sac de la collerette, maintenir celle-ci en place légèrement d'une main, et de l'autre, détacher délicatement le sac.

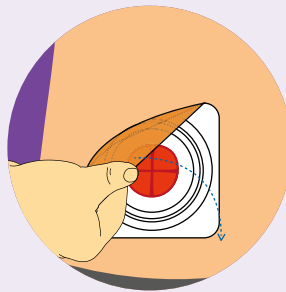

Pour décoller le sac de la collerette, maintenir celle-ci en place légèrement d'une main, et de l'autre, détacher délicatement le sac.