



Инструкция по применению Катетер одноразовый для аспирации дыхательных путей и взятия проб ТрахеаСет/Trachea Set

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13230 от
10.02.2017. Срок действия – бессрочно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер предназначен для аспирации содержимого дыхательных и взятия проб содержимого для проведения бактериологического исследования. Материал, из которого изготовлено изделие позволяет немедленно оценить характер и объем отделяемого без разъединения его частей.

Виды:

- Катетер ТрахеаСет **со штырьковым коннектором / воронкообразным коннектором** предназначен для присоединения к:
 - катетеру для аспирации дыхательных путей с коннектором Вакутип
 - катетеру защищенному для аспирации дыхательных путей (системе) Кэти (Cathy)
 - эндотрахеальным трубкам, имеющим порт для надманжеточной аспирации.
- Катетер ТрахеаСет **с воронкообразным коннектором / штырьковым коннектором** предназначен для присоединения к:
 - Катетеру для аспирации дыхательных путей с воронкообразным коннектором.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Присоединить конец катетера с воронкообразным коннектором к одному из вышеуказанных изделий.
2. Присоединить конец катетера со штырьковым коннектором к источнику вакуум-аспирации.
3. При необходимости взятия проб аккуратно отсоединить контейнер для отбора проб содержимого дыхательных путей пациента и закрыть прилагаемой пробкой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукция для одноразового использования, отвечающая требованиям безопасности. Использованные изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами, регуливающими утилизацию биозагрязненной продукции.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации.

Хранить таким образом, чтобы избежать деформации катетера или повреждения упаковки.
Срок хранения – 5 лет.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 Номер в каталоге	 Код партии	 Использовать до	 Не использовать повторно	 Дата изготовления
 Изготовитель	 Уполномоченный представитель	 Знак CE-марки	 Стерилизация Оксидом этилена	 Знак соответствия при декларировании и соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ФЕ Уномедикал Лтд., респ. Беларусь, Ул.Заводская 50, г.Фаниполь, 222750, Дзержинский р-он, Минская область

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94. За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00