



POSITIONIERUNG DES PATIENTEN

Der Patient wird mit angezogenen Knien entweder in die rechte oder linke Seitenlage gebracht.

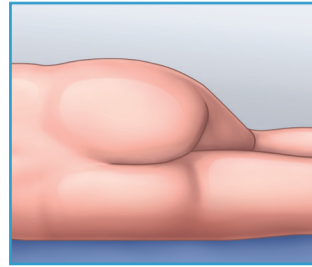

VORBEREITUNG DER HAUT


Reinigen Sie den perianalen Bereich mit warmem Wasser. Falls Sie zur Reinigung Seife oder andere Reinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese ausreichend abgespült werden. Entfernen Sie eventuelle Pastenrückstände. Schneiden Sie mit einer Schere alle Haare im perianalen Bereich vorsichtig ab. Um Hautunebenheiten auszugleichen, kann Stomahesive® Hautschutzpaste verwendet werden. Sie tragen einen Ring der Paste um die vorgestanzte Öffnung des Hautschutzes auf (nicht auf die Haut des Patienten) und warten ca. 1 Minute, bevor Sie den Kollektor anbringen. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Tragezeit mit Gebrauch der Stomahesive® Hautschutzpaste verlängert wird.

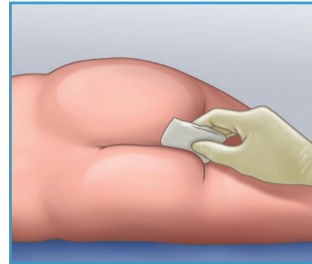

ANBRINGEN DES KOLLEKTORS

Falls nötig, dehnen Sie die Öffnung des Hautschutzes so, dass sie etwas größer als der Anus ist, um somit eine Dilatation des Anus zu gewährleisten.

Entfernen Sie das Abziehpapier nur vom Hautschutz; belassen Sie jedoch das Schutzpapier an der mikroporösen Klebefläche. Falten Sie den Hautschutz längs, bevor Sie ihn anbringen.

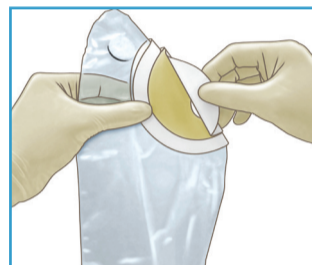

VERMEIDEN SIE DAS BERÜHREN DES HAUTSCHUTZES!

Heben Sie eine Gesäßhälfte an, und bringen Sie die schmale Stelle des Hautschutzes am Perineum an.

Bringen Sie den Hautschutz zunächst um den Anus an und halten ihn für einige Sekunden fest gedrückt. Entfernen Sie nun das restliche Abziehpapier vom Hautschutz.

Drücken Sie nun den Hautschutz im perianalen Bereich und im Bereich zwischen Anus und Steißbein nach außen hin fest an.


Entfernen Sie das Schutzpapier von der mikroporösen Klebefläche, und streichen Sie sie fest. Schneiden Sie falls notwendig die Klebefläche im Bereich der Hoden bzw. Vagina aus.

Halten Sie die gesamte Adhäsivfläche 1 Minute fest gedrückt.



PLAZIERUNG DES KOLLEKTORS

Legen Sie den Beutel zwischen die Beine des Patienten. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten bilden oder Druckbereiche entstehen.

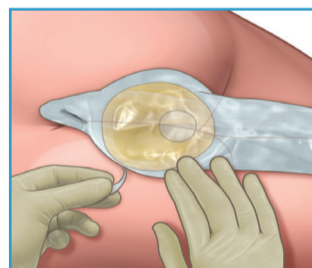

GEBRAUCH DES KOLLEKTORS

Bei flüssigem Stuhl

Bei Verwendung eines zusätzlichen Drainagebeutels: Verbinden Sie den Beutelverschluss des Fäkal-Kollektors mit dem Verbindungsstück des Drainagebeutels. Beim Verlassen des Bettes kann der Beutel mit der Kappe sicher verschlossen werden.



Bei halbgeformtem Stuhl

Schneiden Sie das untere Ende des Fäkal-Kollektors ab und schließen Sie ihn mit der beigefügten Klammer.

Halten Sie die Klammer mit der rechten Hand am Angelpunkt fest und legen das Beutelende einmal über den dünneren Klammerteil. Schließen Sie die Klammer und überzeugen Sie sich, dass sie fest eingerastet ist.

Öffnen Sie die Klammer, indem Sie die beiden Endstücke auseinanderziehen. Die Klammer kann beliebig oft geöffnet und geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht mehr als ein Drittel gefüllt ist.

Reinigung des Kollektors

Der Beutel kann, während er getragen wird, mit warmem Wasser solange gespült werden, bis er sauber ist.

ABNEHMEN DES KOLLEKTORS

Nehmen Sie den Beutel ab, indem Sie ihn langsam abziehen und gleichzeitig mit der freien Hand einen leichten Gegendruck auf die Haut ausüben.

Falten Sie den Hautschutz so zusammen, dass er ein in sich geschlossenes System darstellt, und entsorgen Sie ihn in angemessener Weise.


Der Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor kann bis zu 48 Stunden verbleiben, vorausgesetzt eine sichere Haftung ist gewährleistet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor besteht aus einem zuschneidbaren Hydrokolloid-Hautschutz, einer mikroporösen, stoffähnlichen Kleboberfläche und einem nach unten spitz zulaufenden Beutel mit integriertem Aktivkohlefilter.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Anwendung bei stationären Patienten, die an Stuhlinkontinenz leiden und flüssigen oder halbflüssigen Stuhl ausscheiden.

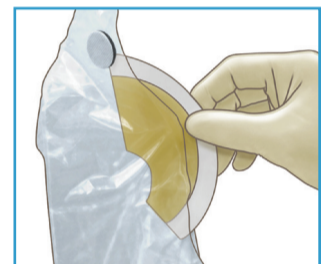

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	PZN (D)	Hilfsmittelverzeichnisnr. (D)	Ref-Nr. (D/CH) bzw. Art-Nr. (A)	Pharmacode (CH)
Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor mit Hydrokolloid-Hautschutz 1000 ml (10 Stück/Box)	0 373 729 6	15.25.10.0005	650 078	547 54 00



Deutschland:

ConvaTec (Germany) GmbH
Radlkofersstraße 2
D-81373 München

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 78 66 200

de.kundenservice@convatec.com
www.convatec.de

Österreich:

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
A-1010 Wien

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 21 63 39

at.kundenservice@convatec.com
www.convatec.com

Schweiz:

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstrasse 38
CH-8200 Schaffhausen

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 55 11 10

ch.kundenservice@convatec.com
www.convatec.ch