

Características

Epi-Fix


Dispositivo de fijación para catéter epidural



Epi-Fix es un **dispositivo de fijación estéril** especialmente diseñado para la sujeción de los catéteres epidurales hasta un máximo de **5 días**.

Composición de Epi-Fix

Dispositivo compuesto de un **film de poliuretano transparente y semipermeable**, una **espuma adhesiva y adaptable en forma de gato** especialmente diseñada para la óptima sujeción del catéter y un **contorno de tejido-no tejido** que cierra el perímetro del dispositivo.

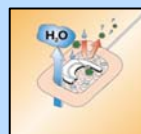

Film de Poliuretano semipermeable. Ayuda a evitar la entrada de bacterias y fluidos en el interior

Puntos clave

• Reducción del riesgo de infección

Gracias al film semipermeable y transparente de poliuretano de Epi-Fix podemos monitorizar la inspección del punto de punción siempre que creamos necesario sin necesidad de manipular o retirar el dispositivo.

Al mismo tiempo este film de poliuretano nos permite mantener aislada la zona de punción reduciendo el riesgo de maceración y de infección.

• Seguridad y Adaptabilidad

La composición y diseño del dispositivo permite una aplicación segura del mismo, óptimo confort para el paciente sin riesgo de acodamientos del catéter o puntos de presión que puedan lesionar la zona.

Epi-Fix asegura una fijación eficaz del catéter epidural, evitando que movimientos bruscos o accidentales puedan desplazar el catéter epidural y la pérdida accidental del mismo.

Guía de uso


Aplicación

Seguir los pasos descritos en el dorso para la correcta colocación del dispositivo



Retirada

Retirar el dispositivo con suavidad

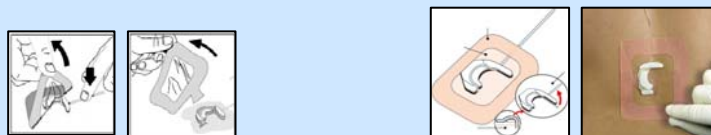

Referencia

Nº Referencia	Nº SAP	Descripción de producto	Unidades/caja
1250020180	1256286	EPI-FIX Dispositivo de fijación para catéter epidural	25/caja



Características

Drain-Fix

Dispositivo de fijación para drenajes



Drain-Fix es un **dispositivo de fijación estéril** especialmente diseñado para la sujeción de tubos de drenaje y catéteres percutáneos, de diferentes tamaños (Ch5 – Ch22), hasta un máximo de **7 días**.

Composición de Drain-Fix



Dispositivo compuesto de un **apósito de hidrocoloide en su base, una estructura de espuma de poliuretano especialmente diseñada para la disposición y sujeción del catéter y tejido-no tejido para el resto del dispositivo** con el que se acaba de sujetar el tubo de drenaje.

Puntos clave


•Seguridad y Adaptabilidad

La composición y diseño del dispositivo permite una aplicación segura del mismo, óptimo confort para el paciente sin riesgo de acodamientos del catéter o puntos de presión que puedan lesionar la zona.

Asegura una fijación eficaz del catéter o tubo de drenaje. Drain-Fix ayuda a evitar la pérdida accidental del tubo de drenaje.

Aplicación

Seguir los pasos descritos en el dorso para la correcta colocación del dispositivo

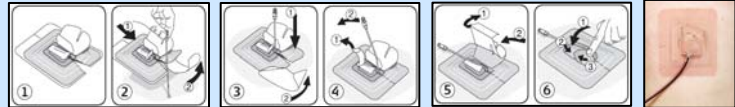

Paso 1: retirar la primera parte para adherir la base del hidrocoloide en la piel del paciente.

Paso 2: disponer el tubo de drenaje a lo largo de la estructura de espuma de poliuretano especialmente diseñada para ello.

Paso 3: adherir el resto de tejido-no tejido según indicación para acabar de sujetar el tubo de drenaje.

Referencias

Nº Referencia	Nº SAP	Descripción de producto	Unidades/caja
1230020180	1256232	DRAIN-FIX PEQUEÑO Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas	25/caja
1230060180	1256230	DRAIN-FIX GRANDE Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas	20/caja

ConvaTec SL
C/Constitución 1, 3ª Planta
08960 Sant Just Desvern
Barcelona-España
Tel.: +34 93 602 37 00
Fax: +34 93 602 37 41

Servicio de información de ConvaTec



Infotec 900 30 40 50
www.Convatec.es