

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แผ่นปิดแผล อควาเซลโฟมโปร

AQUACEL™ Foam Pro adhesive Hydrofiber™ foam dressing

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผล Hydrofiber™ ชนิดโฟมปราศจากเชื้อที่ประกอบด้วยฟิล์มพอลิยูรีเทนกันน้ำที่ชั้นนอกและแผ่นดูดซับหลายชั้น โดยมีแผ่นกาวปิดแผลที่มีกาวซิลิโคนเติมแผ่น และแผ่นดูดซับหลายชั้นประกอบด้วยชั้นของโฟมพอลิยูรีเทนและชั้นสัมผัสบาดแผลแบบไม่ถักทอโดยใช้ Hydrofiber™ (โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส)

แผ่นฟิล์มชั้นนอกสามารถกันน้ำและเป็นเกราะป้องกันไวรัสและแบคทีเรียได้ จึงช่วยปกป้องบาดแผลจากการปนเปื้อนภายนอกและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แผ่นฟิล์มยังช่วยจัดการการถ่ายเทไอความชื้นของสารคัดหลั่งที่ดูดซึมโดยแผ่นปิดแผล

โฟมและวัสดุ Hydrofiber™ ภายในแผ่นจะดูดซับของเหลวที่บาดแผลและแบคทีเรียได้ในปริมาณสูง ชั้น Hydrofiber™ ที่สัมผัสบาดแผลจะสร้างเจลที่อ่อนนุ่มและเหนียวซึ่งแนบสนิทกับพื้นผิวบาดแผล ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นในแผล (ซึ่งสนับสนุนกระบวนการสมานแผลของร่างกาย) และช่วยในการกำจัดเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถทำงานได้ออกจากแผล (กระบวนการกำจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติ

ชั้นสัมผัสบาดแผลที่ไม่ยึดติดกับแผ่นปิดแผลช่วยให้แผลเกิดการบาดแผลน้อยที่สุดเมื่อดึงแผ่นปิดแผลออก กลุ่มแผ่นปิดแผลชนิดนี้มีกาวซิลิโคนที่ช่วยให้การยึดเกาะมั่นคงและไม่ทำร้ายผิวหนังและช่วยรองรับการดึงแผ่นปิดแผลออกโดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของบาดแผล

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro สามารถใช้เป็นแผ่นปิดแผลชั้นในหรือชั้นนอกก็ได้ และอาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบาดแผลอื่นๆ และสามารถตัดให้มีรูปร่างและขนาดได้ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ หากตัดแผ่นปิดแผล อาจจำเป็นต้องใช้เทปกาวเพิ่มเติมเพื่อยึดให้เข้าที่

ในกรณีนี้จะจำเป็นต้องใช้เทปกาวเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ ในการยึดเพื่อยึดแผ่นปิดแผล

ฟิล์มของแผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบาดแผลจากแบคทีเรียและไวรัสที่มากับเลือด (เช่น เชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบบี)

การใช้อุปกรณ์นี้ไม่รับประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบบี

ข้อบ่งใช้

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro สามารถใช้สำหรับการดูแลบาดแผลทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น:

- แผลเรื้อรังที่ขา แผลกดทับ (ระดับ II-IV) และแผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน
- แผลผ่าตัด (แผลหลังการผ่าตัด, แผลบริเวณผู้ให้ (donor site), แผลบริเวณผิวหนัง)
- แผลไฟไหม้ที่ผิวหนังถูกทำลายลึกเป็นบางส่วน (ระดับที่สอง)
- แผลจากอุบัติเหตุหรือแผลผ่าตัดที่เปิดทิ้งไว้เพื่อให้หายแบบทุติภูมิ (secondary intent) เช่น แผลแยกบริเวณรอยผ่า
- แผลผ่าตัดที่รักษาด้วยวิธีปฐมภูมิโดยให้เนื้อเยื่อทั้งหมดปิดเข้าด้วยกัน เช่น แผลที่ผิวหนังและแผลผ่าตัด (เช่น บริเวณกระดูกและหลอดเลือด)
- การดูแลแผลที่มีแนวโน้มจะมีเลือดออก เช่น บาดแผลที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องจักรหรือการผ่าตัด และแผลบริเวณผู้ให้ (donor site)
- แผลที่ทำให้เจ็บปวด
- แผลถลอก
- แผลฉีกขาด
- แผลเล็กน้อยจากการโดนบาด
- แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro อาจรวมอยู่ในแนวทางการดูแลรักษาที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังถูกทำลาย

ข้อห้ามใช้

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro ไม่ควรใช้กับผู้ที่แพ้ยางหรือมีปฏิกิริยาการแพ้ต่อแผ่นปิดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิดแผล

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

ระวัง: รับประทานสภาพปลอดเชื้อ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิดออกก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผลนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน

ในระหว่างกระบวนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย เนื้อเยื่อที่ไม่สามารถทำงานได้จะถูกนำออกจากบาดแผล (กระบวนการกำจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) ซึ่งอาจทำให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนแผ่นปิดแผลในสองสามครั้งแรก

หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่อยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) หรือการสร้างเนื้อเยื่อเหนือระดับผิวหนัง (การสร้างเนื้อเยื่อมากเกินไป) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

ควรตรวจสอบบาดแผลระหว่างการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลเพื่อสังเกต 1) อาการของการติดเชื้อที่เกิดขึ้น (ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น เลือดออก ผิวบริเวณรอบบาดแผลอุ่นและแดง มีสารคัดหลั่งจากแผล)

(2) มีการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือกลิ่นของแผล (3) มีอาการอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (เช่น เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ย หรือแผลนูนขึ้น)

ยังไม่มีการศึกษาการใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro ในแผลที่เกิดเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคพุพอง

นอกจากนี้ สำหรับแผลเรื้อรังที่ขา แผลกดทับ แผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน แผลไฟไหม้ระดับที่สอง แผลบริเวณผู้ให้ แผลผ่าตัดหรือแผลจากอุบัติเหตุที่รักษาด้วยวิธีปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ:

- การดูแลรักษาแผลประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
- ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีข้อบ่งชี้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อที่บีบรัดแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผลเรื้อรังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดำหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแผลกดทับ)
- การแบ่งตัวของเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรังเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และไม่ถือเป็นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิดแผล อาจใช้แผ่นปิดแผลกับแผลติดเชื้อภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ
- ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับแผลเรื้อรังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน

แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro ไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน เช่น ปิโตรลียม

ห้ามใช้แผ่นปิดแผล AQUACEL™ Foam Pro ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์ออกซิไดซ์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารละลายไฮโปคลอไรท์

การใช้แผ่นปิดแผลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยการป้องกันโรคไม่ได้เป็นการปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาและปฏิบัติตามระเบียบการดูแลที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันการทำลายผิว เช่น พื้นผิวที่รองรับ ตำแหน่ง โภชนาการ ความชุ่มชื้น การดูแลผิว และการเคลื่อนไหว

วิธีการใช้

1. ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์ชั้นในของผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย

2. การเตรียมแผลและการทำความสะอาดแผล:

ก่อนใช้แผ่นปิดแผล ให้ทำความสะอาดบริเวณบาดแผลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแผลที่เหมาะสมและเช็ดผิวแห้งโดยรอบให้แห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอบๆ บาดแผลไม่มีความชื้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันซึ่งอาจมีผลต่อการติดของแผ่นปิดแผล

3. การเตรียมแผ่นปิดแผลและการใช้งาน:

- เลือกขนาดและรูปร่างของแผ่นปิดแผลเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นปิดแผลตรงกลาง (พื้นที่ภายในแผ่นกาว) มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณบาดแผลประมาณ 1 ซม. (1/3 นิ้ว)
- นำแผ่นปิดแผลออกจากซองปราศจากเชื้อ โดยให้นิ้วสัมผัสกับแผ่นปิดแผลในส่วนที่จะสัมผัสกับบาดแผลและพื้นผิวกาว หากมี ให้น้อยที่สุด ลอกแผ่นปิดเทปกาวออก
- แผ่นปิดแผลนั้นสามารถตัดตามรูปร่างที่ต้องการได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- จับแผ่นปิดแผลไว้บนแผลและจัดแนวกึ่งกลางของแผ่นปิดแผลให้อยู่กึ่งกลางของแผล วางแผ่นปิดแผลบนแผลได้โดยตรง สำหรับแผ่นปิดแผลแบบมีกาว รีดแผ่นปิดแผลจนถึงขอบที่มีกาว
- ควรใช้ผ้าพันแผลหรือเทปยึดที่เหมาะสมเพื่อยึดแผ่นปิดแผลให้อยู่กับที่ หากแผ่นปิดแผลไม่มีขอบกาวหรือหากตัดแถบกาวออกจากแผ่นปิดแผลชนิดมีกาวแล้ว
- ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทำแผล

4. การดึงแผ่นปิดแผลออก:

- ควรเปลี่ยนแผ่นปิดแผลเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ (เช่น การรื้อไหล มีเลือดออกความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น หรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ) ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกินเจ็ดวัน
- ควรทำความสะอาดแผลตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
- ในการดึงแผ่นปิดแผลออก ให้กดลงบนผิวเบาๆ และลอกมุมหนึ่งของแผ่นปิดแผลออกอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ดึงต่อไปจนกว่าขอบทั้งหมดจะหลุดออก ดึงแผ่นปิดแผลออกอย่างระมัดระวังและทิ้งตามระเบียบการทางคลินิกในท้องถิ่น

• หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำโปรดติดต่อ ConvaTec Professional Services หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.convatec.com

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง (10° C- 25° C/50° F - 77° F) อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสง เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 421579, 421580 ใน 1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น

ผลิตภัณฑ์รหัส 422356, 422357, 422358, 422359 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



ห้ามใช้ซ้ำ



ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด



เก็บในสภาวะที่แห้ง



จำกัดอุณหภูมิ



เก็บให้พ้นแสงแดด



ปราศจากลาเท็กซ์



ฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซด์



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน



หมายเลขแคตตาล็อก



รุ่นที่ผลิต



วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทีไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทีไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เฟลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000