


Fiche d'application


EsteemBody^{MD}

Application d'un sac pour urostomie convexe souple à une pièce


Avant et après l'application, se laver les mains. Veillez à ce que la peau entourant la stomie soit propre, sèche et exempte de substances huileuses.

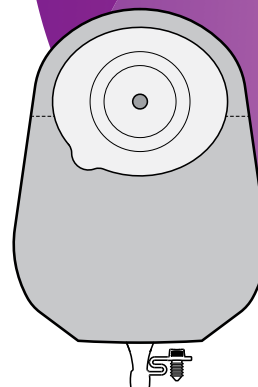


Préparation et application

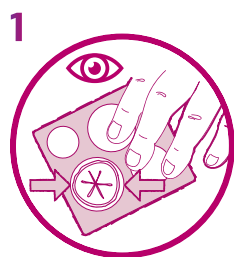


Placez le guide de mesure de la stomie sur votre stomie pour confirmer la bonne taille.

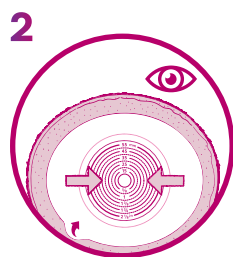


Si vous utilisez une barrière cutanée prédécoupée, choisissez une barrière cutanée dont l'ouverture prédécoupée est légèrement plus grande que votre stomie.

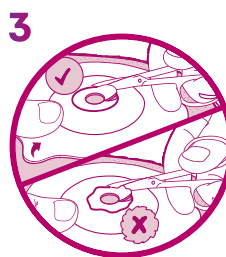

Si vous utilisez une barrière cutanée à découper, transférez la taille sur votre barrière cutanée et découpez-la en conséquence.

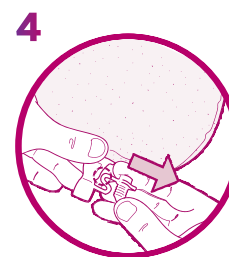


Gonflez partiellement le sac en soufflant et séparer les films du sac pour permettre à l'air d'y pénétrer.

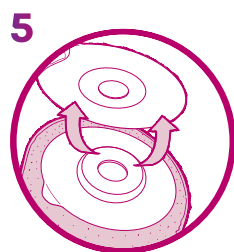

Retirez la doublure de protection de la barrière cutanée.




Tenez la barrière cutanée sous votre stomie et appliquez-la vers le haut contre la peau autour de votre stomie. Pressez la barrière cutanée contre la peau.

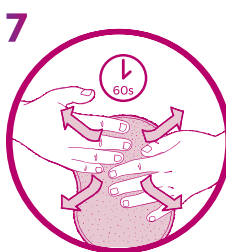


Appliquez sur la peau. Maintenir une légère pression sur la barrière cutanée pendant 60 secondes pour assurer une bonne étanchéité. Fermez délicatement le robinet.


Vidange

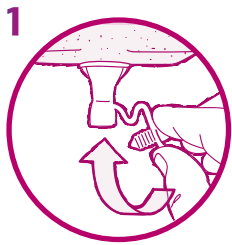


Commencez par incliner le robinet vers le haut et vers vous. Pressez la base du robinet et ouvrez le robinet avec l'autre main.

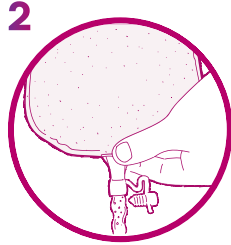

Dirigez le robinet vers les toilettes pour évacuer l'urine.

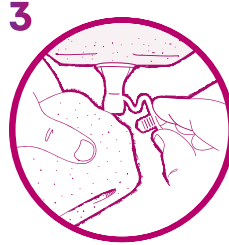

Soutenez le sac d'une main et essuyez l'extérieur de la valve ou du robinet avec un tissu propre dans l'autre main.

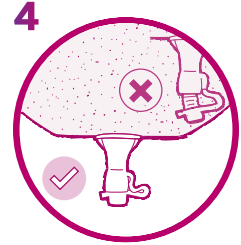

Insérez délicatement le bouchon dans le robinet et assurez-vous qu'il est bien fermé.

Retrait et élimination



Soulevez délicatement le bord supérieur de la barrière, puis la décoller lentement et délicatement vers le bas.



Éliminez le sachet conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **convatec.ca**