


Fiche d'application

EsteemBody^{MD}

Application d'un sac vidable convexe souple à une pièce


Avant l'application, assurez-vous que vos mains et la peau entourant la stomie sont propres, sèches et exemptes de substances huileuses.

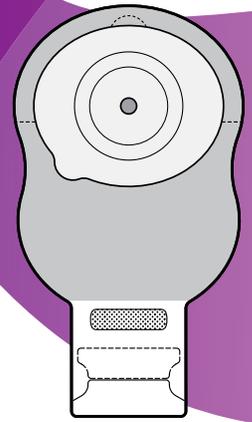


Préparation et application




Placez le guide de mesure de la stomie sur votre stomie pour confirmer la bonne taille.

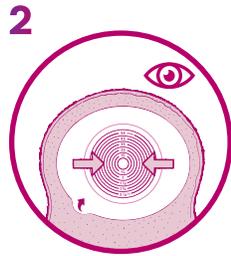

Si vous utilisez une barrière cutanée prédécoupée, choisissez une barrière cutanée dont l'ouverture prédécoupée est légèrement plus grande que votre stomie.

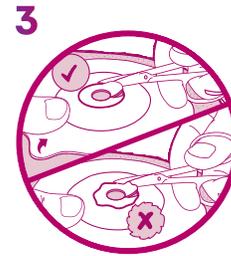


Si vous utilisez une barrière cutanée à découper, transférez la taille sur votre barrière cutanée et découpez-la en conséquence.

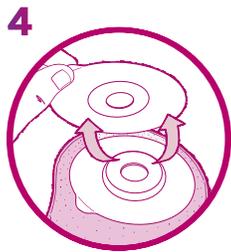

Retirez la doublure de protection de la barrière cutanée.



Tenez la barrière cutanée sous votre stomie et appliquez-la vers le haut contre la peau autour de votre stomie. Pressez la barrière cutanée contre la peau.

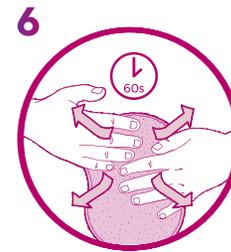

Appliquez sur la peau. Maintenir une légère pression sur la barrière cutanée pendant 60 secondes pour assurer une bonne étanchéité.

Vidange

1




Ouvrez le sac en poussant les deux extrémités de la sortie. Videz le contenu dans les toilettes.

2




Soutenez le sac d'une main et essuyez la sortie d'un mouvement ferme vers le bas à l'aide d'un tissu propre.

3

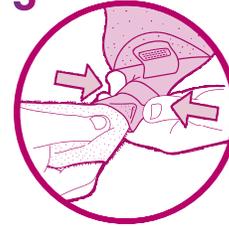


Nettoyez la surface intérieure de la sortie avec un tissu ou des lingettes.

4

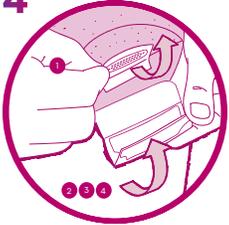


1. Pliez la bande de sécurité en position haute.
2. Réalisez le pli 1 de la fermeture de la queue en utilisant les bandes de plastique comme guide.
3. Répétez pour le pli 2.
4. Répétez pour le pli 3.

5

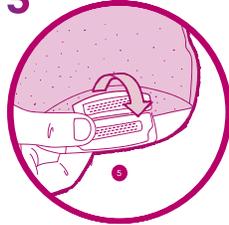

Maintenir la fermeture de l'extrémité en rabattant la bande de sécurité.

6

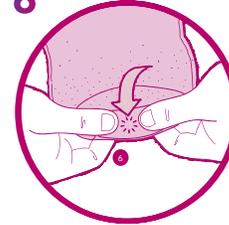

Pressez avec le pouce et les doigts. Vous sentirez qu'il s'enclenche.

Retrait et élimination

1



Commencez par soulever délicatement le bord supérieur de la barrière, puis décollez lentement et délicatement vers le bas.

2



Éliminez le sachet conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au 1-800-465-6302, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à convatec.ca

Voir la notice d'utilisation pour un mode d'emploi complet.