


Fiche d'application


EsteemBody^{MD}

Application d'un sac fermé convexe souple à une pièce


Avant l'application, assurez-vous que vos mains et la peau entourant la stomie sont propres, sèches et exemptes de substances huileuses.

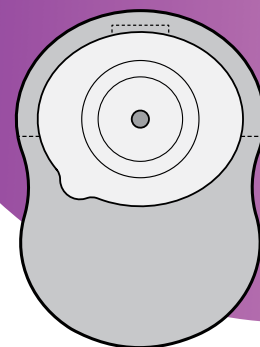


Préparation et application

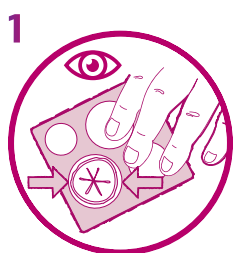


Placez le guide de mesure de la stomie sur votre stomie pour confirmer la bonne taille.

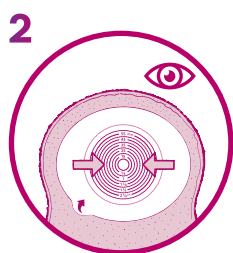

Si vous utilisez une barrière cutanée prédécoupée, choisissez une barrière cutanée dont l'ouverture prédécoupée est légèrement plus grande que votre stomie.

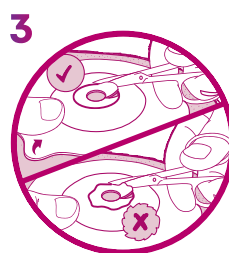


Si vous utilisez une barrière cutanée à découper, transférez la taille sur votre barrière cutanée et découpez-la en conséquence.

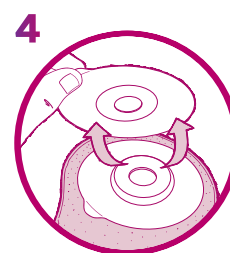

Retirez le film protecteur de la barrière cutanée.



Tenez la barrière cutanée sous votre stomie et appliquez-la vers le haut contre la peau autour de votre stomie. Pressez la barrière cutanée contre la peau.

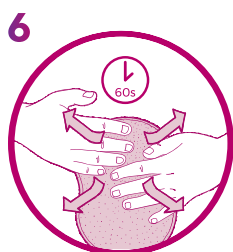

Appliquez sur la peau. Maintenir une légère pression sur la barrière cutanée pendant 60 secondes pour assurer une bonne étanchéité.

Retrait et élimination



Commencez par soulever délicatement le bord supérieur de la barrière, puis décollez lentement et délicatement vers le bas.



Éliminez le sachet conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **convatec.ca**

Voir la notice d'utilisation pour un mode d'emploi complet.