

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสเซนต้า แผ่นลอกคราบการทางการแพทย์

ESENTA Sting Free Medical Adhesive Remover Wipe

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นลอกคราบการทางการแพทย์แบบไม่ระคายเคือง

ข้อบ่งใช้

ใช้ขจัดคราบการบนผิวหนัง

วิธีการใช้

1. ฉีกซองบรรจุออกและคลี่แผ่นออก
2. เช็ดเพื่อขจัดคราบการ

ข้อมูลการใช้: ทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ เป็นการเตรียมผิวหนังให้สะอาดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์หรือแผ่นปิดแผล

ข้อควรระวัง

สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรใช้ซ้ำ หากใช้ซ้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและคุณสมบัติอาจไม่เป็นไปตามข้อบ่งใช้

หลังการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพ ให้จัดการและกำจัดตามตกลงการปฏิบัติทางการแพทย์และกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้

หากในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานอุปกรณ์มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานระดับประเทศของคุณ

- หลีกเลี่ยงการใช้บนบาดแผลโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงหากเกิดอาการระคายเคืองและปรึกษาแพทย์
- สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือน: วัตถุไวไฟ


วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งให้พ้นแสงอาทิตย์

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 423281 ใน 1 กล่องบรรจุ 30 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

 หมายถึง รุ่นการผลิต

 หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000