

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แผ่นปิดแผลโฟมไลต์

FoamLite™ Adhesive Silicone Foam Dressing

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปิดแผล Foam Lite™ Convatec เป็นแผ่นปิดแผลโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแผ่นบางที่ยืดหยุ่นปรับรูปเข้ากับแผลได้ดี แผ่นปิดแผลนี้ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มพอลิยูรีเทนกันน้ำที่ชั้นนอกและแผ่นโฟมดูดซับพร้อมกาวซิลิโคนชนิดรูปวง

แผ่นฟิล์มชั้นนอกสามารถกันน้ำและเป็นเกราะป้องกันไวรัสและแบคทีเรียได้ จึงช่วยปกป้องบาดแผลจากการปนเปื้อนภายนอกและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ฟิล์มของแผ่นปิดแผลทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบาดแผลจากแบคทีเรียและไวรัสที่มากับเลือด (เช่น เชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบบี) การใช้อุปกรณ์นี้ไม่รับประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบบีได้

แผ่นปิดแผลในส่วนที่สัมผัสกับบาดแผลได้รับการเคลือบด้วยชั้นกาวซิลิโคนที่มีรูปวง ซึ่งช่วยให้ยึดเกาะกับผิวหนังให้อยู่กับที่ได้โดยไม่ทำร้ายผิวหนัง

แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ออกแบบมาสำหรับบาดแผลที่มีสารคัดหลั่งในปริมาณน้อยและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของบาดแผลให้ชุ่มชื้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ได้รับการออกแบบมาให้ยึดติดได้โดยไม่ต้องมีการยึดปิดแผลชั้นนอกอีก แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างการใช้ได้

ข้อบ่งใช้

แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ มีไว้สำหรับการดูแลรักษาบาดแผล โดยครอบคลุมถึงประเภทของบาดแผลต่างๆ ที่มีสารคัดหลั่งน้อย/ไม่มีสารคัดหลั่ง ภายใต้การดูแลของแพทย์ แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ อาจใช้สำหรับการดูแลรักษาบาดแผลได้ทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น:

- แผลเรื้อรังที่ขา แผลกดทับ และแผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน
- แผลผ่าตัด (เช่น บาดแผลหลังการผ่าตัดที่ปล่อยให้สมานแผลด้วยวิธีทุติยภูมิโดยไม่ปิดเนื้อเยื่อ (secondary intent) และแผลบริเวณผู้ให้ (donor site))
- แผลไฟไหม้ที่ผิวหนังถูกทำลายลึกเป็นบางส่วน (ระดับที่สอง)
- แผลจากอุบัติเหตุ (เช่น แผลถลอก แผลฉีกขาด แผลพุพอง แผลเล็กน้อยจากการโดนบาด และผิวหนังฉีกขาด)

ข้อห้ามใช้

ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ในผู้ที่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิดแผล

แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวหนังนุ่มและชุ่มชื้น เช่น ปิโตรลาทัม ได้

ห้ามใช้แผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ร่วมกับสารออกซิไดซ์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือสารละลายไฮโปคลอไรท์

วิธีการใช้

1. ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์ชั้นในของผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย

2. การเตรียมแผลและการทำความสะอาดแผล:

ก่อนใช้แผ่นปิดแผล ให้ทำความสะอาดบริเวณแผลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแผลตามกระบวนการปกติและซับผิวหนังโดยรอบให้แห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวโดยรอบปราศจากผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวหนังนุ่มและชุ่มชื้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส่วนผสมของน้ำมันที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของแผ่นปิดแผลได้

3. การเตรียมและการติดแผ่นปิดแผล

- เลือกขนาดแผ่นปิดแผลที่เหมาะสม โดยเลือกขนาดและรูปร่างของแผ่นปิดแผลเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนกลางของแผ่นปิดแผลจะใหญ่กว่าบริเวณแผลอย่างน้อย 1 ซม. (1/3 นิ้ว)
- นำแผ่นปิดแผลออกจากซองปราศจากเชื้อ โดยให้นิ้วสัมผัสกับแผ่นปิดแผลในส่วนที่จะสัมผัสกับบาดแผลให้น้อยที่สุดและลอกแผ่นปิดเทปกาวออก
- จับแผ่นปิดแผลไว้บนแผลและจัดแนวกึ่งกลางของแผ่นปิดแผลให้อยู่กึ่งกลางของแผล ลูบเกลี่ยแผ่นปิดแผลให้เรียบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นปิดแผลติดทั่วแผลดีแล้ว
- สามารถตัดแผ่นปิดแผล Foam Lite Convatec™ ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับบาดแผลที่สันเท้า ข้อศอก และบริเวณอื่นๆ ที่มีพื้นที่ไม่เหมือนบริเวณปกติทั่วไป ในกรณีนี้จะจำเป็นต้องใช้เทปกาวเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ ในการยึดเพื่อยึดแผ่นปิดแผลให้อยู่กับที่
- ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทำแผล

4. การกำจัดแผ่นปิดแผล

- ควรเปลี่ยนแผ่นปิดแผลเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก (เช่น การรื้อไหล มีเลือดออก ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น สงสัยว่ามีการติดเชื้อ) ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกินเจ็ดวัน
- ในการดึงแผ่นปิดแผลออก ให้กดลงบนผิวหนัง และลอกมุมหนึ่งของแผ่นปิดแผลออกอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ดึงต่อไปจนกว่าขอบทั้งหมดจะหลุดออก ดึงแผ่นปิดแผลออกอย่างระมัดระวังและทิ้งตามระเบียบการทางคลินิกในพื้นที่

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

ระวัง: รับประทานสภาพปลอดเชื้อ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิดออกก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ซ้ำ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผลนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน

ในระหว่างกระบวนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย เนื้อเยื่อที่ไม่สามารถทำงานได้จะถูกนำออกจากบาดแผล (กระบวนการกำจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) ซึ่งอาจทำให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนแผ่นปิดแผลในสองสามครั้งแรก หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่อยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) หรือการสร้างเนื้อเยื่อเหนือระดับผิวหนัง (การสร้างเนื้อเยื่อมากเกินไป) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ควรตรวจสอบบาดแผลระหว่างการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลเพื่อสังเกตถึง: (1) อาการของการติดเชื้อที่เกิดขึ้น (ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น เลือดออก ผิวบริเวณรอบบาดแผลอุ่นและแดง มีสารคัดหลั่งจากแผล) (2) มีการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือกลิ่นของแผล (3) มีอาการอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (เช่น เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ย หรือแผลนูนขึ้น)

ยังไม่มีการศึกษาการใช้แผ่นปิดแผล Foam Lite ConvaTec™ ในแผลที่เกิดเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคพุพอง นอกจากนี้ สำหรับแผลเรื้อรังที่ขา แผลกดทับ แผลเรื้อรัง เนื่องจากเบาหวาน แผลไฟไหม้ระดับที่สอง แผลบริเวณผู้ให้ แผลผ่าตัดหรือแผลจากอุบัติเหตุที่รักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายหรือหัตถ์เทียม:

- การดูแลรักษาแผลประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
- ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีข้อบ่งชี้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อที่ปรับระดับลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผลเรื้อรังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดำหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแผลกดทับ)
- การแบ่งตัวของเชื้อจุลชีพในแผลเรื้อรังเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและไม่ถือเป็นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิดแผล อาจใช้แผ่นปิดแผลกับแผลติดเชื้อภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ
- ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับแผลเรื้อรังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน
- ในแผลไฟไหม้ระดับที่สอง ให้พิจารณาวิธีการผ่าตัดทางเลือกอื่นๆ หากแผลไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังใหม่หลังจาก 14 วัน

แผ่นปิดแผล Foam Lite ConvaTec™ สามารถตัดให้มีรูปร่างและขนาดตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หากตัดแผ่นปิดแผล อาจจำเป็นต้องใช้เทปกาวเพิ่มเติมเพื่อยึดให้เข้าที่ หากตัดแผ่นปิดแผล อาจทำให้เกราะป้องกันเชื้อไวรัส/แบคทีเรียที่มาพร้อมแผ่นปิดแผลมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้

- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำโปรดติดต่อ ConvaTec Professional Services หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.convatec.com

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง (10° C- 25° C/50° F - 77° F) อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสง เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 421557, 421559, 421561, 421563, 421927, 421928 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



ห้ามใช้ซ้ำ



ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์



ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด



ปราศจากลาเท็กซ์



เก็บในสภาวะที่แห้ง



รุ่นการผลิต



เก็บให้พ้นแสงแดด



วันหมดอายุ



จำกัดอุณหภูมิ



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000