

## โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

### เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

นิลแทค สเตอริลลอกคราบการทางการแพทย์

Niltac Sting Free Medical Adhesive Remover Spray

#### คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สเตอริลลอกคราบการทางการแพทย์แบบไม่ระคายเคือง

#### ข้อบ่งใช้

ใช้ขจัดคราบการบนผิวหนัง

#### วิธีการใช้

1. ฉีดสเตอริลลอกคราบการ ขอบการแล้วรอสักครู่
2. ค่อยๆ ลอกการออกจากผิวหนังโดยฉีดสเตอริลเพิ่มเติมเพื่อให้ขจัดออกได้ง่าย หากจำเป็น
3. สเตอริลลอกคราบการ สามารถใช้ฉีดพ่นโดยใช้สเตอริลคว่ำลง อย่างไรก็ตาม โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเป็นเวลานานในตำแหน่งแน่นอนเพื่อให้แน่ใจว่าสารขับเคลื่อนไม่หมดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกใช้จนหมด

#### คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวหนังอ่อนหรือผิวหนังบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง
- **อันตราย!** สารละลายของเหลวมีคุณสมบัติไวไฟสูงมากเป็นพิเศษ บรรจุภัณฑ์ที่อัดด้วยความดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F ห้ามเจาะหรือเผาแม้ใช้แล้ว เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ อย่าฉีดพ่นบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง

ส่วนประกอบสำคัญ: Siloxanes, propellant


#### วิธีการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F

#### ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420787 ใน 1 กลองบรรจุ 50 มิลลิลิตร

#### คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

 หมายถึง รุ่นการผลิต

 หมายถึง วันหมดอายุ

#### เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

#### ผลิตโดย

บริษัท ไฮโดรคอม แอโรซอล, เบอรัคเคินเฮด, สหราชอาณาจักร

#### นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000