

EsteemBody™



**Jednodielný konvexný stomický systém
s technológiou Leak Defense™
- s ochranou pred podtekaním**



Zjednodušený návod - v akých prípadoch použiť konkrétne vrečko

Miesto napätia: princípy rozloženia sily pri produkte Esteem Body™

**POKIAL' POTREBUJEM
VYROVNAŤ PERISTOMÁLNE
OKOLIE, použijem najširšiu
konvexitu (V0).**

Hĺbka: 7 mm
Priemer konvexity: 58 mm

**POKIAL' POTREBUJEM OBOJE
- vystúpenie a vyrovnanie,
použijem strednú šírku
konvexity (V1 alebo V2).**

Hĺbka: 7 mm
Priemer konvexity: 48 mm

Hĺbka: 7 mm
Priemer konvexity: 38 mm

**POKIAL' POTREBUJEM, ABY
STÓMIA VYSTÚPILA, použijem
najúžšiu konvexitu (V3).**

Hĺbka: 7 mm
Priemer konvexity: 28 mm

zväčšujúca sa
HĽBKA

Hĺbka: 3,5 mm
Priemer konvexity: 58 mm

Hĺbka: 3,5 mm
Priemer konvexity: 48 mm

Hĺbka: 3,5 mm
Priemer konvexity: 38 mm

Hĺbka: 3,5 mm
Priemer konvexity: 28 mm

zmenšujúci sa PRIEMER KONVEXITY

Obr.: Waller J, Gowans P, Lord S, McGill K. Impact of Stoma Baseplate Convexity on Tension and Compression Around the Stoma Site: A Finite Element Analysis. Coreus, 2024; (In-press).



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Viac informácií na bezplatnom čísle **zákazníckeho centra 0800 800 111**
Zákaznícke centrum Convatec, Unomedical, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931 alebo nám napíšte email na stomalinka@convatec.com
www.convatec.sk

