

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ซีเลส แผ่นปกป้องผิวหนัง

Sillesse Sting Free Skin Barrier Wipes

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปกป้องผิวหนังชนิดไม่ระคายเคือง

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับปกป้องผิวหนัง

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวให้แห้ง
2. ฉีกซองบรรจุและคลี่แผ่นออก
3. เช็ดบริเวณผิวหนังที่ต้องการปกป้องให้ทั่ว และทิ้งไว้สักครู่ให้แห้ง

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง

ส่วนประกอบสำคัญ: Siloxane Copolymers

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งและพ้นจากแสงอาทิตย์

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420789 ใน 1 กล่องบรรจุ 30 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000