


Návod na použitie

Jednodielne stomické vrečko výpustné

EsteemBody™


mäkké konvexné (Soft Convex) vrečko s technológiou Leak Defense™ (s ochranou pred podtekaním)

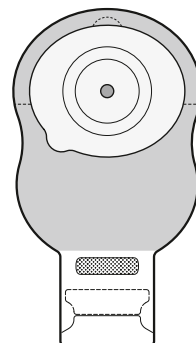


Aplikácia vrečka

Pred použitím sa uistite, že vaše ruky a koža v okolí stómie sú čisté, suché a bez mastných látok


Príprava a použitie

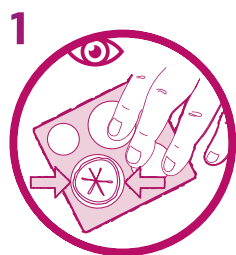

Umiestnite pomôcku na meranie na stómiu, aby ste správne určili jej veľkosť.

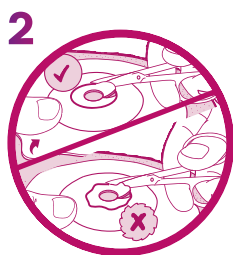


Preneste odmeranú veľkosť stómie na podložku a vystrihnite ju.

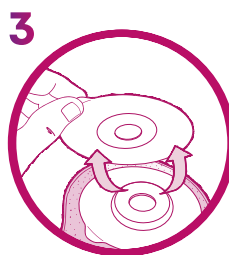

Odstráňte odnímateľnú fóliu z podložky.



Pridržte podložku pod stómiu a aplikujte ju smerom nahor na pokožku v okolí stómie. Pritlačte podložku k pokožke.

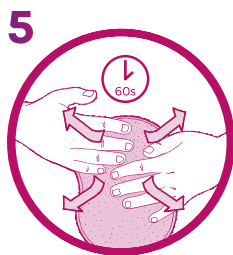

Podložku na pokožke uhladzte a na 60 sekúnd ju jemne pritlačte, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.

Návod na použitie

Odstránenie, vyprázdňovanie, likvidácia

Po vyprázdnení a/alebo likvidácii vrečka si umyte ruky.

Odstránenie a likvidácia




1
Začnite jemným odtiahnutím horného okraja podložky, pomaly a jemne ju odlepujte smerom nadol.



2
Vrečko zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii.


Vyprázdnenie

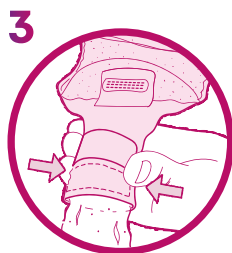


3
Uzáver otvoríte zatlačením na obidva konce výpustu. Vyprázdňte obsah do záchoda.




4
Jednou rukou pridržte vrečko a pretrite uzáver čistou vreckovkou pevným pohybom smerom nadol.

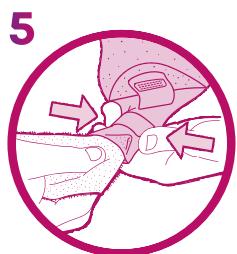


5
Vyčistite vnútro uzáveru čistou vreckovkou.

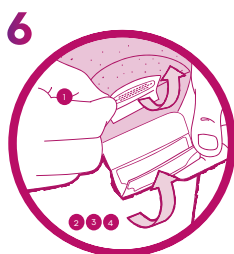

6
Uzavretie výpustného vrečka suchým zipsom: skladajte uzáver od koncového výpustného pásika tak, aby sa uzávery prekryvali.

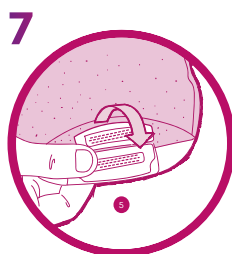

7
Podržte uzáver a rozložte zaist'ovací pásik.

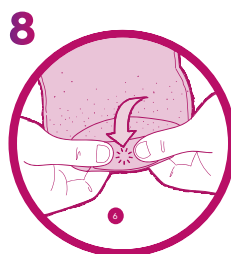

8
Stlačte palcom a prstami. Ucítite, ako zapadne na miesto.



zákaznícka linka

convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Viac informácií na bezplatnom čísle
zákazníckeho centra **0800 800 111**

Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931 alebo nám napíšte email na
stomalinka@convatec.com

Kompletný návod na použitie nájdete v návode na použitie.

©2025 Convatec Inc.™ označuje obchodnú známku spoločnosti skupiny Convatec. AP-64817-SVK-SLO-v1

www.convatec.sk