

## โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

### เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ซีเลส สเตย์ปกป้องผิวหนัง

Sillesse Sting Free Skin Barrier Spray

### คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สเปรย์ปกป้องผิวหนังชนิดไม่ระคายเคือง

### ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับปกป้องผิวหนัง

### วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดและเช็ดผิวให้แห้ง
2. ถูสเปรย์ให้ห่างจากบริเวณที่จะทำการรักษาประมาณ 10 ซม. และพ่นกวาดเพื่อเคลือบให้สม่ำเสมอ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสเปรย์แห้งสนิทดีแล้วก่อนทาผลิตภัณฑ์ทากาว เช่น อุปกรณ์หรือแผ่นปิดแผล
4. ควรใช้สเปรย์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นปิดแผลหรืออุปกรณ์เพื่อการปกป้องผิวหนังที่ได้ผลดี
5. เมื่อไม่ได้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทากาว แนะนำให้ฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 12-72 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิว
6. โดยปกติไม่จำเป็นต้องล้างออก อย่างไรก็ตามสเปรย์สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดทางการแพทย์ชนิดแตก
7. สเปรย์ซีเลส ไม่ส่งผลเสียต่อการยึดเกาะของแผ่นปิดแผลหรืออุปกรณ์หรือทำให้เกิดการระคายเคืองของฟิล์มปกป้องบนผิว

### คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง
- คำเตือน! อย่าฉีดพ่นบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง

ส่วนประกอบสำคัญ: Siloxane Copolymers

### วิธีการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นแสงอาทิตย์ อย่าให้สัมผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F

### ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420790 ใน 1 กล่องบรรจุ 50 มิลลิลิตร

### คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

### เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

### ผลิตโดย

บริษัท ไฮโดรคอม แอโรซอล, เบอร์เคนเฮด, สหราชอาณาจักร

### นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000