

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เอสเซนต้า ไดมอนด์ ซองลดกลิ่นชนิดเจล

ESENTA Diamonds™ Gelling and Odour Control Sachets

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ซองควบคุมการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์การใช้

คอนวาทะ ไดมอนด์ มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อเปลี่ยนสารคัดหลั่งให้กลายเป็นเจลจากถุงทวารเทียม ถุงเก็บอุจจาระ หรือถุงเก็บ Fecal management system และช่วยลดหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และคราบไขมันส่วนเกิน ใช้สำหรับอุจจาระเหลว

กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ดูแล และผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง

ข้อบ่งชี้

ใช้สำหรับอุจจาระเหลว

วิธีการใช้

- ใส่ซองทั้งหมดหนึ่งซองลงในถุงเก็บ ห้ามเปิดซอง
- ระบายทิ้งและกำจัดสารคัดหลั่งในถุงตามปกติ สามารถใส่ซองเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องใส่ของถุงเก็บหลังจากเททิ้ง

โปรดทราบ

ของเสียของคุณอาจดูสีเข้มกว่าปกติและ/หรืออาจมีจุดสีดำ ซึ่งเป็นสัญญาณที่มองเห็นได้ของระบบควบคุมกลิ่น ActiveOne™ หากต้องการตรวจสอบสีของของเสีย ให้หยุดใช้งานชั่วคราว อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรใช้ซ้ำ การใช้งานซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อน คุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ์อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ หลังใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพได้
- จัดการและกำจัดทิ้งตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากในระหว่างการใช้อุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานในประเทศของคุณ


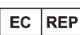










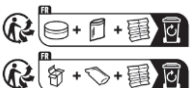

วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420791 ใน 1 กระปุกบรรจุ 100 ซิ่น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

	ผู้ผลิต		ตัวแทนในประเทศสหภาพยุโรป
	อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับ		ห้ามใช้ซ้ำ
	เก็บในสภาวะที่แห้ง		ห้ามรับประทาน
	หมายเลขแคตตาล็อก		ผู้นำเข้า
	เครื่องมือแพทย์		รุ่นการผลิต
	ตัวแทนในประเทศสวีเดน		วันหมดอายุ
	สัญลักษณ์การแยกประเภทสำหรับประเทศฝรั่งเศส		สัญลักษณ์การแยกประเภทสำหรับประเทศสเปน

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000