


Gebruiksaanwijzing

EsteemBody™


Eendelige soft convex gesloten stomasysteem

Zorg ervoor dat vóór het aanbrengen uw handen en de huid rondom de stoma schoon, droog en vrij van vette stoffen zijn.


Vorbereiding en aanbrengen

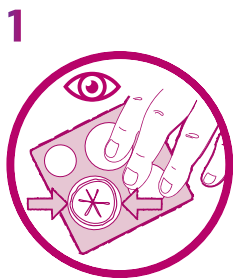

Plaats de stomamal over uw stoma om de juiste maat te bepalen.

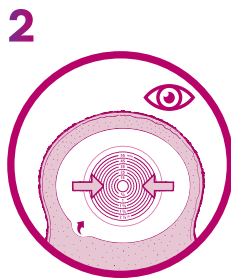

Als u een voorgeknippte huidplaat gebruikt, kies dan een huidplaat met een voorgeknippte stoma-opening die iets groter is dan uw stoma.

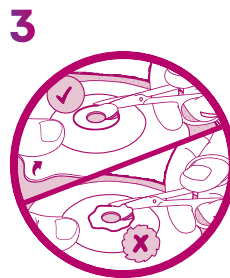


Als u een knipbare huidplaat gebruikt, breng de maat over op uw huidplaat en knip deze in de juiste maat.



Verwijder de beschermfolie van uw huidplaat.



Houd uw huidplaat onder uw stoma vast en breng deze omhoog tegen de huid rondom uw stoma. Druk de huidplaat tegen uw huid aan.

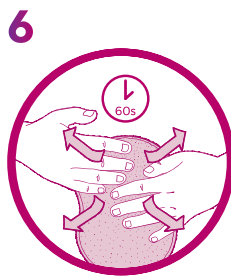

Strijk de huidplaat glad op uw huid. Oefen lichte druk uit op uw huidplaat gedurende 60 seconden om een goede hechting te garanderen.



Begin met het voorzichtig optillen van de bovenrand van uw huidplaat en pel deze vervolgens langzaam en voorzichtig naar beneden.



Gooi uw opvangzak weg volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

Scan om de instructievideo te bekijken



Meer informatie op www.convatec.nl of neem contact met ons op via info.convatec@convatec.com of 0800 - 330 00 10 (gratis)

Raadpleeg de bijsluiter voor volledige gebruiksaanwijzingen.