

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

นิตแทค แผ่นลอกคราบการทางการแพทย์

Niltac Sting Free Medical Adhesive Remover Wipe

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นลอกคราบการทางการแพทย์แบบไม่ระคายเคือง

ข้อบ่งใช้

ใช้ขจัดคราบการบนผิวหนัง

วิธีการใช้

1. ฉีกซองบรรจุออกและคลี่แผ่นออก
2. เช็ดเพื่อขจัดคราบการ

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด)
- หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงหากเกิดอาการระคายเคือง

ส่วนประกอบสำคัญ: Siloxanes


วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ให้พ้นแสงอาทิตย์

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420788 ใน 1 กล่องบรรจุ 30 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

 หมายถึง รุ่นการผลิต

 หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000