


Gebruiksaanwijzing

EsteemBody™


Eendelige soft convex stomasysteem voor urostoma's: Aanbrengen

Zorg ervoor dat u vóór het aanbrengen uw handen en de huid rondom uw stoma schoon, droog en vrij van vette stoffen houdt.


Vorbereitung und anbringen

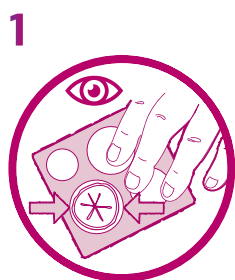


Plaats de stomamal over uw stoma om de juiste maat te bepalen.

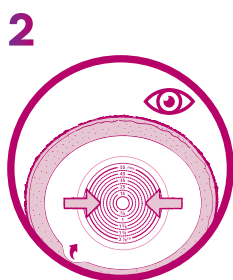


Als u een voorgeknipte huidplaat gebruikt, kies dan een huidplaat met een voorgeknipte stoma-opening die iets groter is dan uw stoma.

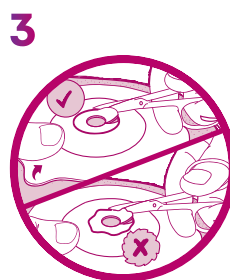

Als u een knipbare huidplaat gebruikt, breng de maat over op uw huidplaat en knip deze in de juiste maat.

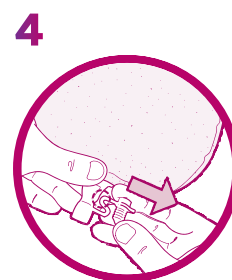


Blaas de opvangzak gedeeltelijk op door te blazen en scheid de zakfolies om lucht toe te laten.

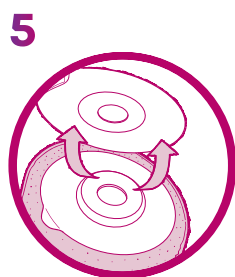

Verwijder de beschermfolie van uw huidplaat.



Houd uw huidplaat onder uw stoma vast en breng deze omhoog tegen de huid rondom uw stoma. Druk de huidplaat tegen uw huid aan.

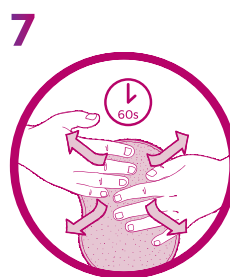


Strijk de huidplaat glad op uw huid. Oefen lichte druk uit op uw huidplaat gedurende 60 seconden om een goede hechting te garanderen.

Scan om de instructievideo te bekijken



Meer informatie op www.convatec.nl of neem contact met ons op via info.convatec@convatec.com of 0800 - 330 00 10 (gratis)

Raadpleeg de bijsluiter voor volledige gebruiksaanwijzingen.

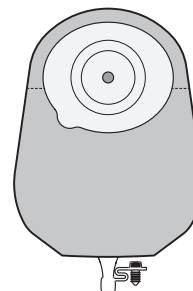


Gebruiksaanwijzing

EsteemBody™

Eendelige soft convex stomasysteem voor urostoma's: Legen, verwijderen en weggooien

Was uw handen na het legen en/of afvoeren van uw opvangzak.

Legen

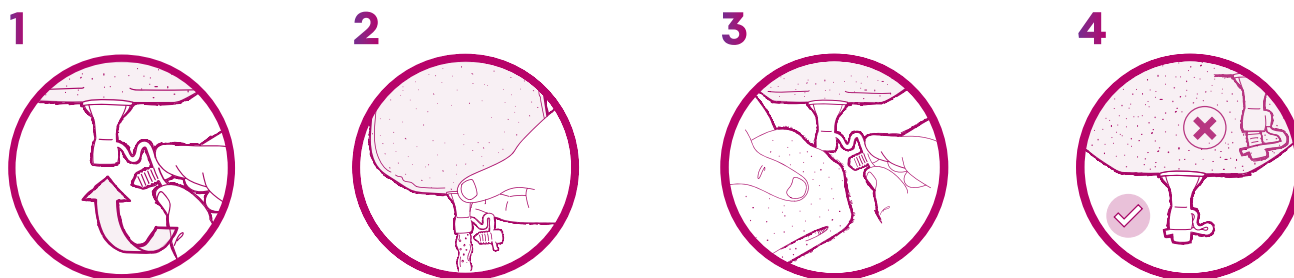


1
Begin met het kantelen van de kraan omhoog en naar u toe. Knijp in de basis van de kraan en open de kraan met uw andere hand.

2
Richt de kraan in het toilet om de urine af te voeren.

3
Ondersteun de opvangzak met één hand en veeg de buitenkant van de klep of kraan schoon met schoon tissuepapier met uw andere hand.

4
Plaats de plug voorzichtig in de kraan en zorg ervoor dat deze stevig gesloten is.

Verwijderen en weggooien

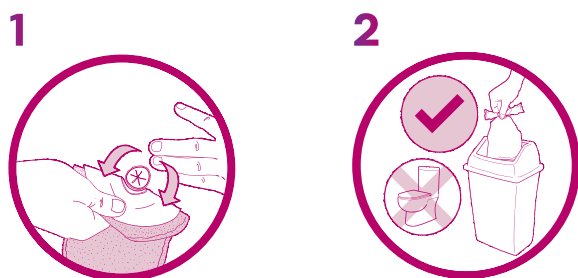

1
Begin met het voorzichtig optillen van de bovenrand van uw huidplaat en pel deze vervolgens langzaam en voorzichtig naar beneden.

2
Gooi uw opvangzak weg volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

Scan om de instructievideo te bekijken



Meer informatie op www.convatec.nl of neem contact met ons op via info.convatec@convatec.com of 0800 - 330 00 10 (gratis)

Raadpleeg de bijsluiter voor volledige gebruiksaanwijzingen.