

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ดูโอเดิร์ม ไฮโดรแอคทีฟ เจล

DUODERM™ Hydroactive™ GEL

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

DuoDERM™ Gel เป็นเจลปลอดเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรคอลลอยด์ตามธรรมชาติ (เพกติน, โซเดียมคาร์บอเนต, เมทิลเซลลูโลส) ในกระสายยาแบบใสและเหนียว DuoDERM Gel จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นให้กับบาดแผลที่ส่งเสริมกระบวนการหายของแผลโดยช่วยให้ร่างกายกำจัดเนื้อตายออกไปเองอย่างช้าๆ (autolytic debridement) และช่วยให้สามารถนำวัสดุปิดแผลชั้นที่ 2 ออกจากแผลโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นใหม่

ข้อบ่งใช้



DuoDERM Gel ออกแบบมาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและดูแลรักษาแผลที่ผิวหนังถูกทำลายลึกเป็นบางส่วนและทั้งหมด (partial and full-thickness) เช่น แผลกดทับ แผลเรื้อรังที่ขา และแผลจากเบาหวาน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับผู้ที่มีแผลหรือส่วนประกอบของเจลนี้

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดบริเวณบาดแผล ล้างแผลให้สะอาด และเช็ดผิวหนังโดยรอบให้แห้ง
2. หมุนฝาหลอดออกและดึงห่วงนิรภัยสีขาวออก
3. ปล่อยให้ปลายแหลมที่ฝาหลอดแทงเข้าไปในแผ่นปิดฝาหลอด

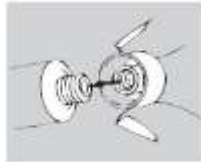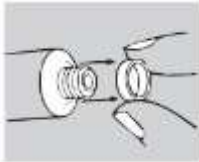

4. ทา DuoDERM Gel ลงบนแผลโดยตรง อย่าทาจนล้นออกมานอกแผลถึงผิวหนังโดยรอบ
5. ควรเปลี่ยน DuoDERM Gel เมื่อวัสดุปิดแผลร่วนหรือล้าออกเพื่อการทำแผลตามปกติ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแผลสูงสุดคือ เจ็ดวัน

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- 1) การแบ่งตัวของเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรังเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและไม่ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ DuoDERM Gel
- 2) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหรือเกิดการติดเชื้อระหว่างที่ใช้ DuoDERM Gel ควรเริ่มให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม อาจใช้ DuoDERM Gel ต่อไป แต่ควรติดตามความคืบหน้าของแผลอย่างรอบคอบ และการรักษาทั้งหมดควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีการติดเชื้อแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการรักษาด้วยการทำให้แผลเป็นระบบปิด
- 3) ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงการลดการกดทับแผลที่เหมาะสมสำหรับแผลเรื้อรังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน
- 4) สภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นของแผลที่เกิดขึ้นจากเจลอาจส่งผลให้ร่างกายกำจัดเนื้อตายออกไปเองอย่างช้าๆ ซึ่งอาจทำให้แผลดูใหญ่ขึ้นหลังจากการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลสองสามครั้งแรก

วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C หลีกเลี่ยงการแช่แข็ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 187987 ขนาด 30 กรัม ใน 1 กล่องบรรจุ 3 หลอด

ผลิตภัณฑ์รหัส 187990 ขนาด 15 กรัม ใน 1 กล่องบรรจุ 10 หลอด

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



ห้ามใช้ซ้ำ



อ่านเอกสารกำกับก่อนการใช้งาน หรือ เอกสารกำกับอิเล็กทรอนิกส์



ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยไอน้ำหรือความร้อน



ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด



หมายเลขแคตตาล็อก



รุ่นการผลิต



ห้ามนำไปเผาเชื้อซ้ำ



วันหมดอายุ



จำกัดอุณหภูมิ



ผู้ผลิต

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000