


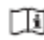
Stomadress® Plus

Satu Kepingan Kantung Boleh Salir

Arahan Penggunaan



 Penggunaan Tunggal.

 Rujuk arahan penggunaan

Bagi pengurusan output stoma.

INGATAN: Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir, terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumentasikan mengenai kewujudan pelekat di dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.

PERSEDIAAN KANTUNG

Kulit peristom **mesti** bersih, kering dan bebas daripada bahan pelarut atau berminyak.

Untuk kantung dengan bukaan stoma yang siap dipotong:

Pilih kantung dengan bukaan stoma siap dipotong sekurang-kurangnya 1/8 inci (3mm) **lebih besar** daripada diameter stoma terbesar.

JANGAN besarkan bukaan stoma yang siap dipotong.

Tanggalkan perisai plastik pelindung daripada cakera Stomahesive®.


Untuk kantung potongan tersuai:

Sebelum memotong, pisahkan panel hadapan dan belakang.

Menggunakan garis panduan pada kertas pelepas, potong lubang tengah mengikut saiz yang sama dengan stoma. **Jangan potong melepasi baris terakhir.**



PEMASANGAN KANTUNG

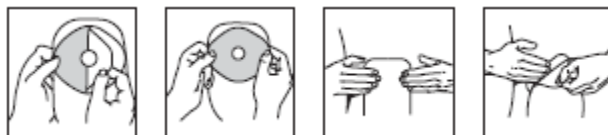

Tanggalkan kertas pelepas. Pastikan padanan kemas di sekeliling stoma.

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR



PENANGGALAN KANTUNG




Produk ini boleh kekal di tempatnya semasa mandi, mandi hujan atau berenang. Tepuk sehingga kering selepas terdedah kepada air.

PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

KEADAAN STORAN

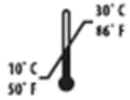

Julat suhu storan.



Pastikan kering.
Elakkan pendedahan kepada kelembapan tinggi.



Ingatan



Nombor lot/kawalan



Tarikh tamat tempoh

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk pakar kesihatan.

©2016 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.