

ConvaCare®

### Pengelap Sawar Pelindung

Arahan Penggunaan



Baca arahan penggunaan.



Penggunaan Tunggal

Menyediakan lapisan filem sawar pada kulit di bawah sawar kulit ostomi, pelekat, pita dan pembalut hidrokoloid.

### LANGKAH BERJAGA-JAGA

**UNTUK KEGUNAAN LUARAN SAHAJA.** Elakkan terkena mata. Jangan gunakan secara langsung di atas luka, melecur atau stoma. Gunakan hanya di sekitar luka, melecur atau stoma.

**AMARAN:** Gunakan hanya seperti diarahkan. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak. Jangan gunakan berhampiran api terbuka.

### ARAHAN:

1. Bersihkan bahagian, bilas, keringkan sepenuhnya.
2. Sapukan Pengelap Sawar Pelindung ConvaCare® ke kawasan yang memerlukan perlindungan dan biarkan kering. Sekiranya terkena kulit yang terkelupas, rasa mencucuk mungkin dialami buat seketika.
3. Sapukan sawar kulit ostomi, pelekat, pita, dll.
4. Selepas menanggalkan sawar kulit, pelekat, dll., sisa yang tinggal boleh ditanggalkan menggunakan Penghilang Pelekat ConvaCare®.

### PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

### KEADAAN STORAN



Suhu storan. Elakkan panas berlebihan.



Nombor lot/kawalan



Tarikh tamat tempoh

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, sila rujuk pakar kesihatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

Dikilang untuk



ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409

1-800-422-8811  
www.convatec.com

© 2015 ConvaTec Inc.  
®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.