

**SUR-FIT®
Natura®
Durahesive®
Sawar Kulit Cembung Boleh Bentuk dengan bibir**

Arahan Penggunaan



Penggunaan Tunggal



Baca arahan penggunaan.

KEADAAN STORAN



Suhu storan.



Pastikan kering. Elakkan pendedahan kepada kelembapan tinggi.



Nombor lot/kawalan

PENERANGAN PRODUK

Sawar Kulit Cembung Boleh Bentuk SUR-FIT Natura Durahesive dengan bibir adalah sawar kulit cembung dengan pelekat yang boleh dibentuk yang membolehkan bukaan stoma dibentuk kepada bentuk dan saiz stoma tanpa memerlukan gunting. Sawar Kulit Cembung Boleh Bentuk SUR-FIT Natura Durahesive dengan bibir **mesti** digunakan bersama-sama dengan kantung SUR-FIT Natura.

INDIKASI

Bagi pengurusan output stoma.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

INGATAN: Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumentasikan mengenai kewujudan pelekat di dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.


INGATAN: Sila berhati-hati apabila terdapat kompromi peredaran darah yang diketahui terhadap stoma atau kawasan bersebelahan dengan kulit peristom.

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk profesional penjagaan kesihatan.

ARAHAN PENGGUNAAN

PERSEDIAAN SAWAR KULIT

Kulit peristom **mesti** bersih, kering dan bebas daripada bahan pelarut atau berminyak.

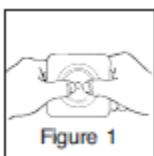

Sebelum anda memulakan persediaan sawar kulit, bacalah seksyen ini untuk membiasakan diri anda dengan prosedur.

1. Ukur stoma menggunakan panduan pengukur stoma yang disertakan dan pilih ukuran Sawar Kulit Cembung Boleh Bentuk SUR-FIT Natura Durahesive dengan bibir yang sesuai.
2. Buka pakej sawar kulit individu, mengekalkan dulang pakej yang jernih. Gunakan pen atau penanda untuk melukis corak stoma pada dulang pakej yang jernih. Anda mungkin mahu memotong corak dan menggunakan dulang pakej yang jernih sebagai templat anda untuk kegunaan masa hadapan. Kemas kini templat secara berkala apabila saiz atau bentuk stoma berubah. Corak ini akan digunakan untuk melukis garis bentuk di bahagian belakang sawar kulit untuk

- membantu membimbing anda dalam membentuk bukaan stoma dalam sawar kulit.
3. Lakar corak stoma (dari dulang pakej anda) ke atas bahagian belakang sawar kulit plastik (sisi badan sawar kulit) bagi Sawar Kulit Cembung Boleh Bentuk SUR-FIT Natura Durahesive dengan bebibir. Sesetengah orang mungkin mendapati bahawa dari semasa ke semasa mereka dapat membentuk bukaan stoma tanpa melakar corak.
 4. Dengan sisi bebibir menghadap ke arah anda (sisi bertentangan bahagian belakang penutup plastik), tekan bahagian tengah penutup plastik yang ter naik ke dalam lubang pemula sehingga bahagian tengah menonjol ke luar. Langkah ini akan membantu dalam membentuk sawar kulit.
 5. Untuk memperibadikan bukaan stoma, letakkan hujung jari (atau ibu jari) anda di pinggir lubang pemula dan mula gulungkan sawar kulit ke belakang. Gunakan jari (atau ibu jari) anda untuk terus menggulungkan sawar kulit ke belakang sehingga anda dapat melihat corak stoma pada belakang penutup plastik. Oleh sebab ini adalah produk yang boleh dibentuk, gunting tidak disyorkan untuk memperibadikan bukaan stoma.

Selepas membentuk bukaan stoma, keluarkan penutup plastik dari sawar kulit. **Jangan tanggalkan kertas pelepas putih dari sempadan pita bebibir pada masa ini.**

PEMASANGAN SAWAR KULIT



1. Tengahkan bukaan di atas stoma dan tekan sawar kulit ke tempatnya.
2. Ratakan hujung dalam yang paling dekat dengan stoma anda menggunakan jari anda (memegang di tempatnya selama 30 saat) untuk memastikan sawar kulit memegang stoma.
3. Tanggalkan kertas pelepas putih dari sempadan pita bebibir dan tekan ke tempatnya: ratakan sebarang kedutan dalam sempadan pita bebibir.
4. Untuk bantuan dengan soalan pemasangan, sila hubungi jabatan Perkhidmatan Profesional ConvaTec di 1-800-422-8811 di AS atau 1-800-465-6302 di Kanada.

PEMASANGAN KANTUNG

Pilih kantung saiz yang sesuai agar sepadan dengan sawar kulit.



Sebelum memasang kantung, biarkan sejumlah kecil udara memasukinya dengan menyebarkan beg itu dengan perlahan seperti yang ditunjukkan.

Lampirkan kantung yang sepadan kepada sawar kulit seperti berikut:



Untuk memeriksa kedap bebibir, tekan di bahagian bawah bebibir dan tekan sekeliling ke bahagian atas bebibir. Beberapa 'klik' mungkin kedengaran.

PENANGGALAN KANTUNG




PENANGGALAN SAWAR KULIT



Untuk menanggalkan sawar kulit dari kulit anda, sokong kulit dengan satu tangan dan perlahan-lahan kupas sawar kulit dari kulit anda.

MENGGUNAKAN OUTLET INVICLOSE™

ARAHAN UNTUK MENUTUP KANTUNG:

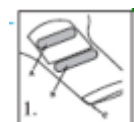

Sistem penutup ekor InvisiClose (1) terdiri daripada penutup keselamatan (A), penutup bercantum (B) dan saluran hujung outlet (C).



Pegang penutup keselamatan di hadapan kantung yang mendedahkan penutup bercantum. **(2)**



Lipat hujung ekor ke arah anda empat kali dan pastikan penutup bercantum bertindih. **(3)**



Tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya di sepanjang keseluruhan kepanjangannya. **(4)**



Balut penutup keselamatan di sekeliling hingga ke belakang kantung (bahagian tubuh) dan tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya. **(5)**

ARAHAN UNTUK MENYALIRKAN KANTUNG:



Pusingkan bahagian belakang kantung (bahagian badan) ke arah anda. Berhati-hati angkat penutup keselamatan ke arah anda untuk membuka kunci. **(6)**



Sambil memegang penutup keselamatan terhadap bahagian depan kantung, buka kunci penutup bercantum dengan mengangkat di sudut **(7)** dan bongkar lipatan sebanyak empat kali. **(8)**



Untuk memudahkan penyaliran dan/atau pembersihan, anda boleh membuka hujung ekor dengan menolak kedua-dua hujung salur hujung outlet menggunakan ibu jari dan jari telunjuk anda. **(9)**

Sekiranya dikehendaki, ekor kantung boleh dibersihkan dengan sabun lembut dan air. Tepuk sehingga kering.

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR




Jika anda menggunakan kantung boleh salir, pastikan klik ekor berada di kedudukannya.

MENGGUNAKAN PAIP ACCUSEAL® UNTUK KANTUNG UROSTOMI



Untuk sambungan ke sistem saliran malam:

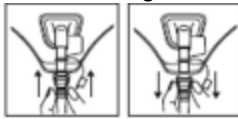

MENGGUNAKAN PAIP SALIRAN LIPATAN UNTUK KANTUNG UROSTOMI



Untuk sambungan ke sistem saliran malam:



PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

Diedarkan di Kanada oleh:



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

ConvaTec Canada Ltd.
Montreal, Quebec, Kanada
1-800-465-6X2

www.convatec.com

© 2015 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.