

ConvaCare®

Pengelap Penghilang Pelekat

Arahan Penggunaan



Baca arahan penggunaan.



Penggunaan Tunggal

Membantu dalam menghilangkan semua pelekat termasuk sawar kulit, wafer, pita dan pembalut hidrokoloid

LANGKAH BERJAGA-JAGA

UNTUK KEGUNAAN LUARAN SAHAJA. Elakkan terkena mata. Jangan gunakan secara langsung di atas luka, melecur atau stoma. Gunakan hanya di sekitar luka, melecur atau stoma.

AMARAN: Gunakan hanya seperti diarahkan. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak. Jangan gunakan berhampiran api terbuka.

ARAHAN:

1. Perlahan-lahan angkat satu sude sawar kulit, wafer, pita atau pembalut hidrokoloid.
2. Lapkan tuala penghilang pelekat di antara kulit dan pelekat, dengan mengopek perlahan-lahan pelekat ke belakang sambil terus mengelap.
3. Basuh dengan sabut yang lembut. Bilas dengan air dan tepuk sehingga kering.
Nota: Jika penghilang pelekat tumpah pada pakaian, basahkan dengan air; basuhan biasa sepatutnya menghilangkan kesan Kotoran

Rawatan Pertolongan Cemas: Jika ditelan, JANGAN paksa mangsa muntah. Hubungi doktor. Jika terkena mata, siram dengan air.

RAMUAN: C₁₂-C₁₅ Alkohol Benzoat, d-limonene, hidrokarbon ketulenan tinggi, alkylaryl teretoksilat alkohol-kelapa dietanolamida, 2,4 alkohol diklorobenzil, hidroksitoluena dibutulkan.

PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

KEADAAN STORAN



Suhu storan. Elakkan panas berlebihan.



Nombor lot/kawalan



Tarikh tamat tempoh

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, sila rujuk pakar kesihatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

© 2015 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.